
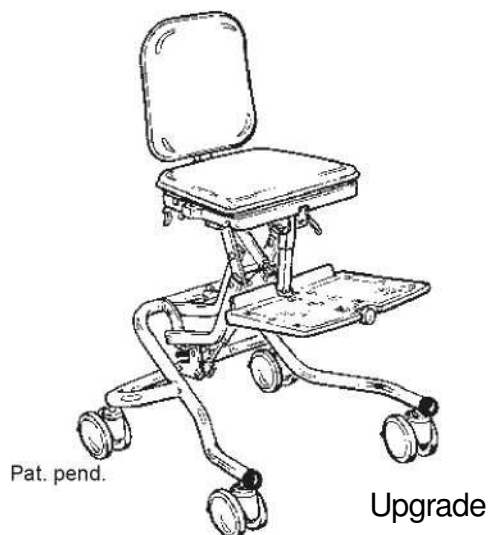


wombat[™]

Kasutusjuhend

SISUKORD

OHUTUSNÕUDED	4
GARANTII.....	4
TÖÖRIISTAD.....	4
KASUTAMISEKS ETTEVALMISTAMINE	5
ISTME JA SELJATOE REGULEERIMINE	6
WOMBAT BASICU RAAMI KÕRGUSE REGULEERIMINE ...	7
WOMBAT UPGRADE RAAMI KÕRGUSE REGULEERIMINE ...	8
PEATUGI.....	9
ÄRAPÖÖRATAVAD KÜLGTOED.....	10
KÄETUGI JA LAUAPLAAT	11
PUUSATUGI.....	12
JALGEVAHE TUGI.....	12
ÄRAPÖÖRATAVAD PÕLVETOED	13
JALATUGI	14
ABISTAJA KÄEPIDEMED.....	15
VESTID JA VÖÖD	15
VEST JA RISTVEST.....	17
RINNAKUVÖÖ	17
RINNAVÖÖ	18
PUUSAVÖÖ	18
Y-PUUSARIHM.....	19
VAAGNATRAKSID	19
PAHKLUURIHMAD.....	20
JALARIHMAD.....	20
KÄERIHMAID.....	21
H-VÖÖ.....	21
TÕUKEKÄEPIDE.....	22
SELJATOEPADJA ISTEMUGAVUS	23
ISTMEPADJA ISTEMUGAVUS	24
TOOTE TÄHISED.....	25
MÕÕTMEID.....	26
MATERJALIDE ANDMED	27
TOOTJA.....	27
EDASIMÜÜJA	27
HOOLDUS	28
PLEKKIDE EEMALDAMINE.....	29

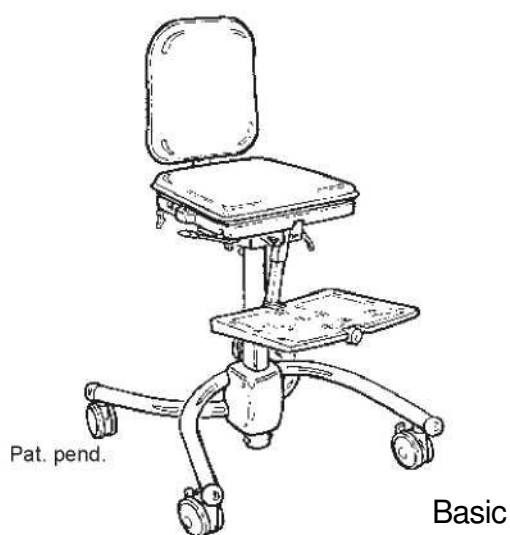

WOMBAT

Õnnitleme sind, et valisid WOMBATi. Oleme kindlad, et see täidab täielikult su ootused. Nagu paljud muud R82 kvaliteettooted, on ka WOMBAT välja töötatud meie pikaajaliste abivahendite tootmise ja väljatöötamise kogemuste põhjal.

R82 pakub eritooli Wombat kolmes mõõdus ning kahes versioonis: WOMBAT Basic ja WOMBAT Upgrade

Wombat basic on saadaval käsitsi reguleeritava kõrgusega või gaasvedruga. Wombat upgrade on gaasvedruga või elektrimootoriga. Mõlemat versiooni tarnitakse multireguleeritava istmega, seljatoega ja jalatoega.

Käesolev kasutusjuhend on mõeldud juhiseks kasutajale, et ta saaks maksimaalse tulemuse Wombati poolt pakutavatest võimalustest. Seetõttu soovitame sul enne Wombati kasutamist käesolev kasutusjuhend läbi lugeda

OHUTUS



Wombatile on omistatud CE-märgis. See tähendab, et Wombat vastab kõikidele Euroopas kehtivatele asjakohastele ohutusnõuetele.

Igapäevase kasutamise korral on toote kasutusea pikkus 5 aastat. Selle möödumisel tuleb eluea pikendamiseks tooli taastada (R82 poolt).



Eemalda tootelt CE-märgis, kui oled toodet ümber ehitanud või sellel mitteoriginaalvaruosi kasutanud.



Ära jäta sellel toolil olevat last järelevalveta. Kindlusta pidev täiskasvanu kohalolek. Wombati ebaõige kasutamine võib põhjustada kasutajale tõsiseid vigastusi. Kindlusta, et kõik kinnitused ja reguleeringud oleksid korrektselt fikseeritud ning kontrolli neid regulaarselt.



Wombat on ette nähtud vaid siseruumis kasutamiseks.



Tool on projekteeritud vaid ühele kasutajale. Ära paiguta eritoolile üle ühe kasutaja.



Kasutusjuhendi viimane versioon on kättesaadav aadressil: www.r82.com

GARANTII

R82 A/S võtab teateid defektide kohta vastu kahe aasta jooksul.

Wombati garantii kehtib 12 kuud. Garantii kehtib ainult juhul, kui on kasutatud ainult R82 originaalvariosi ja -tarvikuid. Kõik eriseadistused peab tegema R82. R82 ei vastuta seadmete või isikute vigastuste eest, mille on põhjustanud mitteoriginaalvaruosade kasutamine või R82 poolt volitamata isiku

TÖÖRIISTAD

Käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud reguleeringute läbiviimiseks kasuta eritooli komplektis olevat kuuskantvõtit.



Pärast reguleerimist keera kruvid uuesti kinni.

KASUTAMISEKS ETTEVALMISTAMINE


Wombat Basic:

Wombati lahtipakkimisel leiad sa, et seljatugi on pakitud eraldi.

Võta kõigepealt kastist välja raam. Vabasta kesksambal olev käsiratas (A). Vabasta istme parema külje all olev käepide (B), et istet saaks tõsta.

Tõmba jalatugi välja nii, et see jääks kinnituskronsteini suhtes täisnurga alla. Vabasta käepide (C) ja reguleeri jalatugi sobivasse asendisse.

Seljatoe paigaldamiseks pööra nuppu (D) päripäeva ja tõmba välja.

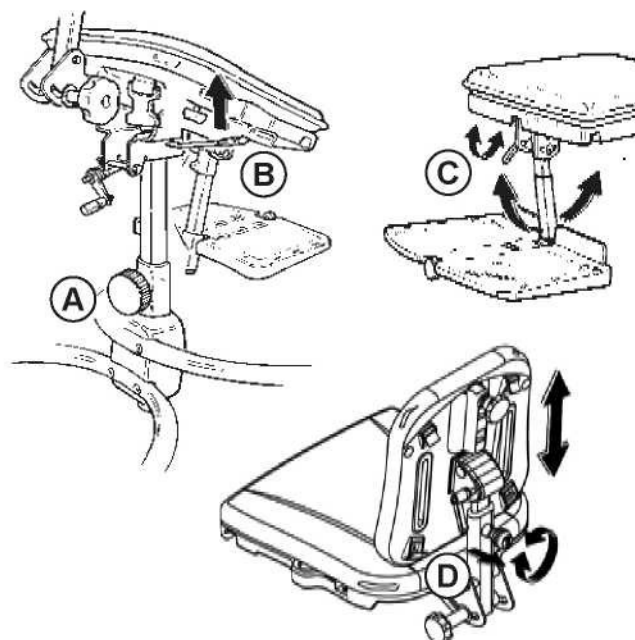

Wombat Upgrade:


Wombati lahtipakkimisel leiad sa, et seljatugi on pakitud eraldi.


Võta kõigepealt kastist välja raam. Istme tõstmiseks vajuta jalaga pedaalile (E). Enne aga vabasta pedaalist vasakul asuv turvalukk (F).

Tõmba jalatugi välja nii, et see jääks kinnituskronsteini suhtes täisnurga alla. Vabasta käepide (G) ja reguleeri jalatugi sobivasse asendisse.

Suurused 1 ja 2: Seljatoe paigaldamiseks pööra nuppu (D) päripäeva ja tõmba välja.

Suurus 3: Seljatoe paigaldamiseks eemalda kõigepealt turvamutter (I). Tõmba välja lukustuskäepide (J). Pista seljatoe kronstein hoidikusse ja pööra vertikaalseks. Seljatoe kronsteini lükkamiseks hoidikusse vajuta alla sinine rõngas (K). Pane turvamutter kohale tagasi. Reguleeri seljatugi soovitavasse asendisse. Pane lukustuskäepide (J) uuesti kinni.

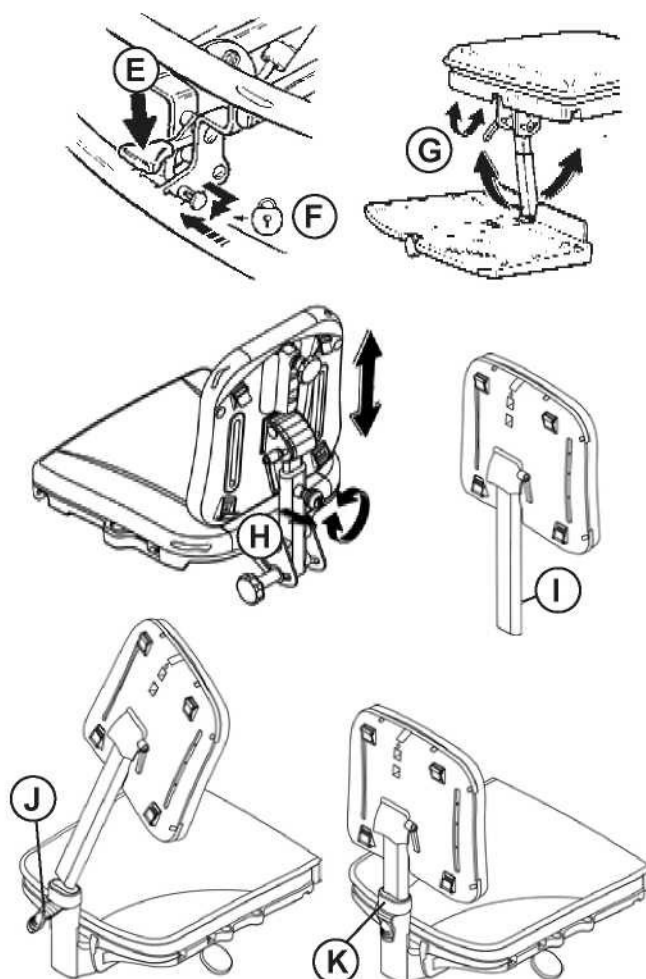

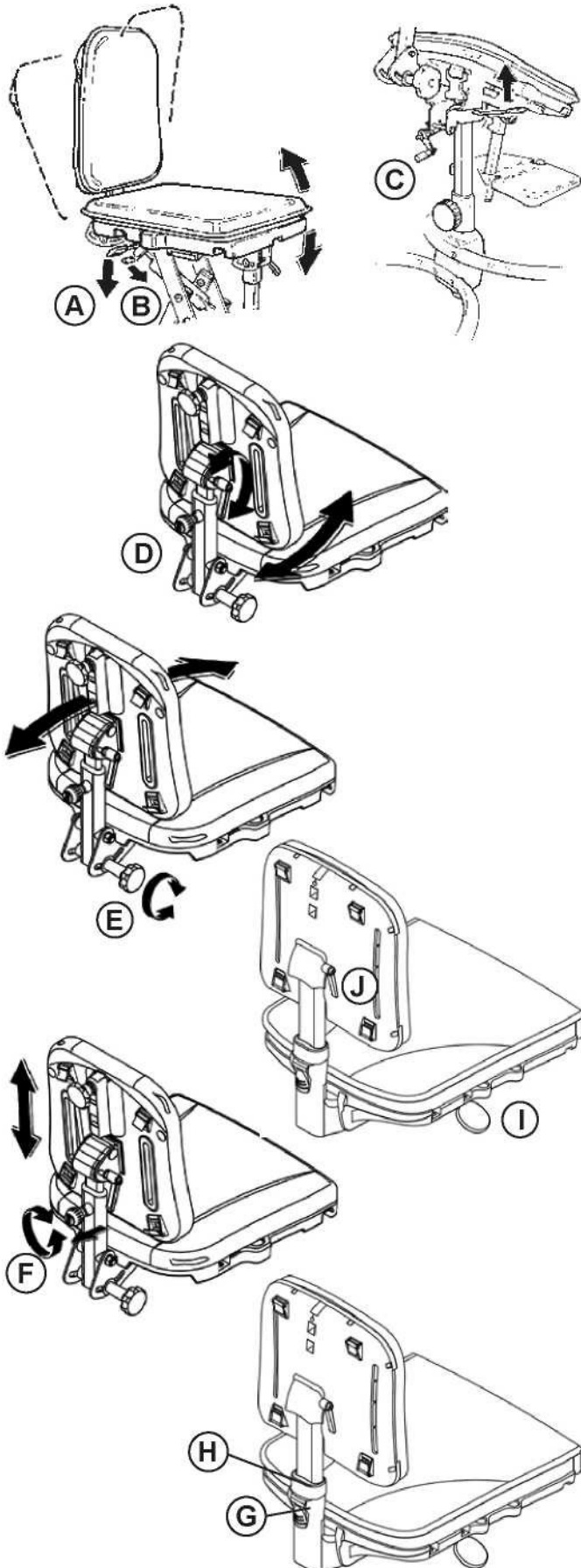

ISTME JA SELJATOE REGULEERIMINE

Wombat Upgrade istme kalde reguleerimiseks tuleb lihtsalt vajutada istme all asuvale vabastuskäepidemele (A). Enne vabastuskäepidemele vajutamist pööra kõrvale kaitseriiv (B).

Wombat Upgrade istme kalde reguleerimiseks tuleb pöörata istme all asuvat vända (C).

 Hoia alati kinni seljatoest, et vältida istme kaldumist liigselt ettepoole.

Seljatoe kallutamiseks vabasta seljatoe taga asuv käepide (D).

Istme sügavus (suurused 1 ja 2):

Istme sügavuse vähendamiseks lükka seljatuge ettepoole ja reguleeri seljatoe kaldenurk. Seljatoe reguleerimiseks vabasta käepide (E).

Istme sügavus (suurus 3):

Tõmba välja istme all olev käepide (I) ja lükka seljatuge ette- või tahapoole.

Vabasta seljatoel olev käepide (J) ja reguleeri seljatoe kalle.

Seljatoe kõrgus (suurused 1 ja 2):

Seljatoe kõrguse reguleerimiseks vabasta nupp (F). Vabastamiseks keera nuppu vastupäeva. Seejärel tõmba nupp välja ja reguleeri seljatoe kõrgus sobivaks.

Vabasta nupp ning see fikseerib seljatoe asendi. Pööra nuppu päripäeva, see kinnitab nupu.

Seljatoe kõrgus (suurus 3):

Seljatoe kõrguse reguleerimiseks tõmba välja lukustuskang (G) ja vajuta alla sinine rõngas (H). Liiguta seljatugi sobivale kõrgusele ja seejärel lase lahti sinine rõngas (H). Lükka

WOMBAT BASIC RAAMI KÕRGUSE REGULEERIMINE


Wombat basic raam on reguleeritav käsitsi või gaasvedruga.

Käsitsi reguleeritav Wombat basic:


Wombat basicu kõrguse reguleerimiseks vabasta käepide (A). Reguleeri kõrgus ja fikseeri raam soovitud kõrgusel.

Gaasvedruga Wombat basic:

Gaasvedruga raami kõrguse reguleerimiseks vajuta alla istme all asuv käepide (B). Enne käepidemele vajutamist pööra kõrvale kaitseriiv.

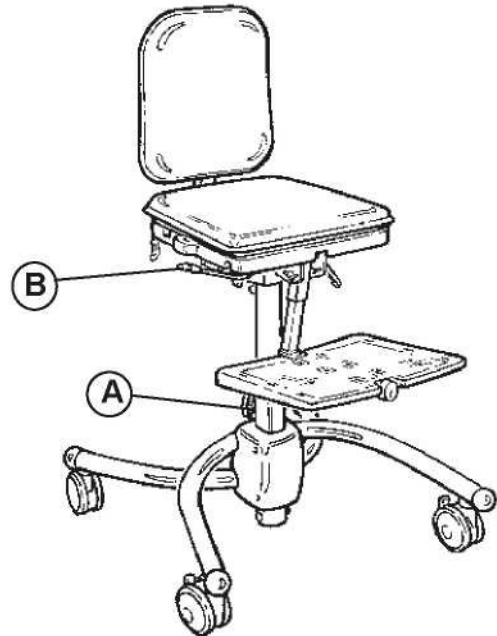


WOMBAT UPGRADE RAAMI KÕRGUSE REGULEERIMINE

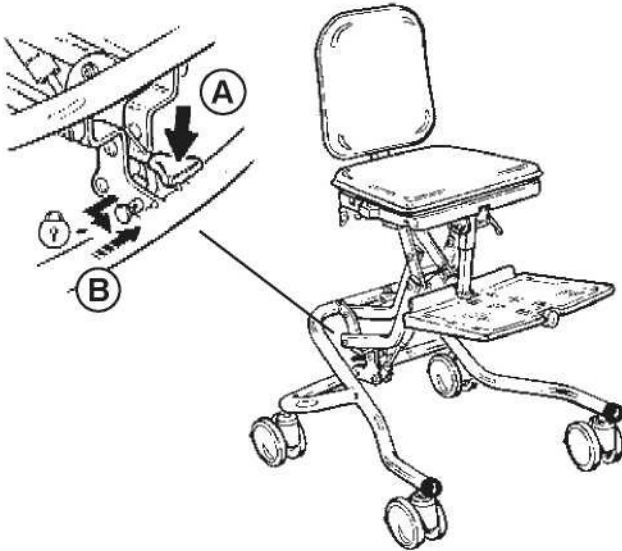

Wombat upgrade raam on reguleeritav gaasvedruga või elektrimootoriga.

Gaasvedruga Wombat upgrade: Kõrgus on reguleeritav põrandast kuni laua kõrguseni. Kõrguse reguleerimiseks vajuta pedaalile (A). Pedaal on varustatud turvanupuga (B).

Elektrimootoriga Wombat upgrade: Kõrguse reguleerimiseks kasuta pulti (C).

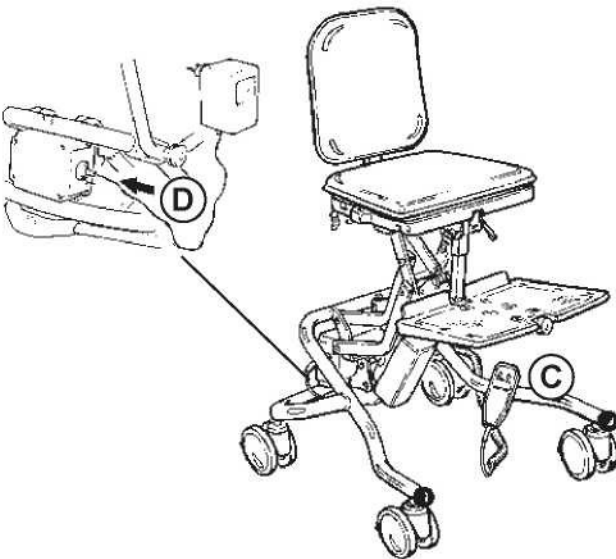

Istme alumisse asendisse reguleerimiseks tuleb eelnevalt ära võtta jalatugi.

Akude (D) laadimine:

- 1) Ühenda kaasas olev akulaadija elektrivõrku.
- 2) Võta lahti akusid mootoriga ühendav juhe.
- 3) Kinnita akulaadija kaablid akukarbi kontaktide külge.
- 4) Lae akusid näiteks igal öösel või ka harvemini 8 – 12 tunni kaupa. Akusid ei ole võimalik üle laadida. Küll aga ei tohiks akusid täiesti tühjaks kulutada. Akud tuleks välja vahetada iga 4 aasta järel.



Seadme pikema eluea tagamiseks lülita see enne kasutamist 12 tunniks elektrivõrku.



Ära jäta istmel istuva lapse kätte lahkudes juhtpulti ning ära luba ka teistel lastel juhtpuldiga mängida.






Elektrilisel kõrgusereguleerijal puudub turvapiiraja.

PEATUGI



Peatugi on paigaldatud seljatoe külge ning on fikseeritud kruviga (A).

Peatoe kõrguse reguleerimiseks vabasta kaasaoleva kuuskantvõtme abil kruvid (B).

Peatoe kalde reguleerimiseks vabasta kruvi (C). Peatoe külgsuunas nihutamiseks vabasta kruvi (D).

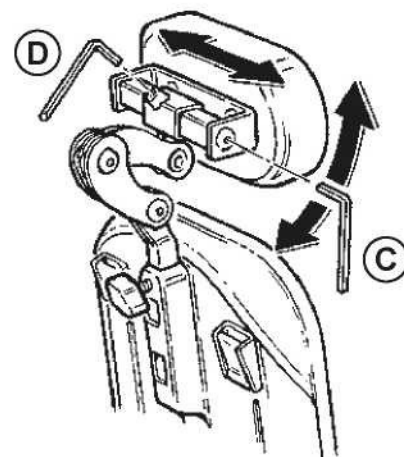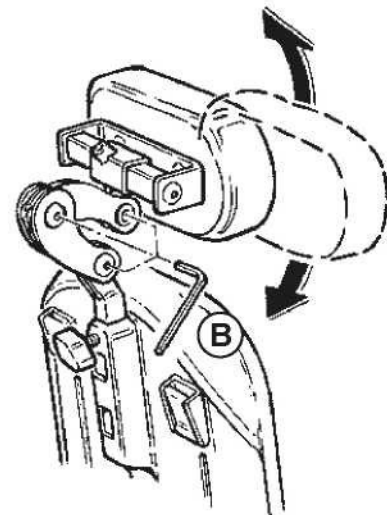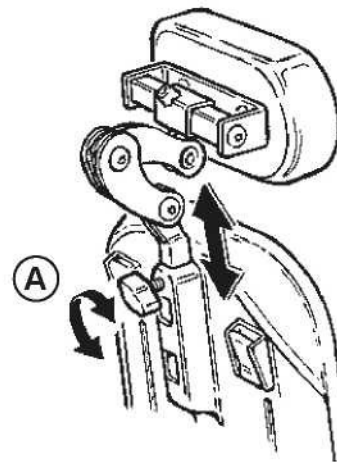

ÄRAPÖÖRATAVAD KÜLGTOED

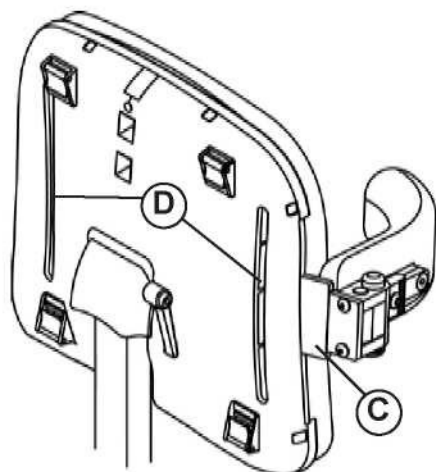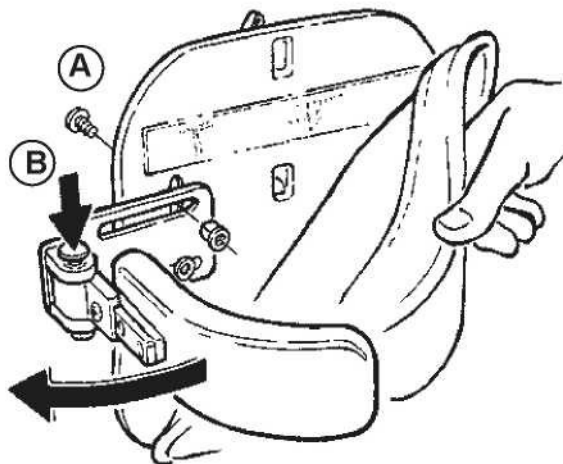

Wombat, suurused 1 ja 2:

Eemalda seljatoe kate ja kinnita külgtugi kuuskantvõtme abil seljatoe külge kaasaolevate 5mm kruvidega. Ära kasuta selleks pikki kruvisid.

Külgtoe ärapööramiseks vajuta alla punane nupp (B).

Wombat, suurus 3:

Ärapööratav külgtugi (C) kinnitatakse seljatoes oleva soone abil. Pista pikad kruvid soontesse (D). Aseta mutrid seljatoe esiküljel olevatesse väikestesse avadesse. Kindlusta, et kruvi oleks pistetud läbi plaadi (C) ja keeratud korralikult mutrisse, seejärel kinnita järgmine kruvi. Ära kasuta selleks komplektis olevaid lühikesi kruvisid.



Soovitatakse vahetevahel külgtugede pöördliigendeid õlitada.

KÄETUGI JA LAUAPLAAT

Kinnita käetoe kandur istme külge ja reguleeri külgsuunas. Fikseeri kanduri asend käsikruviga (A).

Käetoe kõrguse reguleerimiseks vabasta nupp (B). Vabastamiseks keera nuppu vastupäeva. Seejärel tõmba nupp välja, see vabastab käetoe. Pärast reguleerimist vabasta nupp ning see fikseerib käetoe kõrguse. Pööra nuppu päripäeva, see kinnitab nupu.






Käetoe pööramiseks vabasta kang (C). Fikseeri soovitud nurga alla pööratud käepide.


Suurusel 3 on käepideme hoidmiseks kaks vertikaalset varrast, mis pistetakse kahte istme servas olevasse avasse (D).

Lauaplaadi paigaldamiseks pista lauaplaadi kinnituskronstein istme all olevasse torusse. Sobivasse asendisse reguleeritud lauaplaat kinnita käsikruvidega (E).



Lauaplaati saab kinnitada mõlemal pool olevate kinnituskronsteinidega.

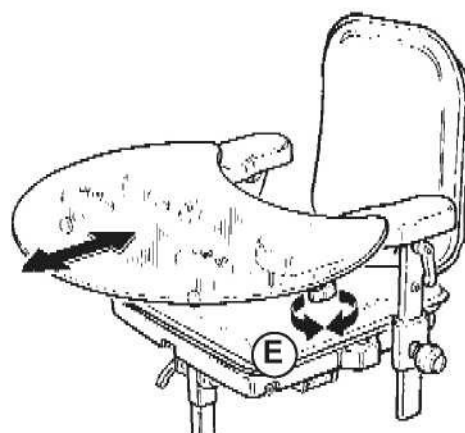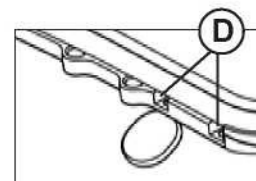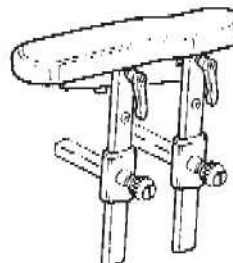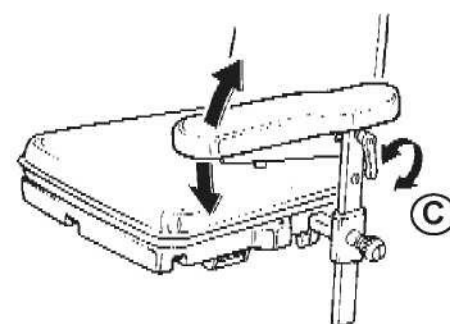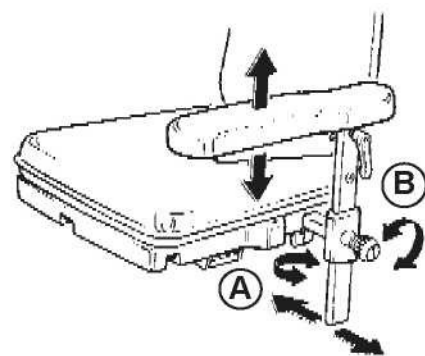

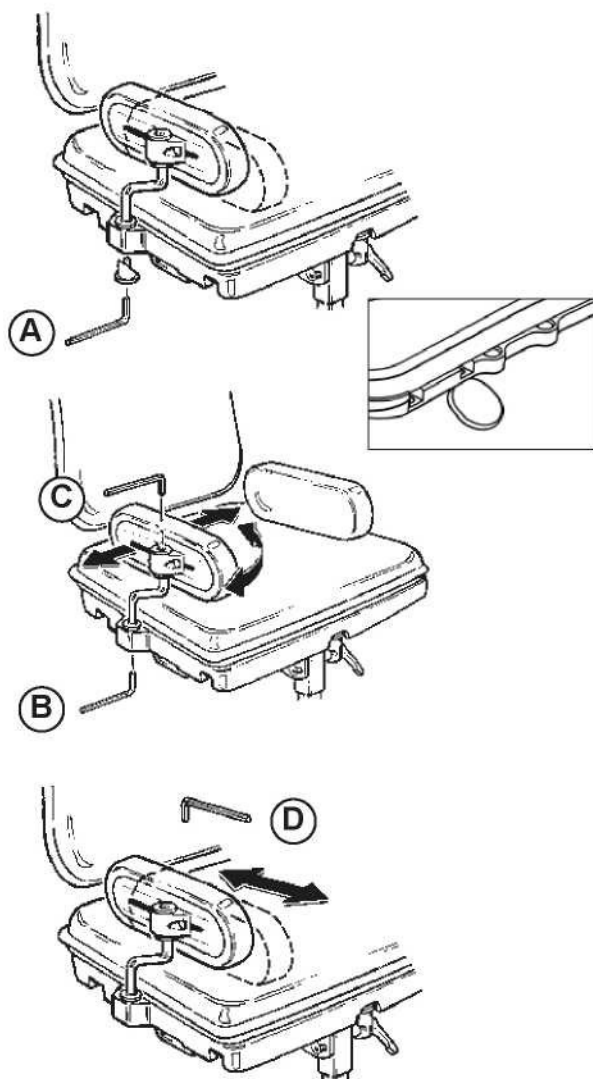

PUUSATUGI


Puusatoe kinnitamiseks istme külge kasuta kaasasolevat 5mm kuuskantvõtit (A).



Wombati suurusel 3 on kaks puusatoe kinnitamise võimalust.

Puusatoe reguleerimiseks vabasta kruvid (B) ja (C). Pärast reguleerimist keera kruvid kinni 5mm kuuskantvõtmega.

Puusatoe pikisuunas reguleerimiseks vabasta kaasaoleva 4mm kuuskantvõtme abil kruvid (D). Reguleeri puusatoe asend ja fikseeri soovitud asendis.

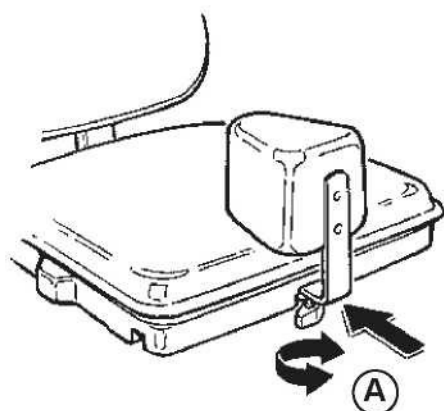

JALGEVAHE TUGI

Kinnita jalgevahe tugi istme esiserva külge.

Pikisuunas reguleerimiseks vabasta istme all olev käsikruvi (A).

ÄRAPÖÖRATAVAD PÕLVETOED

Põlvetoed on paigaldatud istme servade külge ning kinnitatud istme all oleva kahe kruviga (A).

Põlvetoet kallutamiseks vabasta 5mm kuuskantvõtme abil kruvi (B).





Põlvetoet padja pööramiseks vabasta 4mm kuuskantvõtme abil kruvi (C).

Põlvetoet pikisuunas reguleerimiseks vabasta 4mm kuuskantvõtme abil kruvi (D). Pärast reguleerimist keera kruvid kinni.


Põlvetoet ärapööramiseks vajuta alla punane nupp (E).



Soovitatakse vahetevahel põlvetus- ja pöördliigendeid õlitada.

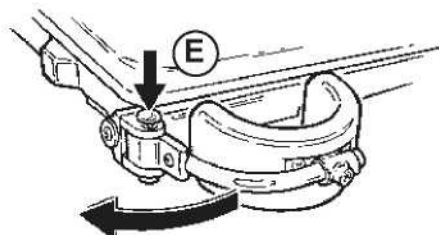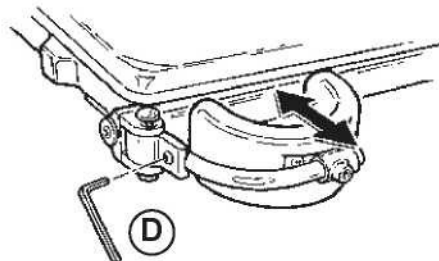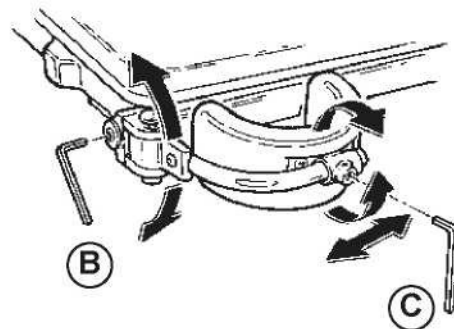
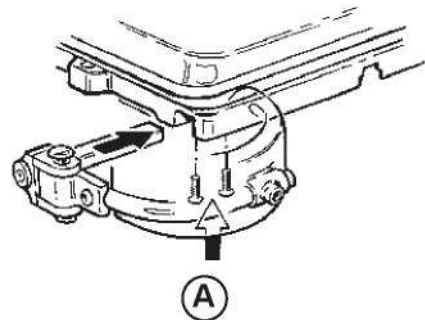


JALATUGI

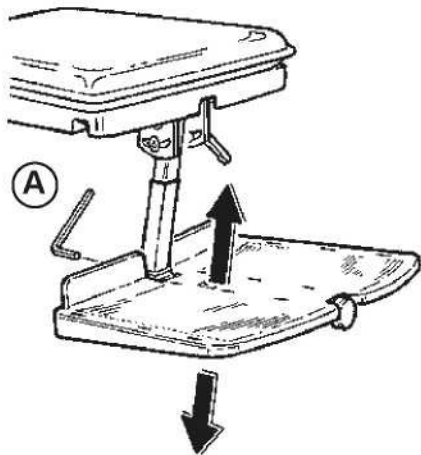


Standardvariandis tarnitakse Wombat koos jalatoega. Jalatuge on võimalik ära võtta – näiteks kui istet kasutatakse põranda tasapinnas. Lisaks on võimalik jalatoe kõrgust reguleerida. Kasuta kruvi (A) kinni- ja lahtikeeramiseks kaasasolevat 4mm kuuskantvõtit.

Jalatoe kalde muutmiseks vabasta kang (B). Reguleeri kaldenurk ja keera kang uuesti kinni.

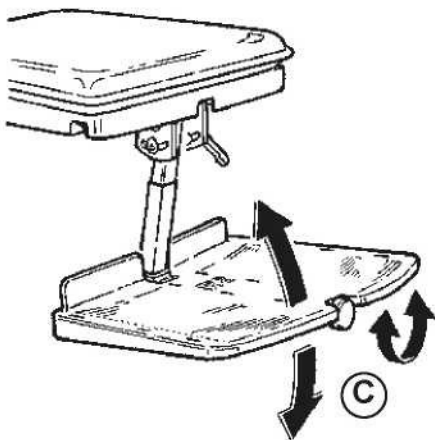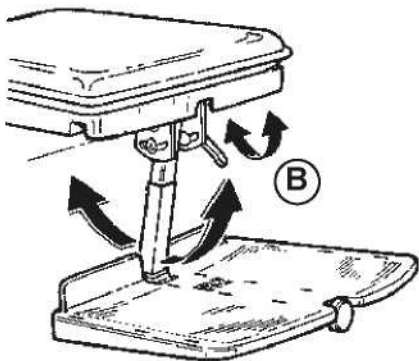

ABISTAJA KÄEPIDEMED

Kinnita käepidemed istme taha ja kalluta vastavalt vajadusele üles- või allapoole.

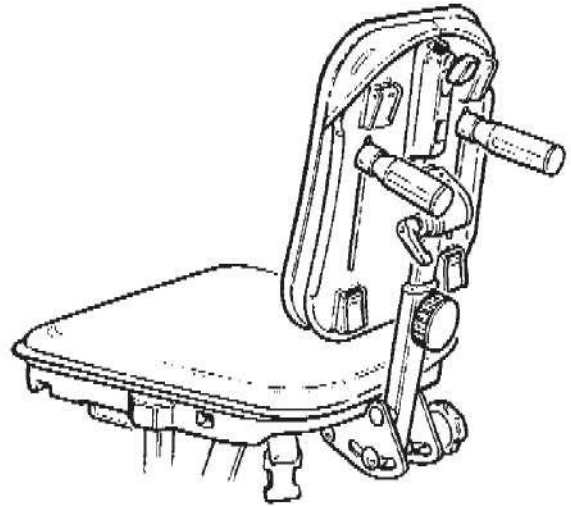


VESTID JA VÖÖD


Wombati on võimalik komplekteerida erinevate vestide ja vöödega.

Nende paigaldamise hõlbustamiseks on istme all kaks 40mm ja kaks 20mm lukku ning istme taga neli 25mm lukku.



Hoolitse selle eest, et kõik kinnitused ja reguleeringud oleksid teostatud korrektselt ning kontrolli neid regulaarselt.

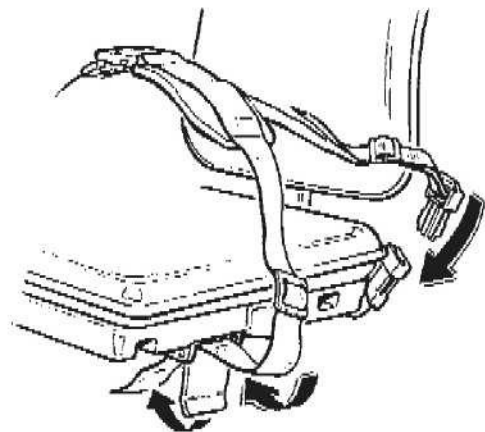

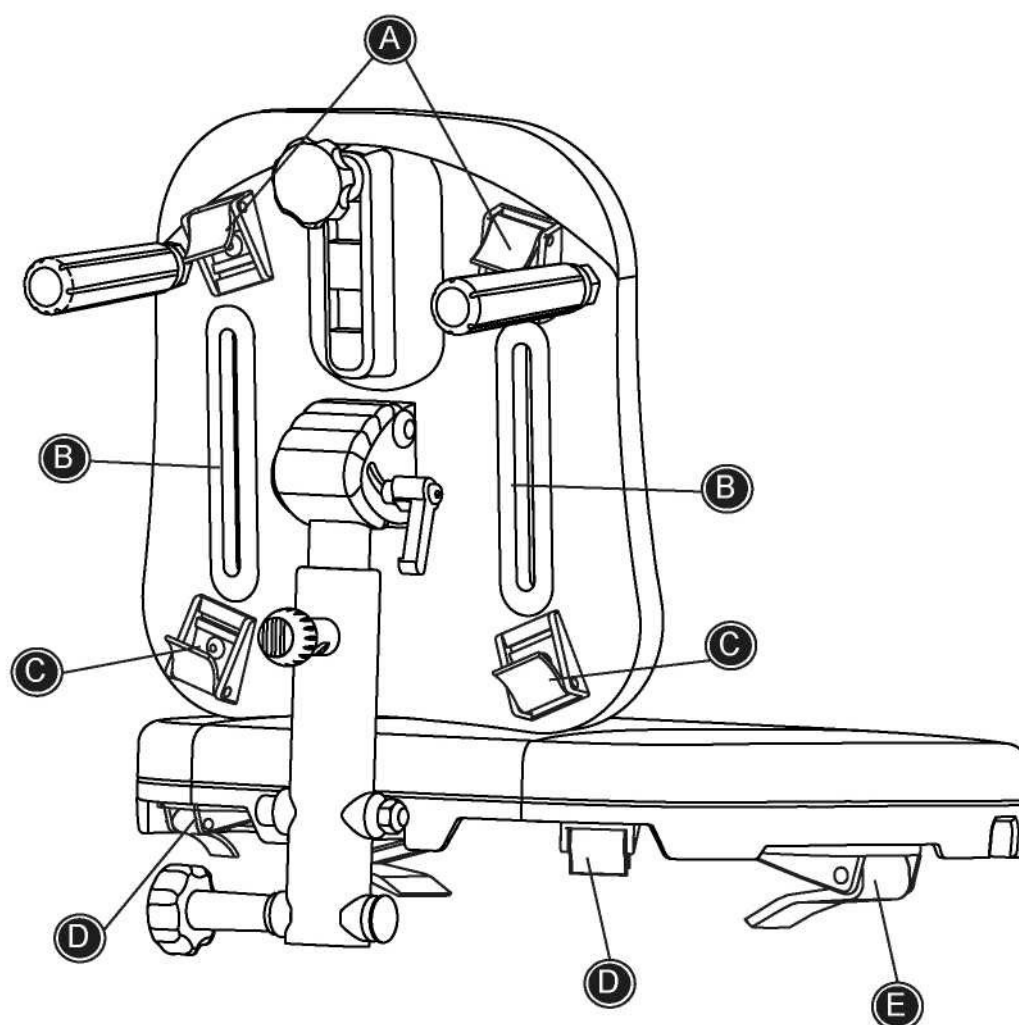


Kasuta seda joonist koos järgnevatel lehekülgedel olevate kirjeldustega.

VEST JA RISTVEST

Vesti ja ristvesti saab avada ja sulgeda lukkude ning tõmbliku abil.

Kasuta alljärgnevate juhiste lugemisel abiks joonist leheküljel 16.

- * Kinnita õlarihmad (A) seljatoe ülaseras olevatesse lukkudesse.
- * Pista ülemised külgrihmad (B) läbi seljatoe pilude ning kinnita fiksaatoritega.
- * Kinnita alumised külgrihmad (C) seljatoe alaseras olevatesse lukkudesse.

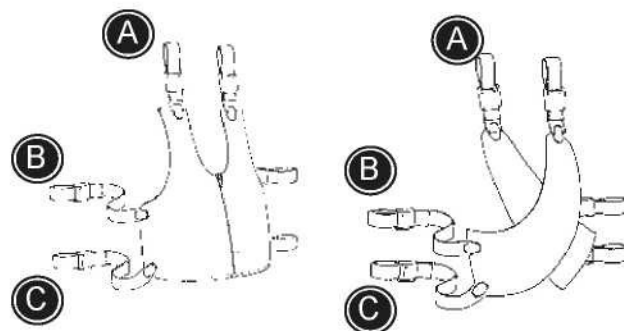


Hoolitse selle eest, et kõik kinnitused ja reguleeringud oleksid teostatud korrektelt ning kontrolli neid regulaarselt.

RINNAKUVÖÖ


Rinnakuvööd saab avada ja sulgeda lukkude abil.

Kasuta alljärgnevate juhiste lugemisel abiks joonist leheküljel 16.

- * Kinnita õlarihmad (A) seljatoe ülaseras olevatesse lukkudesse.
- * Pista ülemised külgrihmad (B) läbi seljatoe pilude ning kinnita fiksaatoritega.
- * Kinnita alumised külgrihmad (C) seljatoe alaseras olevatesse lukkudesse.

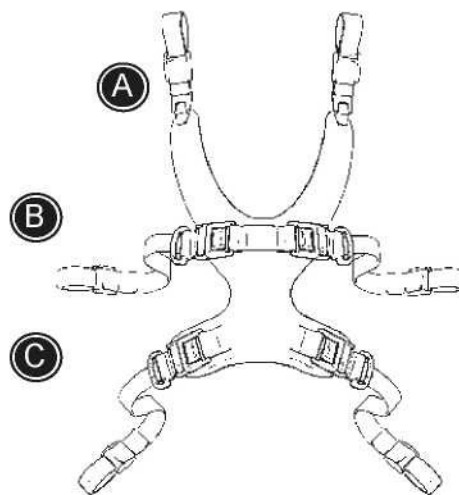

Hoolitse selle eest, et kõik kinnitused ja reguleeringud oleksid teostatud korrektelt ning kontrolli neid regulaarselt.

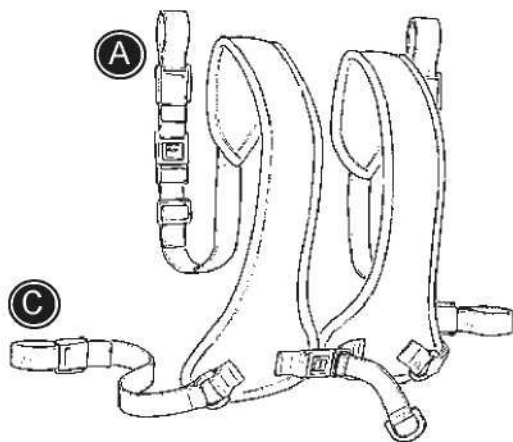

RINNAVÖÖ


Rinnavööd saab avada ja sulgeda lukkude abil.

Kasuta alljärgnevate juhiste lugemisel abiiks joonist leheküljel 16.

- * Kinnita õlarihmad (A) seljatoe ülaseras olevatesse lukkudesse.
- * Kinnita külgrihmad (B) istme taga olevatesse fiksaatoritesse.



Hoolitse selle eest, et kõik kinnitused ja reguleeringud oleksid teostatud korrektselt ning kontrolli neid regulaarselt.

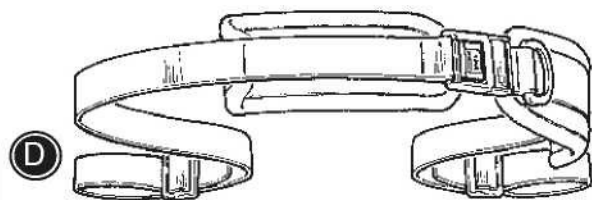

PUUSAVÖÖ

Puusavööd saab avada ja sulgeda lukkude abil.

Kasuta alljärgnevate juhiste lugemisel abiiks joonist leheküljel 16.

Kinnita rihmad (D) istme taga olevatesse fiksaatoritesse



Hoolitse selle eest, et kõik kinnitused ja reguleeringud oleksid teostatud korrektselt ning kontrolli neid regulaarselt.


Y-PUUSAVÖÖ

Y-puusavööd saab avada ja sulgeda lukkude abil.

Kasuta alljärgnevate juhiste lugemisel abiks joonist leheküljel 16.

- * Kinnita rihmad (D) istme all olevatesse lukkudesse (D)
- * Kinnita rihmad (E) istme all olevatesse lukkudesse (E).

E ja D võib ka omavahel vahetada.

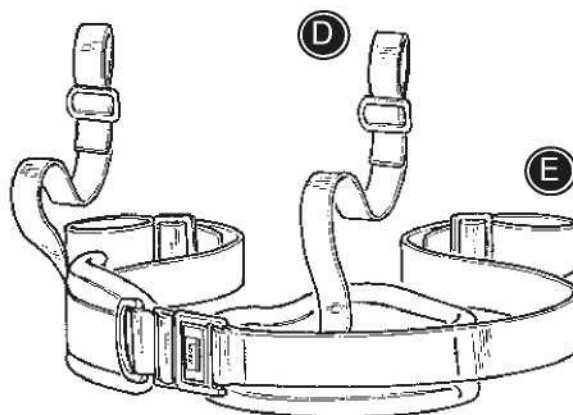


Hoolitse selle eest, et kõik kinnitused ja reguleeringud oleksid teostatud korrektselt ning kontrolli neid regulaarselt.


VAAGNATRAKSID

Kasuta alljärgnevate juhiste lugemisel abiks joonist leheküljel 16.

- * Ava lukud (G).
- * Kinnita rihmad (D) istme all olevatesse lukkudesse (D).
- * Aseta kasutaja traksidele ja sulge lukud (G) üle reite.

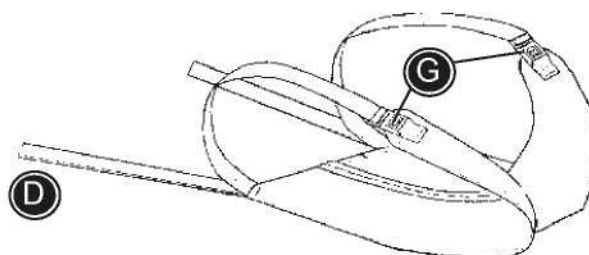

Hoolitse selle eest, et kõik kinnitused ja reguleeringud oleksid teostatud korrektselt ning kontrolli neid regulaarselt.

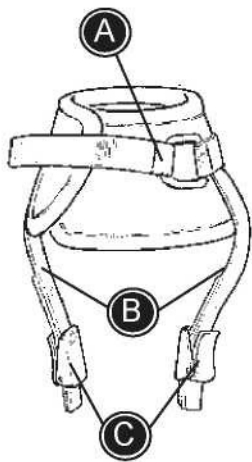

PAHKLUURIHMAD


Pahkluurihmu saab avada ja sulgeda takjapaeltega või lukkudega (A).

Paigaldamise juhend:

- * Eemalda lukud (C).
- * Tõmba rihmad (B) jalatoe plaadi piludest läbi.
- * Paigalda uuesti lukud (C) ja kindlusta, et rihmad välja ei libiseks.



Hoolitse selle eest, et kõik kinnitused ja reguleeringud oleksid teostatud korrektselt ning kontrolli neid regulaarselt.

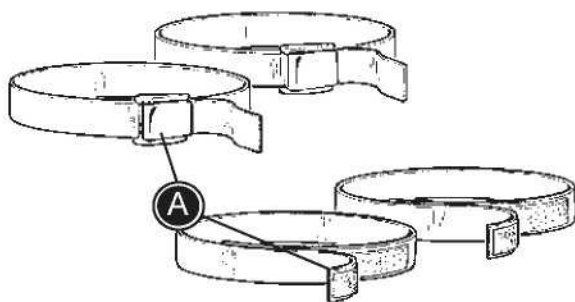

JALARIHMAD

Jalariihmu saab avada ja sulgeda takjapaeltega või lukkudega (A).

Paigaldamise juhend:

- * Ava rihmad (A) ja tõmba läbi jalatoe plaadis olevate pilude.
- * Sulge rihmad ümber kasutaja jalgade.



Hoolitse selle eest, et kõik kinnitused ja reguleeringud oleksid teostatud korrektselt ning kontrolli neid regulaarselt.

KÄERIHMA


Käerihmu saab avada ja sulgeda lukkude (A) abil.

Paigaldamise juhend:

- * Paigalda rihmad (A) ümber kasutaja randmete.
- * Pane rihm (B) ümber käetoe kronsteini.



Hoolitse selle eest, et kõik kinnitused ja reguleeringud oleksid teostatud korrektselt ning kontrolli neid regulaarselt.

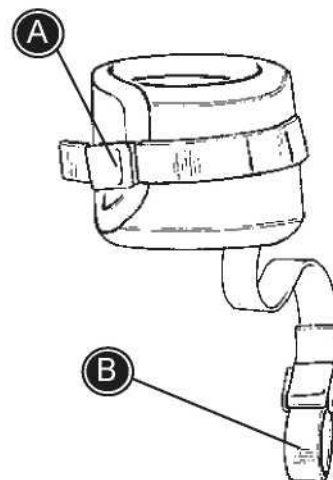

H-VÖÖ


H-vööd saab avada ja sulgeda luku abil.


Kasuta alljärgnevate juhiste lugemisel abiks joonist leheküljel 16.

- * Kinnita õlarihmad (A) seljatoe ülaseras olevatesse lukkudesse.
- * Kinnita külgrihmad (B) istme taga olevatesse fiksaatoritesse.



Hoolitse selle eest, et kõik kinnitused ja reguleeringud oleksid teostatud korrektselt ning kontrolli neid regulaarselt.

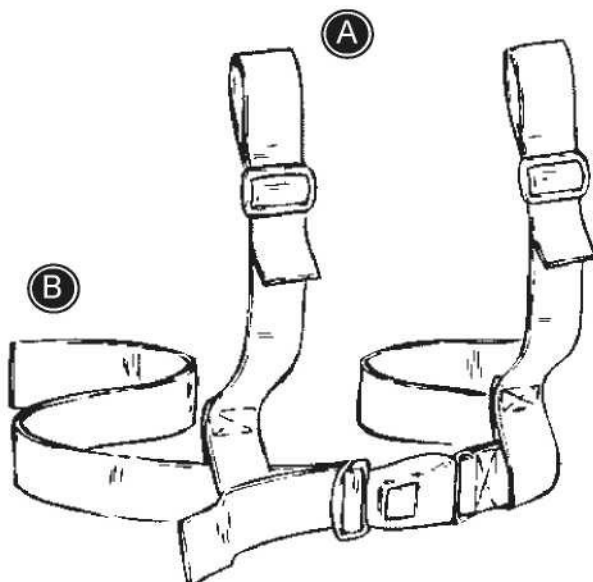

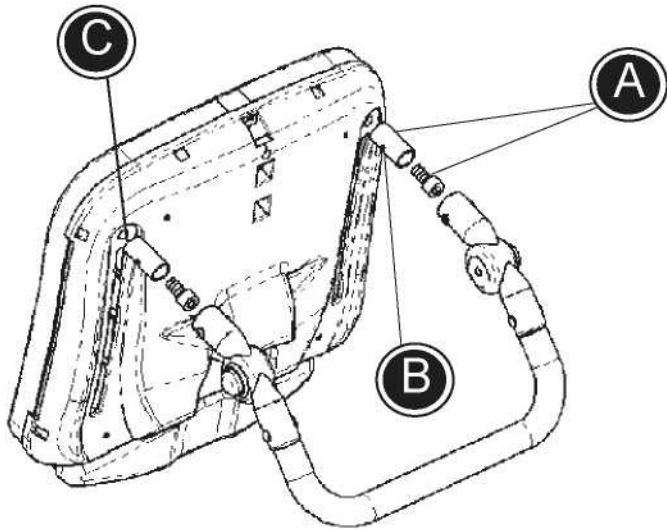


TÕUKEKÄEPIDE


Kinnita ümmargused puksid seljatoe külge suurte poltidega (A). Keera poldid kinni 8mm kuuskantvõtmega ning jälgi seejuures, et puksides olevad avad jääksid horisontaalselt. Kinnitamisel jälgi pukside suunda. Puksid peavad olema seljatoe küljes otse (C).

Aseta tõukekäepide kahele puksile.

Pista väikesed poldid väljastpoolt läbi pukside ja tõukekäepideme avade. Keera poltidele mutrid ja pinguta 3mm kuuskantvõtmega.

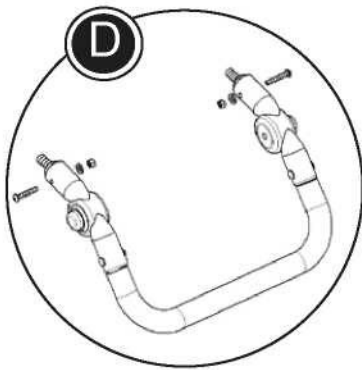

Ära kunagi kasuta tõukekäepidet eritooli tõstmiseks või trepist, äärekivist vms üles või alla tõmbamiseks. Eritooli võivad tõsta vaid kaks isikut samaaegselt raamist tõstes. Ära kunagi kasuta tõukekäepidet eritooli tõstmiseks.

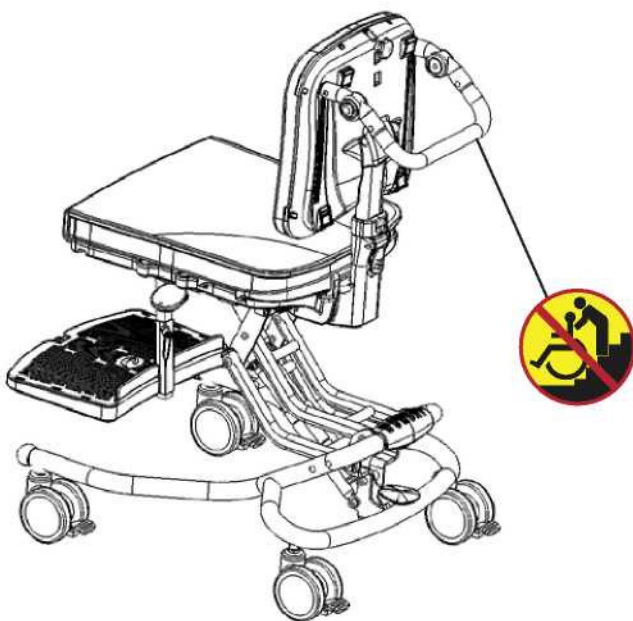

SELJATOEPADJA ISTEMUGAVUS




Wombat eritooli istemugavust on võimalik reguleerida takjapaela abil kinnitatavate kiiludega.

- 1) Ava katte (A) ülemine ja külgmised kinnitused ning pööra kate osaliselt või täielikult pahempidi.
- 2) Võta lahti esiplaat (B) ja rulli alla.
- 3) Nimmetuge (C) ja kiilusid (D) on võimalik reguleerida ning vajadusel eemaldada.
- 4) Katte paigaldamine:


Väga oluline on eemaldatud kate õigesti tagasi panna.

Pane padi kummuli maha ja pööra kate pahempidi.

Alusta katte paigaldamist alumise serva takjapaelast (E). Seejärel tõmba kate ümber padja ja kinnita külgedelt ja ülaservast.

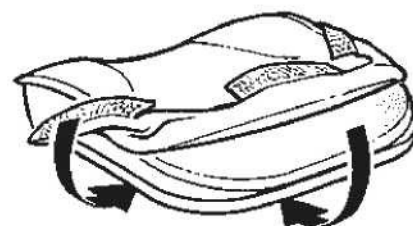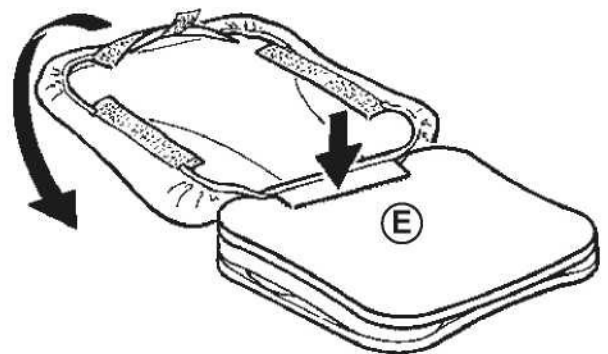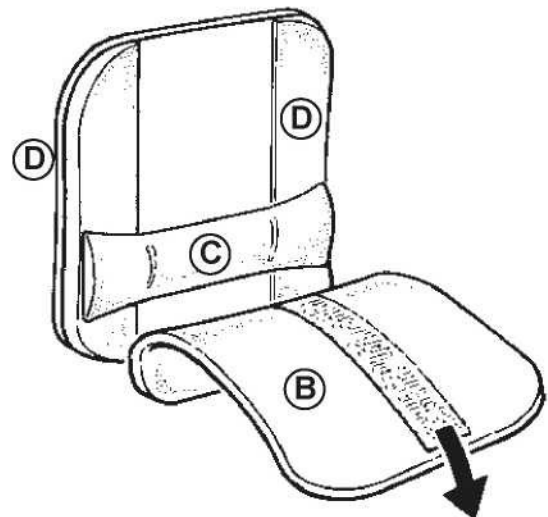


ISTMEPADJA ISTEMUGAVUS

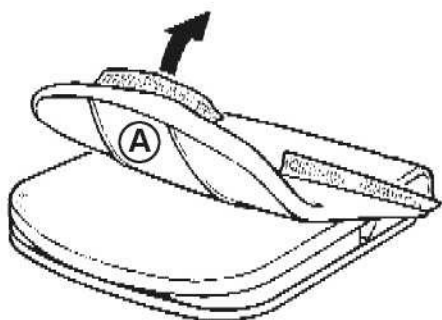

Wombat eritooli istemugavust on võimalik reguleerida takjapaela abil kinnitatavate kiiludega.

1) Ava katte (A) eesmine ja külgmised kinnitused ning pööra kate osaliselt või täielikult pahempidi.

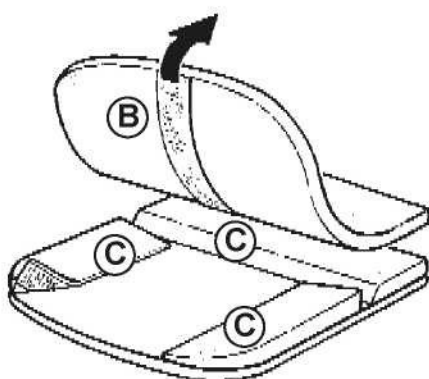

2) Võta lahti pealisplaat (B) ja rulli istmelt ära.



3) Kiilusid (C) on võimalik reguleerida ning vajadusel eemaldada.

4) Katte paigaldamine:

Väga oluline on eemaldatud kate õigesti tagasi panna.

Pane padi kummuli maha ja pööra kate pahempidi.

Alusta katte paigaldamist tagumise serva takjapaelast (D). Seejärel tõmba kate ümber padja ja kinnita külgedelt ja esiservast.

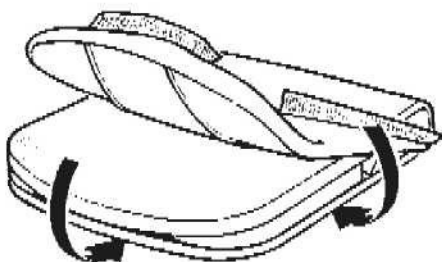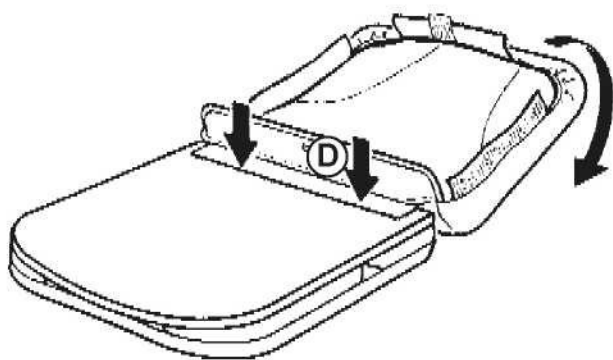

TOOTE TÄHISED

A) Järjekorranumber


WOMBAT basic:

Silt asub raami siseküljel vasaku tagaratta kohal.

WOMBAT upgrade:

Silt asub raami siseküljel vasaku tagaratta kohal.

Wombat Basic

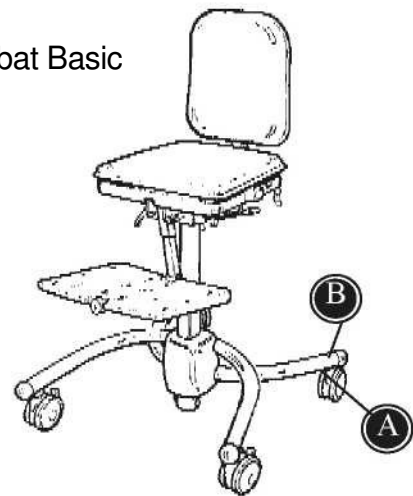

B) Tootja andmed

WOMBAT basic:

Silt asub raamil vasaku tagaratta kohal.

WOMBAT upgrade:

Silt asub raamil vasaku tagaratta kohal.

WOMBAT Upgrade




Dato: 31-01-02 Belast: kg
SN: 0840-01-111878-001
Varent: 880003




R82[®]  
Parallelsvej 3
DK-8751 Gedved

Wombat Basic

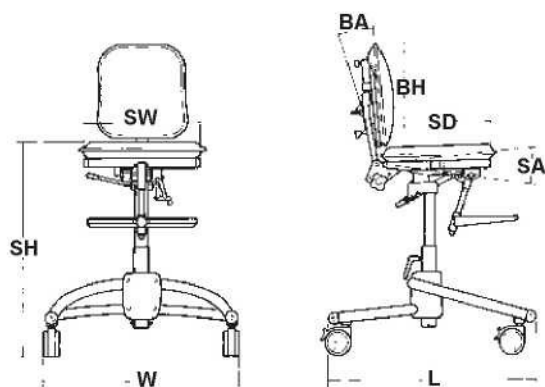

WOMBAT Upgrade

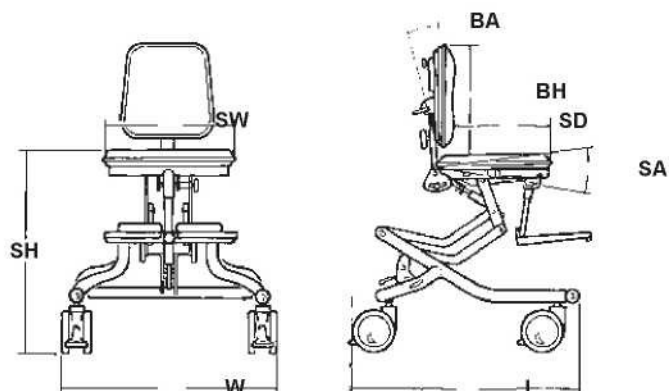

MÕÕTMED

	Wombat basic	Wombat basic	Wombat upgrade	Wombat upgrade	Wombat upgrade
	Suurus1	Suurus 2	Suurus1	Suurus 2	Suurus 3
	cm	cm	cm	cm	cm
Istme sügavus (SD)	16-29	23-36	16-29	23-36	30-48
Istme laius (SW)	21-30	28-37	21-30	28-37	35-44
Seljatoe kõrgus (BH)	28-34	31-38	28-34	31-38	39-50
Seljatoe kalle (BA)	40°	40°	40°	40°	43°
Istme kalle (SA)	-20° kuni +15°	-20° kuni +15°	-20° kuni +15°	-20° kuni +15°	-22° kuni +10°
Raami pikkus (L)	61	61	61	61	66
Raami laius (W)	55	55	55	55	55
Istme kõrgus (SH)	46-66	46-66	34-69	34-69	38-68
Suurim koormus	45 kg	45 kg	45 kg	45 kg	70 kg
Mass	14,5 kg	14,5 kg	15,5 kg	15,5 kg	22 kg

MATERJALIDE ANDMED

Iste: ABS
Padjad: Tulekindel vahtplast
Katted: Tulekindel Trevira CS
Raam: Pulbervärvitud teras

TOOTJA

R82 A/S
Parallelsvej 3
8751 Gedved
Denmark

EDASIMÜÜJA



Leia oma edasimüüja aadressil www.r82.com

Hooldus

ISTMEKATTED

Istmekatted on valmistatud tulekindlast vahtplastist. Istmekatted on lihtsalt eemaldatavad ja masinas temperatuuril 30 °C pestavad. Tekstiilkatete värvi ja head välimust aitab hoida korrapärane tolmuimejaga puhastamine ning harjamine.

RATTAD

Wombati rattaid peaks korrapäraselt märja lapiga puhastama. Eriti määrdunud rattaid võib puhastada puhastusvahendiga.

KESKPIDUR

Keskpiduri trosse tuleb vajaduse korral pingutada. Kontrolli pidurite töötamist vähemalt üks kord kuus.

RAAM

Pinguta regulaarselt eritooli istme all olevaid kruvisid. Eritool tuleb hoida puhas, et sul endal oleks mugav ning, et tagada eritooli pikk eluiga. Raami peaks korrapäraselt märja lapiga puhastama.



Ära kasuta kloori või denatureeritud piiritust sisaldavaid puhastusvahendeid.

ÜLEVAATUSED

Pinguta regulaarselt eritooli kinnituskruvisid. Kõiki kruvisid, mis hoiavad kinni tarvikuid, tuleb kontrollida vähemalt üks kord kuus. Oluline on kohe alguses avastada, kui metallist või PVC-plastist detailidel hakkavad tekkima vigastused.

REMONT

Kui leiad eritoolil vigastusi, võta kohe ühendust oma edasimüüjaga. Vigastatud eritooli ei tohi kasutada. Eritooli taastamisel või remondil võib kasutada ainult R82 originaalvaruosi. Vigastatud tarvikuid või osasid võib saata remondiks firmasse R82. Kui põhiosad on vigastatud, siis tuleb firmasse R82 saata remondiks kogu eritool. R82 ei vastuta õnnetuste või vigastuste eest, mille on põhjustanud mitteoriginaalvaruosade kasutamine või R82 volitusteta isiku poolt läbi viidud remont.



Gaasvedru ei vaja hooldust.

Ära kuumuta, survesta ega augusta gaasvedrut.



Akukarp.

Akukarp võib olla keskkonnale ohtlik, seetõttu tuleb vana akukarp anda ohtlike jäätmete koogumispunkti.

PLEKKIDE EEMALDAMINE

VERI

Loputa vereplekk ära külma veega. Kui see ei aita, lisa neutraalset köögis kasutatavat puhastusvahendit.

TINT

Eemalda võimalikult palju tinti kuivatuspaberiga. Puhasta 20% denatureeritud piiritusega ja pese veega millele on lisatud neutraalset köögis kasutatavat puhastusvahendit.

ŠOKOLAAD JA KOMPVEKID

Tupsuta leige veega.

ROHI JA TAIMED

Tupsuta leige veega, millele võid lisada neutraalset köögis kasutatavat puhastusvahendit.

KOHV, TEE JA PIIM

Eemalda võimalikult palju kuivatuspaberiga. Tupsuta veega, millele on lisatud neutraalset köögis kasutatavat puhastusvahendit.

PASTAPLIATS JA KOSMEETIKA

Puhasta alkoholiga.

KÜÜNELAKK

Tupsuta küünelakieemaldajaga. Kui see ei aita, kasuta atsetooni.

ÕLID JA MÄÄRDED

Kõigepealt raputa plekile talki ja jäta seisma. Seejärel harja puhtaks. Lõpuks tupsuta ettevaatlikult lapiga, mis on niisutatud benseenis või alkoholis.

KINGAKREEM

Tupsuta ettevaatlikult lapiga, mis on niisutatud benseenis või alkoholis.

MOOS, SIIRUP, PUUVILJAD, MAHL

Esmalt eemalda võimalikult palju lusikaga. Seejärel tupsuta leige veega.

VEIN JA KANGED ALKOHHOLSED JOOGID

Esmalt eemalda võimalikult palju kuivatuspaberiga. Tupsuta veega, millele on lisatud neutraalset köögis kasutatavat puhastusvahendit. Lõpuks loputa lahjendatud denatureeritud piiritusega.

ÕLIVÄRV

Esmalt puhasta tärpentiniga. Seejärel tupsuta veega, millele on lisatud neutraalset köögis kasutatavat puhastusvahendit. Kui plekk on vana, palu abi eksperdilt.

VEEPÕHINE VÄRV

Tupsuta külma veega, millele on lisatud neutraalset köögis kasutatavat puhastusvahendit. Kui plekk on vana, palu abi eksperdilt.