

Vanni ja duši istmed

Vanniistmed

Seljatoega rippvanniiste



Kaal – 3,5kg

Max kasutaja kaal – 100kg

Saadaval valge ja sinine.

Rippvanniiste



Kaal – 3kg

Max kasutaja kaal – 100kg


Seljatoega vanniiste



Kaal – 4kg


Max kasutaja kaal – 140kg

Vanniiste

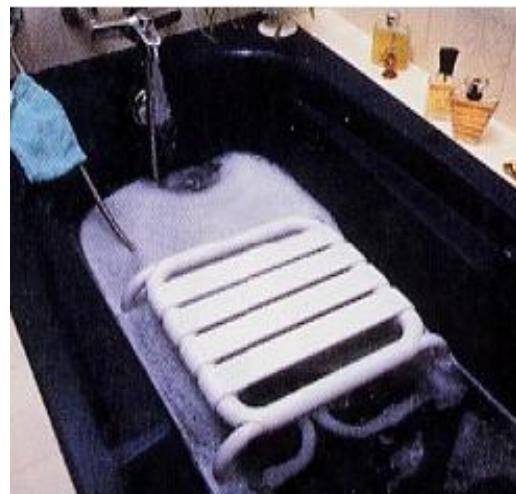

Kaal – 3,5kg

Max kasutaja kaal – 140kg

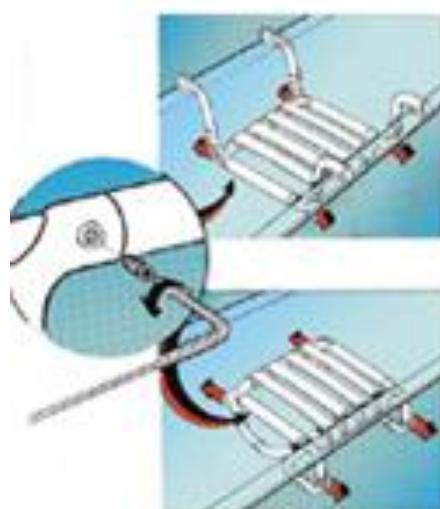

Dušitoolid

Eemaldatavad käetoed

Lukustushoob

Stabilisaator

Kaal – 10kg

Max kasutaja kaal – 100kg



Vanniistmele istudes olge tähelepanelik, et vältida naha näpistamise tunnet.

Vanniiste seljatoega



Dušitool ratasega

Probleemide vältimiseks peab dušiistet 540300 kasutama ohutuspõhjustel koos meditsiiniõe või kvalifitseeritud isikuga.

Kaal – 8,5kg

Max kasutaja kaal – 100kg

Kõrgus mast – 50cm

Klapitav dušiiste

Enne seinale kinnitamist kontrollige seina vastupidavust ja kasutage õigeid kruvisid ja tüubleid.

Kaal – 3kg

Max kasutaja kaal – 100kg

Hoidke neid juhiseid käepärast.

KASUTUSJUHEND

Kirjeldus: roostevastane eritöötlus, vanniiste 540200 kaetud epoksiidvärviga, epoksiidiga kaetud teras (mudelid 520611, 540100). Alumiinium + epoksiidvärv mudelitel 540350, 540300, 5201**, 5202**, 5203**, 5204**, 5205** koos plastist istmega, klambrite ja otsakutega vanni kaitsmiseks. Kruvid on roostevabast terastest.

Mudelil 540300 on neli veekindlat ratast (kahe piduriga). Profilo (530000) on valmistatud plastist.

Paigaldamine ja turvalisus: enne kasutamist kontrollige vanni mõõte ja istmete stabiilsust. Dušiiste 540300 ei ole ratastool. Palun piirake selle kasutamist lühikesete vahemaadega ja aeglase liikumisega. Istme kasutamisel ei tohi kasutaja olla üksi, vaid tal peab olema kaaslane. Ettevaatust! Pesemise ajal peab patsient jäääma istuma istme tagaosale. Iste 540200: istme pööramiseks avage ohutusmehhanism. Seejärel paigutage patsient istmele ja kui ta on vannis, lukustage ohutusmehhanism. Istmed 5201** 5202** 5203** 5204** 5205**: kasutage pärast istme reguleerimist võtit ja kruvisid käetugede lukustamiseks. Kasutage ainult tavalises vannis.

Maksimaalne kehakaal: 100 kg. Puhastamine: puhastada mitteabrasiiivse puhastuspastaga ja kuivatada puhta lapiga. Pretensioonide esitamise aeg: 2 aastat