


Clean

Käsiraamat



Sisukord


Tootekirjeldus	3
Kasutamine ja käsitsemine	3-4
Lisavarustus, WC	4-5
Lisavarustus, turvalisus	5
Lisavarustus, muu	5
Hoodus ja turvalisus	5
Sümbolid	6

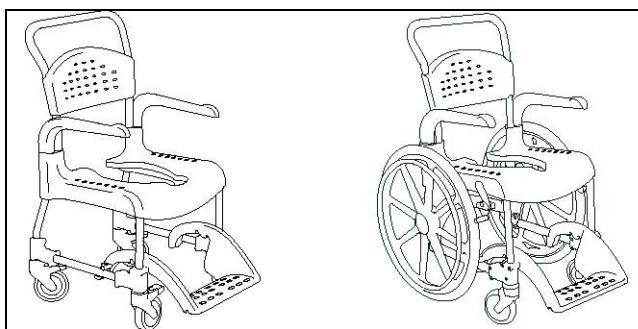

Clean


Clean on dušši- ja potitool, mis kergendab piiratud liikumisvõimega inimeste ja nende hooldajate jaoks hügieeni hoidmist. See on mõeldud kasutamiseks dušši all, kraanikausi juures või WC-s ning sanitaarruumides.

Clean on mõeldud kasutamiseks kuni 130 kg raskustele inimestele.

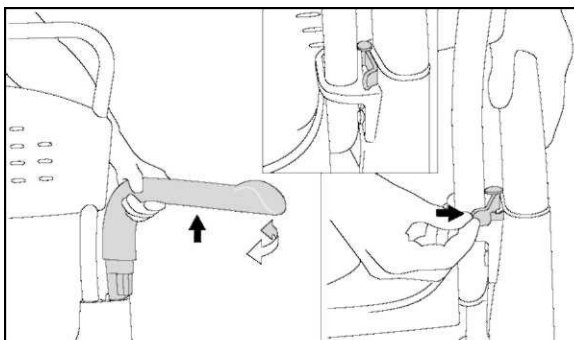


Käetoed

Käetoed on liigutatavad ja äravõetavad. Käetoed on lukustatavad.

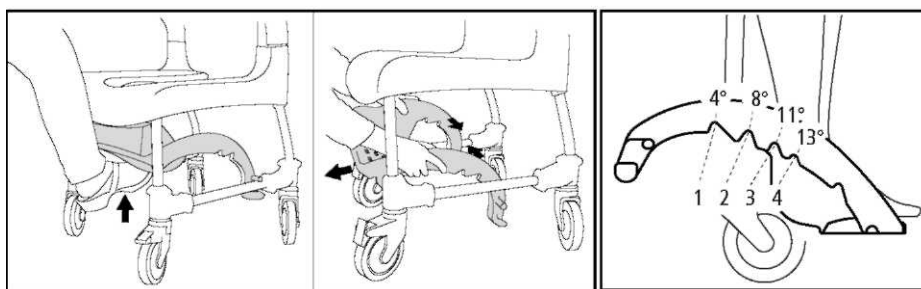

Jalatoed

Jalatuge on hooldajal lihtne jalaga sisse lükata. Jalatugi on äravõetav. Jalatoel on 4 erinevat kallet ja kõrgust.

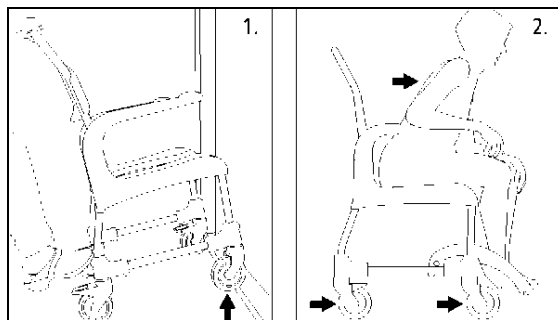


1. Ukseläve ületamine


Ainult tool: pange jalg rattakinnitusele. Koos kasutajaga: sõida selg ees.

2. Paigalseisimine

Pöörake tool nii, et rattad oleksid otse ette suunatud.

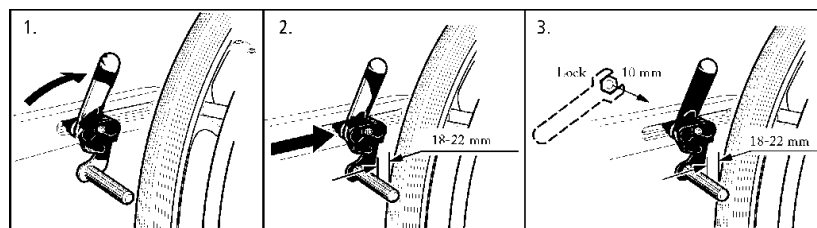


Piduri seadistamine

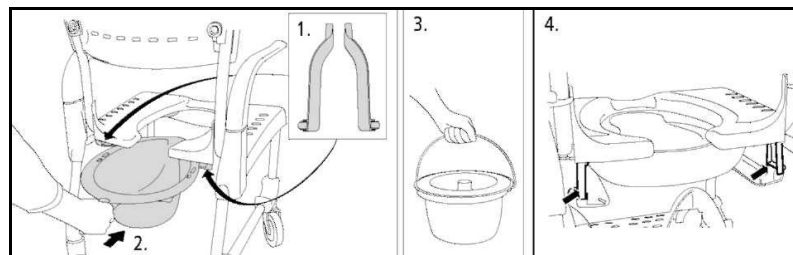


Lisavarustus

1. Siibrihoidja
2. Siiber lukatakse tagant sisse.
3. Ämbriangade kinnitamiseks on vaja kinniteid.
4. Lisavarustus madalaks montaažiks.

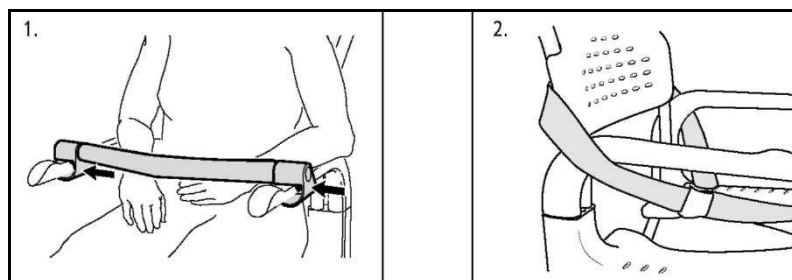

Lisavarustus

1. Turvalatt kinnitatakse käetugede külge.
2. Turvavöö kinnitatakse seljatoe taha ja tõmmatakse käetugede alt läbi.

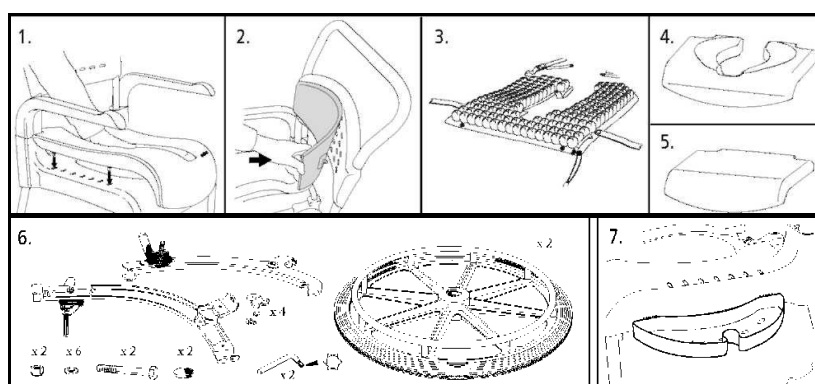

Lisavarustus

1. Istmepehmendus kinnitatakse istme külge.
2. Seljapehmendus kinnitatakse seljatoe külge.
3. Kaitsepadi „Protect”
4. Mugavuspadi asetatakse istme peale.
5. Istmekate
6. Veoratta kinnitus.
7. Seebialus

Hooldus ja turvalisus

Toote eluiga


10 aastat (k.a. istme-/seljapehmendus) tingimusel, et Cleani puhastatakse ja hooldatakse korralikult.

Hooldus:

Hoidmaks tooli heas ja turvalises töokorras peate regulaarselt tegema järgmist:


- Puhastama tooli tavalise, mitteabrasiivse puhastusvahendiga. Loputage ja kuivatage.
- Puhastage rattad juustest ja seebijäänustest jne.

Kui teie dušši- ja potitool ei ole ideaalses töokorras, võtke ühendust oma edasimüüjaga. Defektset tooli ei tohi kasutada.

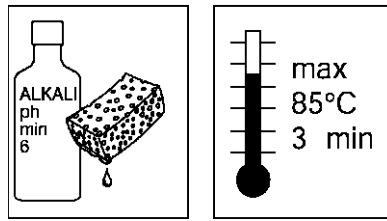

Sümbolid

1. Puhasta tooli tavalise, mitteabasiivse puhastusvahendiga. Loputa ja kuivata.
2. Toodet võib puhastada 85°C juures 3 minutit.

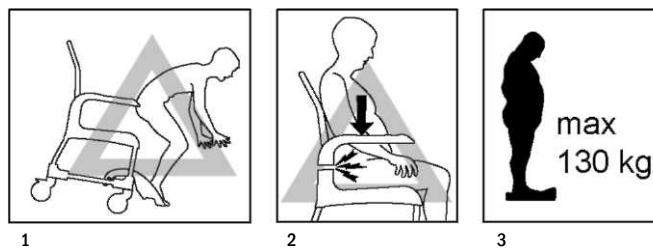

Sümbolid

1. Ärge seiske jalatoel, kuna tool võib ümber minna!
2. Ettevaatust! Ratastooli käetugede liitekohtadesse võib kinni jääda!
3. Kasutaja maksimaalkaal: 130 kg.

Etac (export)

P.O BOX 203, SE-334 24 Anderstorp, Sweden

TELEPHONE CUSTOMER SERVICE + 46-371-58 73 30 FAX CUSTOMER SERVICE + 46-371-58 73 90

E-MAIL info@etac.se HOMEPAGE www.etac.com

Etac AB

BOX 203, 334 24 Anderstorp, Sweden

TELEFON KUNDSERVICE 0371-58 73 00 FAX KUNDSERVICE 0371-58 73 90

E-MAIL info@etac.se HEMSIDA www.etac.se

Etac AS

PB 249, 1501 Moss, Norge

TEL 69 27 59 80 FAX 69 27 09 11

E-MAIL hovedkontor@etac.no HEMSIDA www.etac.no

Etac A/S

Parallelvej 1, 8751 Gedved, Danmark

TEL 79 68 58 33 FAX 75 68 58 40

E-MAIL info@etac.dk HEMSIDA www.etac.dk

Etac GMBH

Bahnhofstraße 131, 45770 Marl, Deutschland

TEL 236 598 710 FAX 236 598 6115

E-MAIL info@etac.de HEMSIDA www.etac.de