

## Kasutusjuhised

Toode on ette nähtud kasutamiseks kipsi või sidet vee eest kaitsva abivahendina duši või vanni võtmise ajal.

1. Enne kasutamist lihvide maha kõik kipsi teravad servad, mis võivad kipsikaitsme läbi torgata.
2. Hoidke kindlalt plastrõngast ja tõmmake kaitse kipsile või sidemele.
3. Veenduge, et kipsikaitse kataks kipsi või sideme üleni. Veenduge, et kaitse oleks tihedalt kipsi või sideme serva vastas, moodustades vee eest kaitsva tihendi.
4. ENNE EEMALDAMIST kuivatage kindlasti kipsikaitsme membraan.
5. Eemaldamisel võtke kinni plastrõngast ja mitte vinüülist (PVC) kotist, sest see võib toodet kahjustada.

Kipsikaitse Dyna-Seal on mõeldud kasutamiseks ühel patsiendil.

## HOIATUS!

- Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks vaba aja veetmise ega ujuvvahendina.
- Plastrõngale ei tohi panna suuri raskusi. ÄRGE kunagi nõjatuge rõngale.
- Märg kipsikaitse võib muutuda libedaks, samuti võib teie ümbrus duši või vanni võtmise ajal libedaks muutuda. Märjas ja libedas keskkonnas pesemisel olge äärmiselt ettevaatlik.
- Veenduge, et membraan ei oleks teie jäsme ümber liiga tihedalt, sest see võib häirida vereringet. Kui membraan põhjustab turset või ebamugavust, pidage nõu arstiga.

### TÄISKASVANU

#### SUURUSED

60780	Käelaba (12")
60781	Lühike käsi (22")
60783	Pikk käsi (39")
60784	Jalalaba/hüppeliiges (11")
60785	Lühike jalg (23")
60786	Pikk jalg (42")

### LAPSE SUURUSED

60787	Keskmine käsi (18")
60788	Suur käsi (22")
60789	Keskmine jalg (18")
60790	Suur jalg (31")

Märkus. Kipsikaitsme õige pikkuse määramiseks mõõtke pikkust sõrmeotsast või kannast kipsi või lahase ülaosani ja liitke 1".

Volitatud esindaja Euroopas: Medica Surgical Innovations Limited BB2 4PB, Inglismaa