

Paigaldage seljatoe torud vedrunuppude abil tooliosa taha. Veenduge, et vedrunupud oleksid kindlalt avades.

Lükake tualettpott potihoidikusse. Lükake tualettpott eestpoolt sisse. Enne istumist veenduge, et tualettpott oleks õiges asendis.

Reguleerige istme kõrgust jalgadel olevate vedrunuppude abil. Veenduge, et vedrunupud oleksid kindlalt avades. Enne kasutamist veenduge, et kõik neli jalga oleksid seatud samale kõrgusele. Käetoed saab eemale klappida. Käetugede allalaskmiseks vajutage küljenuppe. Olge sõrmedega ettevaatlik.


Tõmmake käetuge jälle ülespoole. Kui käetugi lukustub kindlalt paika, kuulete klõpsatust.

Küsige abi, kui te pole kindel, kuidas toodet kasutada.

⚠ Kasutaja kehakaal: 130 kg

⚠ Potitooli Stacy võib puhastada tavapärase olmekasutuseks ette nähtud puhastusvahenditega. Ärge kasutage agressiivseid puhastusvahendeid, mis võivad tekitada värvimuutusi.

nupp käetugede
eemalepööramiseks

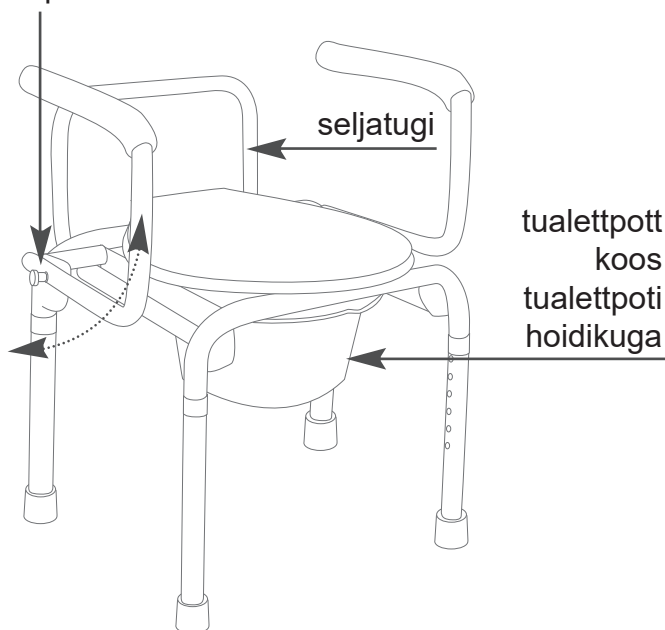

Mõõtmed

Laius: 57 cm

Pikkus: 53 cm

Kogukõrgus (kaas üleval): 80–95 cm

Istme kõrgus: 44–59 cm

Jalakõrguse reguleerimine: 15 cm

Istme laius: 45 cm

Istme sügavus: 45 cm

Käetugede kõrgus: 23 cm

Seljatoe kõrgus: 24 cm

Kogumass: 8,6 kg

Tootja

Vermeiren Group

Vermeirenplein 1 / 15 – B-2920 Kalmthout

Tel +32 (0) 3620 2020 – Faks +32 (0) 3666 4894

veebisait www.vermeiren.be – e-post info@vermeiren.be

Võimalikud on tehnilised muudatused. © 2016

VERMEIREN

Loome liikumiseks uued võimalused

