

# Kõndimisraam Kits EQUA-1400

Toote kasutusjuhend – versioon 02042025

CE





## Täname Teid, et valisite EQUA OÜ Kõndimisraami Kits EQUA-1400

### Firmast:

EQUA tootmisettevõte, kelle missiooniks on pakkuda ravi- ja hooldusasutustele parimaid lahendusi tööruumide sisustamisel ja töövahendite valikul.

### Toote kirjeldus

Sihtstarve: Kõndimisraam on mõeldud kasutamiseks siseruumides inimestele, kes vajavad kõndimisel ja liikumisel lisatuge. Abivahend aitab vähendada kukkumise ohtu ja pakub täiendavat stabiilsust kõndimisel ning toetust seljale.

**EQUA-1400 kõndimisraam** koosneb kahest põhiosast:

- **Alumine metallist toruraam ratastega:** tugev ja jäik konstruktsioon, millel on 100 mm läbimõõduga piduritega rattad ning käsikruvid ülemise raami kõrguse reguleerimiseks.
- **Käetugede raam:** metallkarkassiga, millel on pehme küünarnukitugi ning reguleeritavad käetoed kummist käepidemetega. Käetugede raami kõrgust saab muuta alumise raami küljes olevate käsikruvide abil.

Toote kasutuse ohutuse tagamiseks tutvuge enne kasutamist käesoleva kasutusjuhendiga.

### Toote õige ja ohutu kasutamisejuhised

- Enne toote kasutamist veendu, et käetugede toruraami kõrguse reguleerimise käsikruvid ja ka käepidemete käsikruvid on korralikult kinnitatud.
- Kui keerate kõrguse reguleerimise käsikruvid lahti, siis veenduge et toestate pealmise raami raskust käega et see ei kukuks järsult alla.
- Veenduge, et tootega ringi liikumisel on piisavalt ruumi ja et toote rataste või raami ees ei ole kõrvalisi esemeid või takistusi.
- Enne toote kasutamist (toote najale üles tõusmist) veenduge, et:
  - käetugede raam oleks reguleeritud sobivale kõrgusele;
  - kõik reguleerimiskruvid (nii käetugedel kui käepidemetel) on korralikult pingutatud;
  - kõik 4 ratast on piduritega lukustatud.
- Asetage kõndimisraam enda ette, nii et alusraami avanev osa jääb teie poole ja ülal asetsevad käetoed ettepoole. Alumise raami avanev osa võimaldab kõndimisraami ka lükata vajadusel ratastooli ette.
- Asetage ennast raami toetuspinna vahele, toetage küünarnukkidega pehmenustele, haarake kätega käetugedest ja tõuske võimalikult otse püsti.
- Tähelepanu püsti tõusmisel! Ärge kasutage raami enda püsti tõmbamise abivahendina. Kõndimisraam võib tugevalt tõmmates ümber kukkuda. Kui te vajate püsti tõusmiseks abi, paluge abistajal suruda jalaga alusraami esimesele osale, et te ei tõmbaks kõndimisraami endale peale, kui sellest liiga kõvasti tõusmisel tuge otsite.
- Peale püsti tõusmist ärge kohe liikuma hakake ja veenduge, et seisate kindlalt ja et pea ei käiks ringi.
- Enne pidurite vabastamist veenduge tasakaalu olemasolus ja te seisate kindlalt. Vajadusel laske abistajal end toetada.
  - NB! Pikalt lamades või istudes võib järsku püsti tõustes pea ringi käia.
- Veenduge, et pidurid on maha võetud KÕIKIDELT ratastelt.
- Pidurite vabastamisel liigub raam vabalt kõikides suundades – olge ettevaatlik, et te raami liikuma hakates tasakaalu ei kaotaks.
- Kõndimisraam võib ka ettepoole ümber kukkuda kui selle ette jääb mingi takistus (nt. kõrge lävepakk) ja seda siis edaspidi tugevalt lükata.
- Pidage meeles, et kõndimisraam on pelgalt kõndimise toetamiseks ja mitte inimese püsti hoidmiseks

**Märkused:** Kukkumise ohu vältimiseks toimige alljärgnevalt:

- Kasutage kõndimisraami ainult siis kui vajate kõndimiseks vaid vähest tuge ja suudate iseseisvalt püsti tõusta, tasakaalu hoida, kõndida ja ka tagasi istuma minna. Kõndimisraam on mõeldud vaid kõndimise abistamiseks.
- Kõndimisraami esmakordsel kasutamisel ja kui te pole kindlad, kas saate üksi hakkama tuleb kindlasti kaasata tegevusse, kas üks või isegi kaks abistajat.
- Vajadusel tuleb abistajat ka edaspidi kasutada.

- Ärge rakendage ülemisele toetusraamile või käepidemetele liiga suur külgsurvet, misjärel võib see ümber kukkuda.
- Kasutage abivahendit kõndimiseks ainult tubastes tingimustes ja siledal põrandal, kus ei ole ka vaipu või muid takistavaid esemeid.
- Kasutage abivahendit ainult ruumis, kus on piisavalt vaba ruumi.
- Kõndimise raami polster pole veekindel, seega ei tohiks sellega minna dushi alla või muudesse niiskettesse oludesse nt välja vihma kätte.
- Ärge kasutage toodet kui sellel on silmaga nähtavaid mõrasid, värvikahjustusi või muid vigastusi või see on paindunud.
- Ärge riputage käetugede külge kotti või muud raskust, see suurendab kõndimisraami ümberminemise ohtu.

**Hoidke antud kasutusjuhendit alati kättesaadavas kohas.**

### **Toote kokkupanek**

Kõndimisraam EQUA-1400 tarnitakse komplektselt, seega ei vaja see kohapeal monteerimist. Toode on pärast pakendi eemaldamist ja ülemise raami õigele kõrgusele reguleerimist kasutamiseks valmis.

### **Põhihooldus ja puhastamine**

EQUA-1400 tööseisundi ja välimuse säilitamiseks järgige alljärgnevat hooldusmeetodeid.

1. Ärge kasutage toote puhastamiseks benseeni, vedeldeid või muid lahusteid.
2. Tolmu eemaldamiseks kasutage tolmuimejat või pehmet lappi
3. Toote metallraami tugevama määrdumise korral kasutage puhastamiseks meditsiinis kasutatavaid puhastusaineid.
4. Pealmist pehmet polstrit on lubatud puhastada ainult pehme harja, paberi või kergel niiske lapiga.
5. Toote sisekomponendid on spetsiaalse konstruktsiooniga ning ei vaja määrimist ja hooldamist.
6. Ärge pange toote toruavaustesse võõrkehi.
7. Ärge paigutage toodet soojusallika või avatud leegi lähedale.
8. Ärge riputage toote külge või paigutage toote peale teisi tooteid (nt käekott, toidunõud jne)

Soovitav toote hooldustsükkel on 12 kuud. Hoolduse teostuseks võtta ühendust edasimüüja või tootjaga.

### **Polstri puhastamine ja hoiatused**

- Polstrite puhastamiseks kasuta niisket mikrokiud lappi. Vajadusel kasutada puhastusvahendit, mis on neutraalne või kergelt aluseline (pH 7-9).
- Pritsi vesi või pesulahus lapile ja pühi polstri pind puhtaks. Tugevamate plekkide eemaldamiseks pritsi pesulahus otse plekile, lase 5 minutit ainel mõjuda ja pühi lapiga pind kuivaks.
- Ärge kasutage märga puhastusmeetodit, polstrite õmblused ei ole veekindlad ja märg puhastus võib tekitada pöördumatuid kahjustusi.
- Polstrite puhastamisel ja desinfitseerimisel ei tohi kasutada alkoholil baseeruvaid või abrasiivseid tooteid (kare nuustik, hõõrumisplaat, karukeel), see võib kahjustada polstri pindasid. Kindlasti ei tohi polstri hooldamiseks kasutada silikooni sisaldavat hooldusvahendit.
- Polstri katematerjaliks on kunstnahk, mis võib pikaajalise UV kiirguse toimel muuta oma elastsust ja värvitooni. Kaitske polstrit ka higi eest.

### **Piirangud**

- Kvaliteedigarantii kehtib ainult kindlas turustuspiirkonnas, kvaliteedigarantii ei kehti juhusliku kahjustuse korral väljaspool EQUA poolt kontrollitavat piirkonda.
- Kõik kvaliteedigarantiiga seotud teenused peavad olema heakskiidetud EQUA OÜ poolt.
- Kvaliteedigarantii ei laiene dekoratiivsetele osadele, milleks on polster, plastkatted, jne.
- EQUA OÜ ei vastuta inimtegevusest tingitud kahjude, ebamugavuse või kahjumi eest sh kukkumisest tekkinud kahjud.
- Kvaliteedigarantii ei kehti liisingu korral ja seadme sihtotstarbe välisel kasutamisel

Eraldi kvaliteedigarantii perioodi kohaldatakse ainult kasutatud toodetele, kaasa arvatud mõned laiendatud standardid. Kõik hooldustööd tuleb dokumenteerida.

### **Funktsioonide kirjeldused**

Kõndimisraami kõrguse ja käetugede reguleerimine ning rataste pidurite peale panek:



Toote minimaalne kõrgus (maapinnast polstri peale) – 900 mm

Kõrguse reguleerimiseks tuleb lahti keerata mõlemal pool asetsevad käsikruvid.




Toote maksimaalne kõrgus (maapinnast polstri peale) – 1450 mm

Kõrguse reguleerimiseks tuleb lahti keerata mõlemal pool asetsevad käsikruvid.



Käetugede reguleerimiseks tuleb lahti keerata mõlemal pool asetsevad käsikruvid.

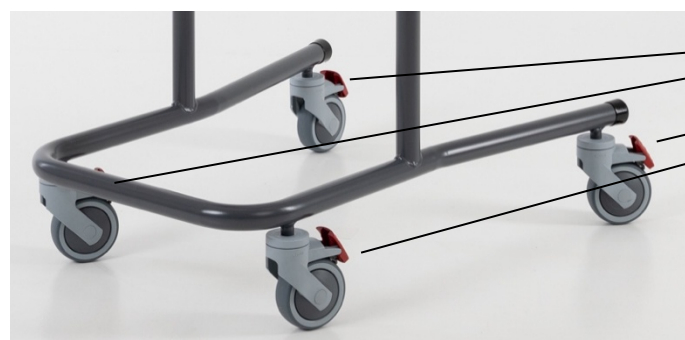

Ratastel pidurite rakendamiseks tuleb vajutada punasele plastik lingile (kas jala või käega). Pidurite mahavõtmiseks tuleb vajutada sama lingi teisele poole.

### **Peamised probleemid ja lahendused**

Probleemi kirjeldus	Põhjus	Lahendus
Kõndimisraam ei liigu kohalt.	Rataste ees on takistus	Eemaldage takistus
	Ratastel on pidurid peal.	Võtke ratastelt pidurid maha punasest jalapedaalist ratta peal.

Kõndimisraam liigub, kuid „kisub“ ühele poole.	Ühel või mitmel rattal on pidur maha võtmata.	Võtke ratastelt pidurid maha punasest jalapedaalist ratta peal.
Pealmine toetusraam vajub toestamisel allapoole.	Kõrguse reguleerimise käsikruvid pole piisavalt kinni keeratud.	Keerake käsikruvid tugevamini kinni.
Käepidemed ei püsi paigal ja liiguvad	Käepidemete käsikruvid pole piisavalt kinni keeratud.	Keerake käsikruvid tugevamini kinni.
Küünarnukkidel on polstri peale vajutades valus, sest tunnete, et see on vastu kõva pinda.	Polstri poroloon on vananenud ja ära vajunud.	Võtke ühendust toote tootja või edasimüüjaga. Polster võib vajada vahetamist.

### **Utiliseerimine**

Utiliseeritakse vastavalt kasutuskoha riigi üldistele nõutele.

**Head kõndimisraami ohutut kasutamist!**

## Seadme märgistus

**EQUA**



**Kõndimisraam Kits**

**REF** EQUA-1400 Qty: 1 pc

**LOT** (DDMMYYYY)



EQUA OÜ  
Lembitu 8, 50406 Tartu, Estonia  
+372 740 9331, [www.equa.ee](http://www.equa.ee)

### Märgistusel oleva tähendus:

**EQUA** - brändi nimi / tootja logo



- meditsiiniseade



- Seadme ohutuks opereerimiseks tutvu kasutusjuhendiga



- Tootja katalooginumber, et seadet oleks võimalik identifitseerida

**EQUA-1400** - tootenimi/seadme mudeli nimi

**Qty: 1pc**

- kogus (1pc tähendab 1 seadet)

**LOT**

- DDMMYYYY-XX (päev, kuu, aasta ja tootmise järjekorra number).



- CE märkis, mis täheistab, et seade on kooskõlas kehtivate nõutega (EL määrus 2017/745)



- Tootja

Kõndimisraami EQUA-1400 valmistaja on:

OÜ EQUA

Lembitu 8, Tartu 50406, Eesti

[www.equa.ee](http://www.equa.ee)

[info@equa.ee](mailto:info@equa.ee)