

Tehnilised andmed

Materjal:	raam alumiiniumist, plaat plastist	Istme reguleerimine:	vannidele välismõõtmega 73–81 cm
Värvus:	alumiinium/valge	Maksimaalne kandevõime:	120 kg
Istme mõõtmed:	ligikaudu 37 × 23 cm	Keskmine kasutusiga:	ligikaudu 5 aastat

Garantii

Seadusest tulenevate garantiinõuete kohaselt. Garantii ei hõlma defekte, mis tulenevad loomulikust kulumisest, tahtlikust tegutsemisest, hooletust või valest käsitsemisest või kasutamisest, ning defekte, mis mõjutavad toote väärtust või kasutatavust ainult vähesel määral.

Me jätame endale õiguse teha muudatusi, mille eesmärgiks on tehnilised täiustused.

Soovitus

Vanniistet tohivad muuta või parandada ainult väljaõppinud töötajad, kes kasutavad originaalvaruosi.

► Kasutusjuhend

Vanniiste

Toote number 11280



Sundo Homecare GmbH,
Bahnhofstraße 13, DE-30916 Isernhagen, www.sundo-homecare.de



Valentine International Ltd., 8th Floor, No. 149, Sec 2, Ta Tung Road,
221 Hsichih District, New Taipei City, Taiwan R.O.C.



Y. Sung Handelsvertretung, Duesselthaler Str. 24, DE-40211 Duesseldorf



sundo
HOMECARE



sundo
HOMECARE

Kasutusotstarve

Vanniiste on meditsiiniseade. See on piiratud liikumisvõimega inimestele täiuslik abivahend vanni istumiseks ja sealt väljumiseks. Seda tohivad kasutada ainult inimesed, kes on võimelised kasutama ülajäsemeid, soovi korral ka hooldaja kaasabil. Vanni sügavuse vähenemine kergendab istumist ja uuesti püsti tõusmist. See võimaldab teil istuda mugavalt vees või selle kohal. Vanniistme saab peaaegu kõigi standardvannide jaoks parajaks reguleerida.

Näidustus: seismisvõime kahjustustega inimestele.

Vastunäidustused

Vanniistet ei tohi kasutada isikud, kes ei suuda iseseisvalt oma tasakaalu kontrollida.

Enne esmakordset kasutamist

- ▶ Eemaldage sisu karbist. Enne kokkupanekut kontrollige kõiki osi transpordikahjustuste suhtes. Transpordikahjustuste esinemisel ÄRGE KASUTAGE. Pöörduge edasiste juhiste saamiseks edasimüüja/vedaja poole.

Tarnekomplekt

1 plaat, 2 küljeosa, 2 kesktoru

Kokkupanek

- ▶ Paigaldada ja kasutusse anda tohivad ainult asjakohase kvalifikatsiooniga ja väljaõpetatud töötajad.
- ▶ Kõigepealt asetage küljeosad kesktorude kohale. Hoidke ühe kesktoru surunuppu all, kuni kesktorud oma kohale haakuvad.
- ▶ Seejärel asetage plaat istmele ja vajutage seda, kuni plaat kõigis neljas nurgas kuuldavalt oma kohale klõpsatab.
- ▶ Nüüd saab vanniistme mõlemat surunuppu vajutades õigesse mõõtu reguleerida. Reguleerige seda nii, et küljeosad toetuksid võrdselt mõlemale vanniservale, et saavutada kindel ist.

Kasutamine

Enne igat kasutamist kontrollige istme kindlat kinnitumist. Istuge ettevaatlikult sirgelt istme keskele, vastasel juhul tekib **kaldumise ja libisemise oht**.

Puhastamine ja desinfitseerimine

- ▶ Ärge kasutage puhastamisel teravaid või abrasiivseid esemeid ega abrasiivseid puhastusvahendeid.
- ▶ Kõige parem on puhastada kõiki osi niiske lapiga ja kasutada õrnatoimelisi olmpuhastusvahendeid.
- ▶ Vanni võib desinfitseerida mõne kaubandusvõrgus pakutava kloorivaba desinfitseerimisvahendiga.
- ▶ **Tähtis!** Desinfitseerimisvahendite kasutamisel tuleb järgida tootja kasutusjuhendit.

Hooldus

Väljaõppinud töötajad peavad vanniistme kuluosi iga kuue kuu tagant kontrollima.

Ohutusjuhised

- ▶ Vanniistet tohivad kasutada üksnes isikud, kes suudavad iseseisvalt tasakaalu hoida. Istumisel/püstitõusmisel on soovitatav kasutada hooldaja abi.
- ▶ Pidage silmas maksimaalselt lubatud kehakaalu (120 kg).
- ▶ Kontrollige korrapäraselt, et vanniiste oleks kahjustusteta ja kindlalt kinnitatud, vastasel korral ärge seda enam kasutage.
- ▶ Enne igat kasutamist tuleb kontrollida istme kindlat kinnitumist.
- ▶ Istet tohib kasutada ainult üks inimene.
- ▶ Olge šampooni ja dušitoodete kasutamisel ettevaatlik, libedusoht! Ärge kasutage õliseid tooteid. Hoidke vanniservad seebist puhtad, eriti vanniistme piirkonnas.
- ▶ Vanniiste ei sobi pikaajaliseks istumiseks.
- ▶ Soovitatav on vanniistet korrapäraselt kontrollida ja vajaduse korral defektsed osad välja vahetada. Kahjustatud istmeid ei tohi enam kasutada.

Sundo GmbH ei vastuta sellisest kasutamisest tingitud kahjustuste eest, riski kannab üksnes kasutaja. Kõigist tootega seotud rasketest õnnetustest tuleb viivitamata teatada tootjale või pädevale asutusele.