


JÄÄTERAVIK, JÄÄTERAVIK, KROON

Tootenumber 123300
123350

Kasutusotstarve Jääteravik on ette nähtud kasutamiseks karguotsal libedal/jäisel pinnal kõndimiseks. Jääteravik sobib 17–23 mm karkudele.

Ohutusjuhised

- Jääteravik kinnitatakse kargu külge tootega kaasas olevate kruvidega (1).
- Jääteraviku vabastamiseks vajutage plastnuppe, seejärel saab seda üles ja alla karguotsale voltida (2).
- Enne kasutamist veenduge, et jääteravik oleks õigesse asendisse fikseeritud (3).
- Karguotsa tuleb korrapäraselt kontrollida. Kahjustatud või kulunud karguotsad tuleb välja vahetada (4).
- Kasutamise käigus toimunud tõsistest õnnetusjuhtumitest tuleb Swerecole teada anda.

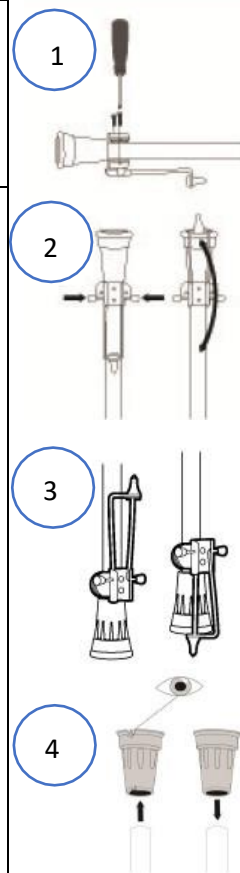

Tehnilised andmed

Tootenr: 123300
Jääteravik

Tootenr: 123350
Jääteravik, kroon

Materjal: roostevaba teras, PP

Hooldusjuhend. Vajaduse korral puhastage regulaarselt (vähemalt kord kuus) seebilahusega, pH 5–9. Kasutajate vahetamisel tuleb toode desinfitseerida, autoklaavides seda temperatuuril kuni 85 °C ligikaudu 3 minuti vältel. Teine võimalus on kuivatamine 70% isopropanooliga.

Ringlussevõtt. Toote kasutusest kõrvaldamisel võetakse see vanametallina ringlusse. Pakend koosneb papist ja plastist ning võetakse vastavalt ringlusse.



leeliseline seebilahus,
pH 5–9




temperatuuril kuni
85 °C ligikaudu 3
minuti vältel



Visuaalne kontroll



MDR 2017/745
2007/47/EC

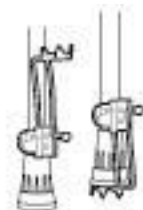

Swereco AB
Vagnvägen 4
SE-364 42 Lenhovda
Tel +46 (0) 850 005 240
info@swereco.com
www.swereco.com