

JAY® J3 Seljatugi

Oluline teave kasutajale

MÄRKUS. Kasutusjuhend sisaldab olulisi juhiseid, mis tuleb seadme kasutajale teatavaks teha. Ärge eemaldage kasutusjuhendit enne lõppkasutajale üleandmist.

TARNIJA: kasutusjuhend tuleb anda seadme kasutajale.

KASUTAJA: enne toote kasutamist lugege kogu kasutusjuhend läbi ja hoidke edaspidiseks kasutamiseks alles.


GARANTII REGISTREERIMINE: selle toote garantii kehtivuse kinnitamiseks täitke ja tagastage kaasasolevale kasutusjuhendile ja garantiivoldikule lisatud postkaart

Kasutusjuhend



EESTI

Sissejuhatus	2
Hooldus ja puhastamine	3
Seljatoe paigaldamine ratastoolile	4
Paigaldamine	5
Reguleerimine	7
Ühenduslapatsi paigaldamine	9
J3 lisatarvikud	10
Sõiduohutus	11
Eemaldamine ja tagasipanek	12
Vastunäidustused ja korduskasutamine	13
24-kuuline piiratud garantii	13

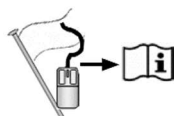

Sunrise Medical soovib sobiva J3 seljatoe leidmiseks pida nõu meditsiinitöötajaga, näiteks raviarsti või terapeudiga, kellel on kogemusi istumisasendiga seotud probleemide vallas.

⚠ HOIATUS!

Seljatuge tohib paigaldada ainult:

- Sunrise Medicali volitatud tarnija;
- väljaõppinud ja pädev tervishoietöötaja, kes on läbinud asjakohase sertifitseeritud koolituse kas Sunrise Medicali või tema volitatud tarnija juures.

SELJATOE JAY J3 KASUTUSOTSTARVE

Seljatugi Jay J3 on ette nähtud selja toetamiseks väga mitmesuguste ratastoolimudelite kasutajatele. See on välja töötatud lihtsa, mugava ja tõhusa toe tagamiseks, et aidata ratastooli funktsioone maksimaalselt ära kasutada ja kergendada istuva asendi talumist. Lisaks on seljatugi kerge, vastupidav ja seda on lihtne kasutada.

Seljatoe saab paigaldada väga mitmesugustele ratastoolimudelitele.

Kasutaja maksimaalne kehakaal:

136 kg – kompaktkinnitused (ja vanad standardkinnitused);

227 kg – tugevad kompaktkinnitused.

Seljatoe ettenähtud kasutusiga on neli aastat.

⚠ HOIATUS!

Seljatoe paigaldamine ratastoolile võib muuta ratastooli raskuskeskme asukohta ja põhjustada ratastooli tahapoole ümbermineku, millega võivad kaasneda vigastused.

Stabiilsuse suurendamiseks hinnake kindlasti vajadust paigaldada ratastoolile ümberminekuvastased abivahendid või amputeeritud jäsemetega kasutajale mõeldud telje adapterklambrid.

⚠ HOIATUS!

Ärge kasutage J3 seljatuge ratastooli lükkamiseks ega tõstmiseks. Väärkasutamise tagajärjel võib seljatugi ootamatult ratastooli küljest lahti tulla.

⚠ HOIATUS!

Ärge kasutage ratastooli tõstmiseks J3 seljatoe käepidet. See on ette nähtud üksnes seljatoe eemaldamiseks.


⚠ HOIATUS!

Hooletus põhjustab tulekahju.

⚠ HOIATUS!

Lugege enne kasutamist kasutusjuhend läbi.

J3 BACK

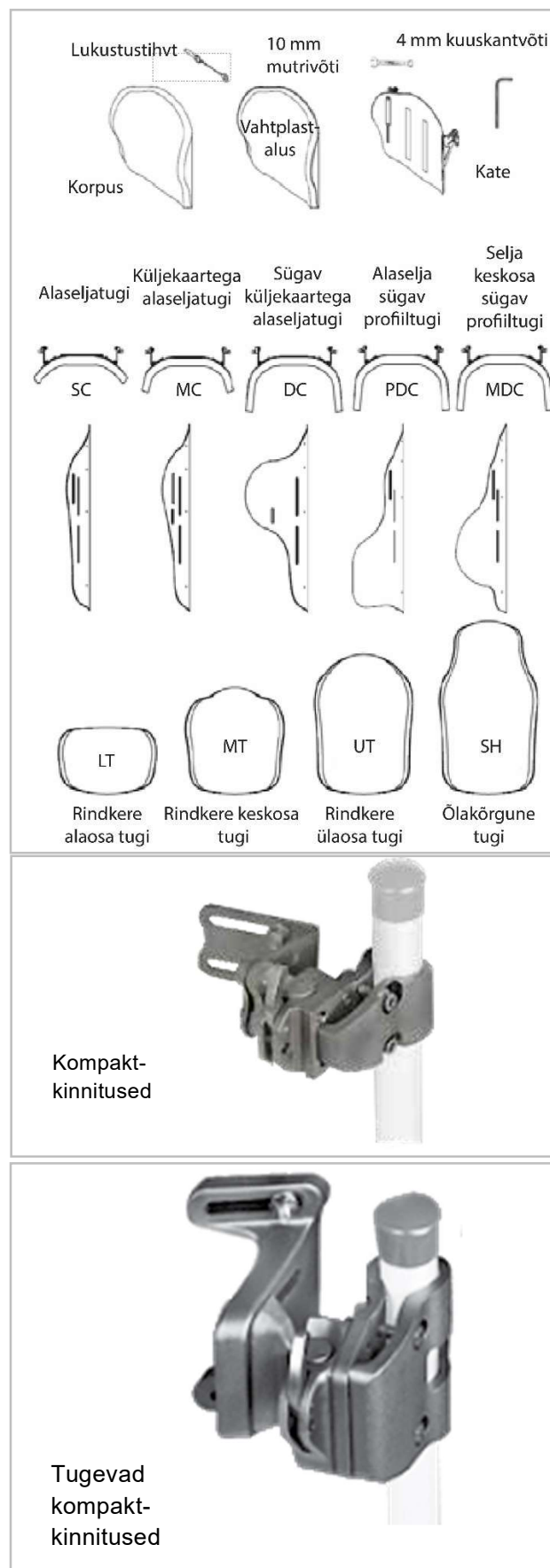

HOOLDUS

Sunrise soovib kontrollida kõikide kinnitusvahendite kulumist iga 6 kuu tagant, et kindlaks teha lahtised poldid või katkised osad. Lõdvenenud kinnitusvahendid tuleb paigaldusjuhiste järgi uuesti pingutada. Kõik kinnitusvahendid tuleb pingutada kinnitustarvikute paigaldamist käsitlevas osas antud pingutusmomendiga. Purunenud osade asendamiseks võtke viivitamata ühendust Sunrise Medicali volitatud tarnijaga. Ärge jätkake süsteemi kasutamist pärast lahti tulnud või purunenud osade tuvastamist.

LIHTNE PUHASTAMINE

MÄRKUS. Kui võtate seljatoe puhastamiseks lahti, pöörake tähelepanu Velcro® takjaribadega kinnitatud Spine Aligni tarvikute paigutusele, et saaksite seljatoe õigesti kokku panna.

Seljatoe katte puhastamine

Katte eemaldamiseks avage takjakinnis. Eraldage kate seljatoe korpusest. Leidke katte allosas asuv tõmblukk ja avage see. Eemaldage vahtplast ja keerake kate pahempidi. Sulgege katte tõmblukk, et vältida katte rebenemist. Peske pesumasinaga sooja vees (60 °C). Nõrutage kuivaks või trummelkuivatage madalal kuumusel.

MÄRKUS:

- Katteid ei tohi keemiliselt puhastada ning nende puhastamiseks ei tohi kasutada tööstuslikke pesumasinaid ja kuivateid.
- Ei tohi autoklaavis steriliseerida.
- Valgendamine ei ole lubatud.

Paigutage vahtplast katte sisse tagasi. Pidage meeles, et aluse peale tuleb panna kaks kihti vahtplast. Vahtplasti tagasipanemisel veenduge, et vastu korpust jääks õhem helehall vahtplast. Kui vahtplast on kindlalt katte sees, sulgege katte tõmblukk.

Seljatoe korpuse puhastamine

Korpust võib puhastada seebi ja veega. Muu hooldus ei ole vajalik.

Kehaasendit hoidvate tarvikute puhastamine

Kehaasendit hoidvaid tarvikuid võib puhastada seebi ja veega. Ärge kastke kehaasendit hoidvaid tarvikuid vette.

Kui teil on puhastamise kohta veel küsimusi, võtke ühendust Sunrise Medicali kohaliku volitatud edasimüüjaga.

Hooldussümbolid	
	Masinpesu sooja vees (60 °C)
	Vajaduse korral kasutada üksnes kloorivaba valgendit
	Nõrutada kuivaks
	Mitte triikida
	Mitte puhastada keemiliselt

SOBIVUSE ÜLE OTSUSTAMINE

Ratastooli tüüp

J3 seljatugi sobib ehituselt enamiku ratastoolidega, kuid kehtivad järgmised erandid:

ei tohi kasutada ratastoole, mille seljatoe nurka või kallet saab reguleerida selliselt, et seljatoe kaldenurk vertikaalasendi suhtes ületab 60°.

⚠ HOIATUS!


Seda tüüpi ratastoolidel kasutamisel võib seljatugi ootamatult ratastooli küljest lahti tulla. See omakorda põhjustab kukkumise, mille tagajärjeks võib olla tõsine vigastus.

Ratastooli mõõtmed

J3 seljatugi on ette nähtud ratastooli olemasoleva polstri asendamiseks. Enne paigaldamist selgitage välja, kas kasutataval ratastoolil on sobivad tagatorud. Selleks mõõtke tagatorude vahekaugus, nagu on näidatud joonisel 1. Seejärel vaadake mõõtetulemuse alusel tabelist 1, kas seljatugi sobib teie ratastoolile.

Järgmisena kontrollige, kas tagatorud on sobiva läbimõõduga. J3 seljatoe kinnitustarvikud saab paigaldada ratastooli tagatorudele läbimõõduga vahemikus 3/4" (1,9 cm) kuni 1 1/8" (2,85 cm). Mõõtke tagatoru läbimõõt (joonis 2) ja vaadake tabelist 2, kas teie tagatorud on sobivad.


Kui te ei suuda otsustada, kas tagatorud on sobivad, võtke ühendust Sunrise Medicali volitatud edasimüüja või klienditeenindusega.

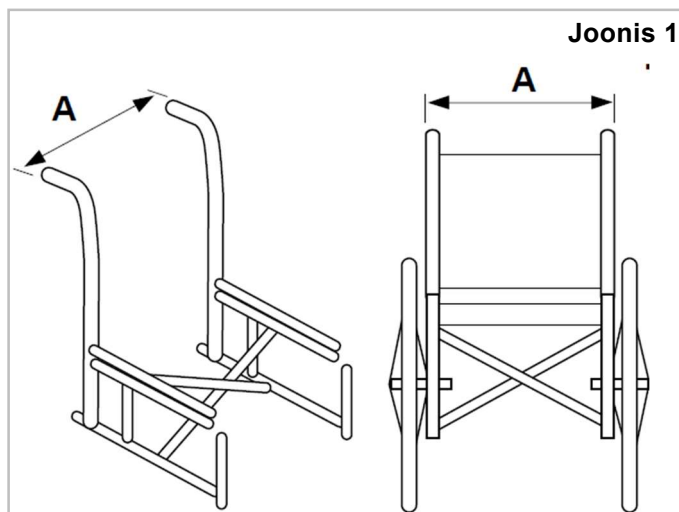

Tabel 1

J3 seljatoe laius*		Tagatorude laius ühe toru välisküljelt teise toru välisküljeni (joonis 1-A)			
(kõik profiilid)		Minimaalne laius		Maksimaalne laius	
		tollid	cm	tollid	cm
12"	31cm	11.7	29.7	14.3	36.3
14"	36cm	13.7	34.9	16.3	41.3
16"	41cm	15.7	40.0	18.3	46.4
18"	46cm	17.7	45.1	20.3	51.6
20"	51cm	19.7	50.1	22.3	56.5

* Seljatoe laiust näitab teie seljatoe tootenumber. Näide: J3SCMTS36 on 36 cm laiune seljatugi.

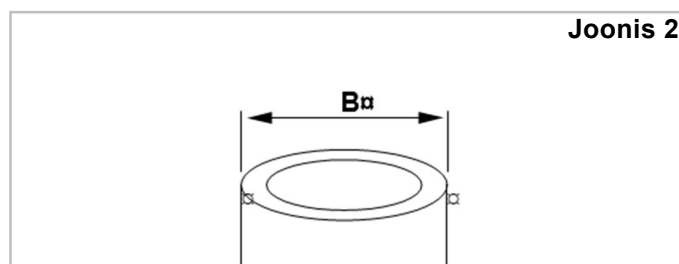

Tabel 2

Seljatoe J3 laius (kõik profiilid)	Toru läbimõõt (joonis 2-B)			
	Minimaalne laius		Maksimaalne laius	
	tollid	cm	tollid	cm
14-20" (36-51cm)	3/4	1.9	1-1/8	2.85

KINNITUSTARVIKUTE PAIGALDAMINE

Enne paigaldamist lugege alljärgnevad juhised läbi.

J3 seljatoe paigaldamist on kõige parem alustada nii, et kasutaja ei ole ratastoolis. Kui seljatugi on paigaldatud ja vaja on väiksemat seadistamist, võib kasutaja jälle ratastooli paigutada.

Vajalikud tööriistad (J3 seljatoega kaasas)*

- 4 mm kuuskantvõti



- 10 mm silmusvõti



MÄRKUS. Kõikidel juhtudel, kus on antud pingutusmomendi väärtus, tuleb kindlasti kasutada momendidünamomeetrit (ei kuulu seljatoe Jay3 komplekti), et tagada spetsifikatsioonis ettenähtud pingutusmomendi väärtus.

Kinnitustarvikute paigaldamise juhised (joonised 3, 4 ja 5)


Kehtivad iga tüüpi kinnitustarvikute (kompaktkinnitused, tugevad kompaktkinnitused ja vanad standardkinnitused) kohta.

1. Eemaldage ratastooli olemasolev seljatugi ratastooli tootja juhiste kohaselt.
2. Määrake visuaalselt hoidikute soovitud asukoht ratastooli tagatorudel. Kinnitustarvikud peavad olema mõlemal tagatorul umbes ühekõrgusel (joonis 3) ja paiknema istmeraamiga paralleelselt (joonis 4). Üldjuhul on kõrgem asukoht tagatorul parem.
3. Kinnitage hoidikud (joonis 5).
 - a. Keerake kinnituskruvid (A) kaasasoleva 4 mm kuuskantvõtmega lahti. **MÄRKUS.** Suurema läbimõõduga torude korral tuleb võib-olla kinnituskruvid täielikult eemaldada.
 - b. Kinnitage hoidikud ratastooli tagatorude (B) külge ja rihtige paika.
 - c. Pingutage kinnituskruvid (A) käega. **MÄRKUS.** Võimalik, et hoidikuid on vaja õigeks paikarihtimiseks külgsuunas täiendavalt reguleerida.


J3 seljatoe korpuse kinnitamine ja rihtimine (joonis 6)

- a. Keerake kanduri mutreid (C) ja paigaldustihvti mutreid (F) 10 mm silmusvõtmega lahtisemaks, kuni kinnitustarvikud saavad igas suunas kergesti liikuda.
- b. Kinnitage J3 seljatugi kinnitustarvikute hoidikutesse, sisestades vasak- ja parempoolse paigaldustihvti (D) vasak- ja parempoolsesse hoidikusse (E).
- c. Seadke seljatugi ratastooli ja kasutaja suhtes umbes õigesse asukohta.
- d. Keerake paigaldustihvti (F) sees olevad mutrid käsitsi kinni. **MÄRKUS.** Seljatoe sügavust ja kaldenurka peab võib-olla lisaks reguleerima, et need kasutajale sobiks.
- e. Keerake kanduri mutrid (C) käsitsi kinni. **MÄRKUS.** Seljatoe kõrgust peab võib-olla lisaks reguleerima, et see kasutajale sobiks.


Joonis 3

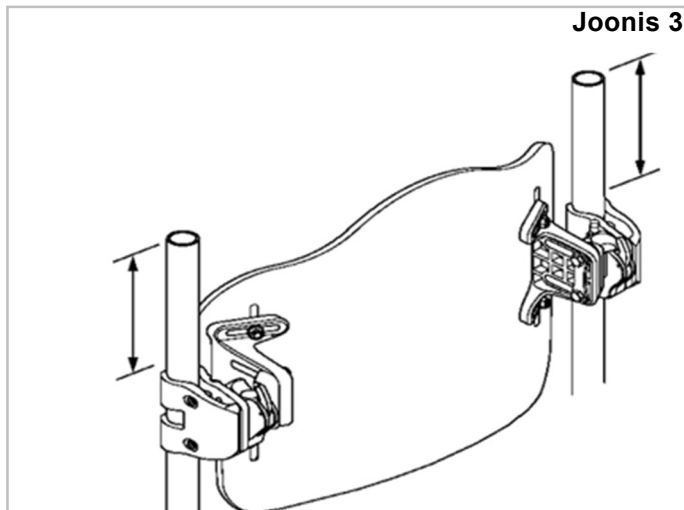


Joonis 4

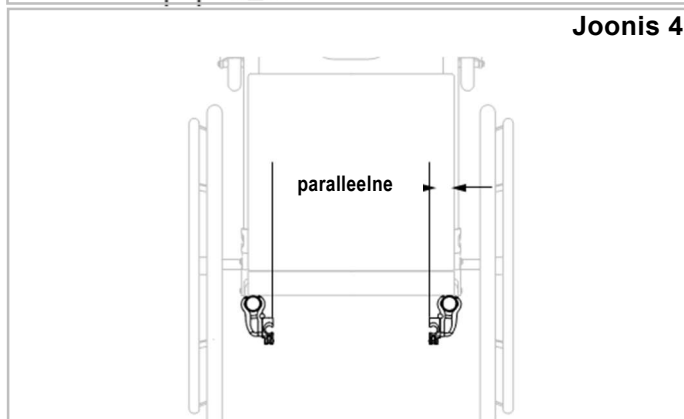

Joonis 5

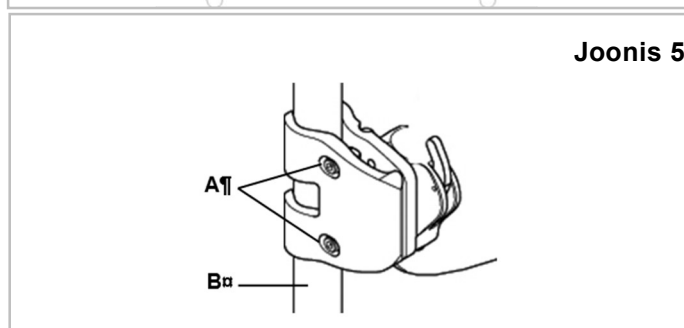

Joonis 6

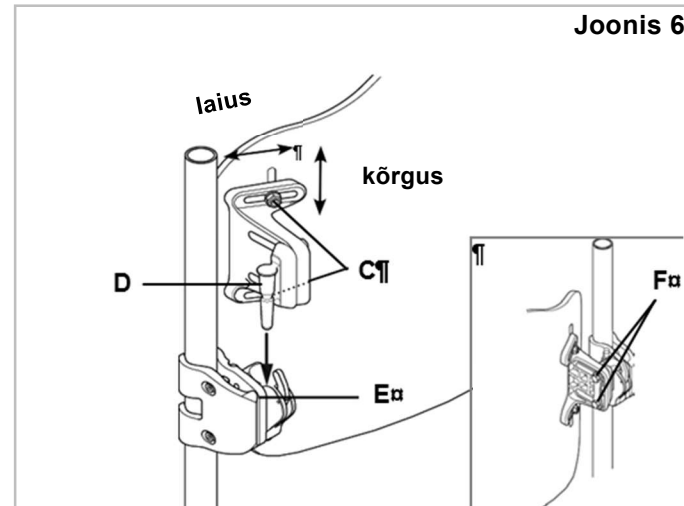

- f. Katsetage seljatoe lahtipäästmist, vajutades vabastushoobasid ettepoole ja eemaldades seljatoe ratastooli küljest. (Täpsemalt vaadake jaotisest „Eemaldamine ja tagasipanek“.) Kinnitustarvikud ja seljatugi on õigesti paika rihitud, kui kinnitamine ja vabastamine on sujuvad.
- g. Kui seljatugi ei ole veel õigesti paigas, reguleerige osi, kuni need on õigeks rihitud.
- h. Pärast osade õigesti paika rihtimist keerake hoidikute kinnituskruvid kinni. Soovitatav pingutusmoment on 8,5...9,3 Nm.

J3 KÕRGUSE, SÜGAVUSE JA KALDENURGA REGULEERIMINE

J3 seljatoe paigaldamise esimene etapp on lõpetatud. Nüüd on õige aeg lasta kasutaja tagasi ratastooli paigutada, et saaksite J3 seljatuge isikupärastada. Jälgige, et kasutaja ei toetuks seljatoele kogu keharaskusega, sest seljatoe kinnitustarvikud ei ole täielikult nõutavat pingutusmomenti järgides kinni keeratud.

1. Kõrguse reguleerimine (joonis 10)

- Kui kasutaja on ratastoolis, leidke seljatoe soovitud kõrgus. Kui see on leitud, paluge kasutajal mitte toetada vastu J3 seljatuge. Ta võiks end võimaluse korral veidi ettepoole kallutada või nihutada, et oleks võimalik seljatuge reguleerida.
- Keerake kanduri mutrid (A) veidi lahti ja reguleerige seljatoe korpus soovitud asendisse.
- Keerake kanduri mutrid (A) kindlalt kinni. Soovitatav pingutusmoment on 8,5...9,3 Nm.

MÄRKUS. Pärast kõrguse reguleerimist kontrollige, et laius ei oleks kogemata muutunud.

2. Sügavuse/kaldenurga reguleerimine (joonised 11, 12 ja 13)

Pidage meeles, et tellida saab kaht tüüpi kinnitustarvikuid – tavakinnitusi (joonis 11) või pikemaid reguleeritavaid kinnitustarvikuid (joonis 12). Mõlema komplekti kinnitustarvikuid reguleeritakse ühtmoodi, kuid tavakinnitused võimaldavad sügavust reguleerida 5 cm ulatuses (joonis 11), pikendatud kinnitustarvikute (reguleeritavate kinnitustarvikute) korral saab aga sügavust reguleerida kokku 8,65 cm (joonis 12).

- J3 seljatoe sügavuse ja kaldenurga reguleerimiseks keerake kanduri pesades lahti vasak- ja parempoolsed mutrid (joonis 13-B).
- Reguleerige sügavust ja/või kaldenurka ning keerake kindlalt kinni. Soovitatav pingutusmoment 11,3...12,4 Nm. Veenduge, et ükski sügavuse reguleermutter (joonis 13-B) ei libiseks ega pöörleks.
- Kui on vaja lisasügavust, võtke seljatugi hoidikutest välja. Eemaldage kaasasoleva 4 mm kuuskantvõtme abil hoidikust kruvid (joonised 11-D, 12-D) ja seadke hoidikud soovitud sügavusele. Märkus. Kui seljatoe asendit on vaja muuta, soovitage kanda enne kruvide tagasipanekut hoidiku- ja kruvikeermetele sobivat keskmise tugevusega keermelukustit, nt Loctite 243. Keerake kruvid kinni pingutusmomendiga 2,8...4 Nm.


⚠ HOIATUS!

Kui reguleerimine on lõpetatud ja J3 seljatugi on kasutusvalmis, veenduge, et kõik kinnitustarvikud oleksid korralikult kinni keeratud.




Joonis 10

Joonis 11 Kompaktkinnitused – kaks sügavusseadistust

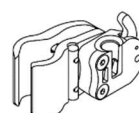


Sügavus 1

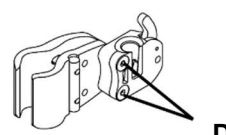

Sügavus 2

D

Joonis 12 Tugevad kompaktkinnitused

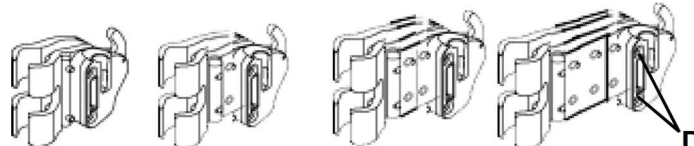


Sügavus 1

Sügavus 2


Sügavus 3

Sügavus 4

Joonis 13

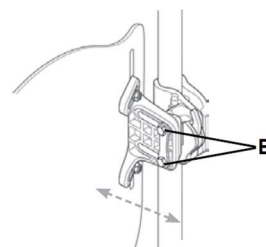


Joonis 14

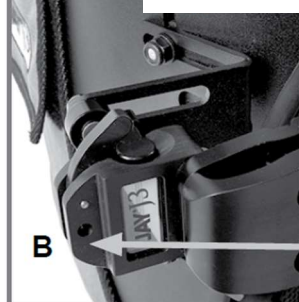

B

Joonis 15

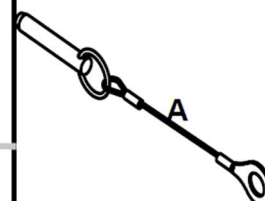

A

⚠ HOIATUS!

Seljatoe optimaalse ohutuse tagamiseks tuleb enne seljatoe kasutamist sisestada lukustustihvt (joonis 14 ja 15).

ÜHENDUSLAPATSI PAIGALDAMINE

1. Tõstke J3 seljatoe katte ülemine lapats üles (joonis 17).
2. Kinnitage aasad vastavate konksude külge ja ühenduslapats J3 seljatoe katte tagaosa külge (joonis 17). Paigutage katte ülemine lapats tagasi, nii et ühenduslapats jääb ülemise ja alumise lapatsi vahele (joonis 18).
3. Eemaldage ratastoolilt istmepadi ning paigutage ühenduslapatsi alaosa ratastooli tugipinna ja istmepadja vahele (joonis 20).
4. Reguleerige ühenduslapatsit vastavalt vajadusele, liigutades alaosa istmepadja alla või sealt välja. Vajaduse korral saab ka ühenduslapatsi ülaosa istme seljatoel üles või alla liigutada.
5. Pistke konksude ja aasade küljes olevad sidumisribad ühenduslapatsi vastavatest rõngastest läbi, seejärel keerake need ümber ratastooli raami ning lükake sidumisriba eesots läbi piluga otsa (joonis 21). Tõmmake tihedalt kinni, sulgedes ühenduslapatsi välisküljel olnud tühemikud (joonis 22).

Valikuline hoiukott

MÄRKUS. Ühenduslapatsi külge kinnitamiseks on valikvarustusena saadaval hoiukott (joonis 16).

**Joonis 17****Joonis 18****Joonis 19****Joonis 20****Joonis 21****Joonis 22****Joonis 16****Joonis 23**

Lõplikult paigaldatud J3 ühenduslapats

SPINE ALIGNI ASENDITARVIKUD

Spine Aligni asenditarvikud on ette nähtud standardse seljatoe sees keha järgiva toe pakkumiseks. (Teie turust olenevaltõivad Spine Aligni tarvikud kuuluda seljatoe komplekti.) Spine Aligni tarvikute paigaldamiseks lugege järgmisi juhiseid.

1. Spine Aligni asenditarviku paigaldamine

- Paluge kasutajal mitte toetada vastu J3 seljatuge. Ta võiks end võimaluse korral veidi ettepoole kallutada või nihutada.
- Tõmmake katte ülaosa lapatsi takjariba lahti (joonis 24) ja tõstke katet ettepoole, et avada J3 seljatoe siseosa.
- Paigutage asenditarvik(ud) korpuse sees olevale takjaribale (joonis 25) ja kinnitage katte ülaosa lapats tagasi. Tõmmake allapoole, jälgides, et ülemine õmblus jääks korpuse ülaservaga kohakuti. Kui õmblus ei jää servaga kohakuti, on võib-olla vaja katte alaosa lõdvemaks lasta (joonis 26).
- Laske kasutajal proovida, kas Spine Aligni tarvikute praegune paigutus on mugav ja pakub tuge, ning korrake samme a–c, kuni kõik on reguleeritud.
- Kasutada saab Spine Aligni tarvikute mitmesuguseid konfiguratsioone ja kombinatsioone. Kui vajate juurde mingi kuju või suurusega Spine Aligni tarvikuid, võtke ühendust oma edasimüüja või Sunrise Medicaliga.


MÄRKUS. Kui vajate lisateavet J3 Spine Aligni süsteemi kohta, vaadake meie animatsiooni aadressil www.hrisemedical.com.

J3 seljatugi on lõplikult paigaldatud.

J3 LISATARVIKUD

Kui olete tellinud J3 lisatarvikud, näiteks külje- või peatoed või rakmed, vaadake nende toodetega seotud paigaldusjuhiseid.


Joonis 24

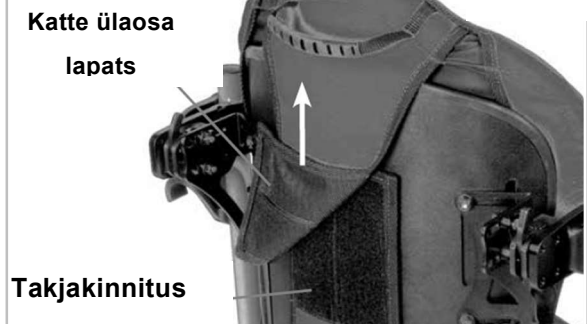

Joonis 25



Joonis 26

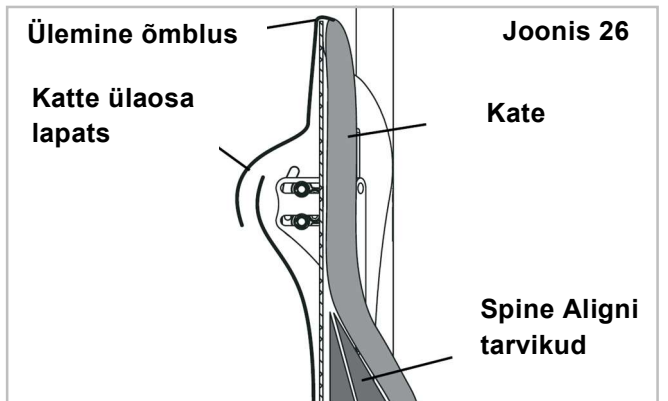

Positioning Components	
Suur nimmetugi	
Väike nimmetugi	
Kiil	
Kaarjas kiil	
Lame kiil	
Vaagnapiirkonna taga-/küljetugi	
Küljekiil	
Suur padi	
Väike padi	

SELJATOE SÕIDUOHUTUS

J3 seljatugi on läbinud dünaamilised katsetused mootorsõidukis kasutamiseks. Järgige kõiki selles juhendis esitatud paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhiseid ning samuti allpool esitatud sõidukis kasutamise juhiseid.

JUHISED

1. Kui see on võimalik ja teostatav, tuleb kasutaja teistaldada lõpptootja sõidukiistmele ja kasutada sõiduki kinnitussüsteeme.
2. Kasutaja öla ülaosa ja seljatoe ülaseru uahekaugus ei tohi ületada 16,5 cm.
3. Ratastoolil peab olema märgistus, mis tõendab selle sobivust mootorsõidukis istmena kasutamiseks, tool peab olema läbinud dünaamilised katsetused kooskõlas standardi ISO 7176-19 toimivusnõuetega ning tootja juhiste kohaselt paigaldatud, kasutatud ja hooldatud.
4. Kui ratastooli originaalide on välja vahetatud, peab uus iste olema ratastoolis sõitmiseks heakskiidetud ning tootja juhiste kohaselt paigaldatud ja kasutatud.
5. Ratastooli rihmade ja istuja kinnitusrühmade süsteem (WTORS) peab sobima konkreetsele ratastoolile, selle kasutamine peab toimuma tootja juhiste kohaselt ja vastama standardi ISO 10542 toimivusnõuetele.
6. Transportimise ajal peab ratastool olema näoga sõidusuunas.
7. Sõidukis sõitjate vigastusohu vähendamiseks tuleb eemaldada ratastoolile paigaldatud lisatarvikud, näiteks lauad ja hingamisseadmed, ning need sõidukis eraldi kinnitada.
8. See toode on mõeldud kasutamiseks täiskasvanutele, kelle kehakaal on 35 kuni 136 kg.
9. Asendit fikseerivaid vahendeid, näiteks vaagnavõid, kehatüve eesmisi tugirakmeid või asenditugesid (näiteks kehatüve külgugesid) ei tohi kasutada kasutaja kinnitamiseks liikuvast sõidukis, välja arvatud juhul, kui neil on standardi ISO 16840-4 nõuetele vastavust kinnitav märgistus.
10. Konstruktsiooni, osi ega tarvikuid ei tohi muuta ega asendada tootjaga konsulteerimata.

HOIATUS!

**NENDE HOIATUSTE EIRAMINE VÕIB KAASA TUUA
RATASTOOLI KASUTAJA VÕI TEISTE ISIKUTE
RASKE KEHAVIGASTUSE.**

EEMALDAMINE JA TAGASIPANEK

Eemaldamine

Pärast paigaldamist ja reguleerimist saab seljatoe vajaduse korral ratastooli küljest kergesti ära võtta. Eemaldamiseks lükake mõlemat vabastushooba ettepoole, et need lahti päästa (joonis 27). Kui mõlemad hoovad on eesmises asendis, tõstke lihtsalt seljatugi tagaküljel asuvat käepidet kasutades üles (joonis 28).

Õige tagasipaneke pärast äravõtmist



Seljatoe hoidikutesse tagasikinnitamiseks seadke lihtsalt tihvtid hoidikutega kohakuti ja vajutage paika (joonis 29). Õige sisestamise korral klõpsavad tihvtid lukustatud asendisse.

⚠ HOIATUS!

Kui te pole kindel, kas kuulsite lukustumise klõpsu, tõmmake seljatuge käepidemest, et veenduda selle kindlas lukustumises.

Lukustustihvtid (joonis 30)

J3 seljatoel on kaks lukustustihvti, mis kindlalt kinnitatuna takistavad seljatoe ratastooli küljest lahtitulekut. Lukustamiseks sisestage tihvtid (A) paigaldushoidikutesse (B). Kui soovite, et seljatoe saaks kiiresti vabastada, eemaldage lihtsalt tihvtid.

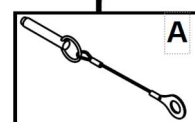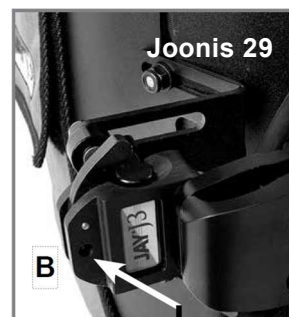

VASTUNÄIDUSTUSED:**⚠ HOIATUS!**

Ärge kasutage ega määrake seda seljatuge isikutele, kelle kehakaal ületab kasutaja maksimaalset lubatud kehakaalu.

RINGLUSSEVÕTT/KORDUSKASUTAMINE:**⚠ HOIATUS!**

- Vigastusoht
- Enne seadme üleandmist teisele kasutajale laske kindlasti Sunrise Medicali volitatud edasimüüjal kontrollida, kas seade ei ole kahjustatud või kulunud. Mis tahes kahjustuste leidmisel **ÄRGE TOODET KASUTAGE**.
- Nende hoiatuste eiramine võib kaasa tuua raske kehavigastuse.

Toode sobib korduskasutamiseks*.

- Laske Sunrise Medicali volitatud edasimüüjal kontrollida, kas korpus, kinnitustarvikud, vahtplast ja kate ei ole kahjustatud või kulunud. Kahjustuste leidmisel ärge korduskasutage.
- Puhastage ja desinfitseerige korpus, kinnitustarvikud, vahtplast ja kate kooskõlas kasutuskohas kehtivate riiklike määrustega. Küsige nõu kohalikust nakkustõrjega tegelevast asutusest.
- Pärast puhastamist ja desinfitseerimist laske Sunrise Medicali volitatud edasimüüjal korpus, kinnitustarvikud, vahtplast ja kate veel kord üle vaadata ja kontrollida, kas puhastamisel/desinfitseerimisel ei ole tekkinud kahjustusi.

⚠ HOIATUSED:

- Nende korduskasutamisharjutuste täitmata jätmisel võivad tagajärjeks olla kasutaja rasked kehavigastused.
- Korduskasutamisel peab Sunrise Medicali volitatud edasimüüja või haiglaarst seda toodet uuele kasutajale kohandama ja sobitama.

24-KUULINE PIIRATUD GARANTII**24-KUULINE PIIRATUD GARANTII**

Iga Jay J3 seljatuge on tiptasemel toimivuse tagamiseks hoolikalt kontrollitud ja katsetatud. Garanteerime, et tavapärasel kasutamisel on kõik Jay J3 seljatoed materjali- ja tootmisdefektideta 24 kuu jooksul alates ostukuupäevast. Kui 24 kuu jooksul alates ostukuupäevast peaks ilmuma materjali- või tootmisdefekt, siis remondib või asendab Sunrise Medical toote omal valikul tasuta. Garantii ei kehti läbitorkamiste, rebendite ega tulest põhjustatud kahjustuste korral ega ka seljatoe äravõetava katte kohta.

Nõudeid ja remonti tuleb käsitleda lähima volitatud tarnija kaudu. Kõik muud garantiid peale siin sõnaselgelt nimetatute, sealhulgas kaudsed turustatavuse garantiid ning korrasoleku või konkreetseks otstarbeks sobivuse garantiid, on välistatud. Siinkirjeldatust suurema ulatusega garantiisid ei anta. Siin nimetatud otseste garantiide heastamismeetmed piirduvad kauba remontimise või asendamisega. Mingil juhul ei hõlma ühegi garantii heastamismeetmed kaudseid kahjusid ega ületa garantiinõuetele mittevastavate kaupade ostuhinda.



Toode on valmistatud meditsiiniseadmete direktiivi 93/42/EMÜ nõuete kohaselt.

Toodetud kaitstuna ühe või mitme järgmise patendiga, muud patendid on taotlemisel: Ameerika Ühendriikide patent nr # ja muud välisriikide patendid.

4,588,229; 4,660,238; 4,726,624; 4,761,843; 4,842,330; 5,018,790; 5,255,404; 5,352,023; 5,362,543; 5,369,829; 5,390,384;
5,395,162; 5,457,833; 5,490,299; 5,397,517, 5,687,436; 5,869,164