

# ► Kasutusjuhend

## Ratastega potitool

Tootekood nr 14000 / 2 piduriga rullikratast

Tootekood nr 14002 / 4 piduriga rullikratast



**sundo**  
HOMECARE

## ► Ratastega potitool

### Kasutusotstarve

Potitool on meditsiiniseade. See hõlbustab tualeti kasutamist, kui tualeti kasutamine või sinna jõudmine on võimatu või raske. Ühelt poolt saab potitooli kasutada tavalise WC asemel, teisalt võib seda päevasel ajal asetada WC-poti kohale tugivahendina või kasutada siseruumides transpordivahendina.

### Näidustused

Raskused õigeaegsel WC-sse jõudmisel või selle kasutamisel erinevate haiguste tõttu (üldine nõrkus, rasked liikumispuuded, tung- või stressinkontinents, roojapidamatus, krooniline kõhulahtisus jne), mis nõuavad tualettruumi vahetat ruumilist lähedust.

### Vastunäidustused

Tugev peapööritus, desorientatsioon, tasakaalu või kerelihaste kontrolli puudumine istudes vms, mis nõuavad hooldaja tingimusteta kohalolekut ja abi.

### Variandid

On olemas erinevad mudelid ja suurused, valik tuleb teha koos erialaspetsialistiga. Liikuv neljarattaline potitool on saadaval variantides, mille on kaks või neli piduritega ratast. Valikut võivad aidata teha, kokku panna ja kasutusjuhiseid anda üksnes vastava väljaõppe saanud töötajad. Potitool on mõeldud koduseks kasutamiseks, see tohib kokku puutuda ainult terve, vigastamata nahaga ja seda ei tohi kasutada mitu patsienti. Muul viisil kasutamine ei ole lubatud. Sundo GmbH ei vastuta tekkinud kahjude eest, risk lasub täielikult kasutajal.

### Enne igakordset kasutamist/täiendamist

Kõigepealt lugege juhised täielikult läbi ja hoidke need toote kasutusea lõpuni alles.

Veenduge enne esmakordset ja igat järgmist kasutuskorda, et potitooli detailide kõik ühenduskohad oleksid tugevasti kinnitatud.

Potitool tarnitakse eelmonteerituna ning koosneb raamist, istmest, katteplaadist ja WC-ämbrist.

Kahjustuse ilmnemisel ei tohi toodet (enam) kasutada ja tuleb pöörduda edasimüüja poole.



### Kokkupanek

Ratastega potitooli saab kiiresti ja tööriistu kasutamata kokku panna, selleks tuleb teha paar lihtsat toimingut.

- Lükake seljatugi alusraamil ① olevatesse torudesse ja keerake mõlemad kruvid kinni.
- Fikseerige käetoed konsoolides ②.
- Kinnitage jalatoed selleks ettenähtud tihvtide külge ja pöörake seejärel keskele. Jalatoed peavad haarduma kuuldavalt.
- Paigaldage säärerihm ③ jalatoe torule ④.

### Enne igakordset kasutamist

- Veenduge, et seljatugi oleks korralikult paigas, kruvid kõvasti kinni keeratud ja käetoed nõuetekohaselt lukustunud.
- Veenduge, et rataste seisupidurid töötaksid ja jalatoed oleksid korralikult kinnitatud.

## Kasutamine

Kui tooli kasutatakse transpordivahendina, võib istmele paigaldada eemaldatava polsterdatud katteplaadi. WC-potina kasutamiseks eemaldage katteplaat ja lükake WC-ämber **tagant ettepoole ilma kaaneta** välja. Nüüd on tool WC asendajana kasutamiseks valmis. Märkus: ämbri servas on soon (nn veeserv), mida saab täita puhta veega ja mis aitab vältida ebameeldiva lõhna levimist pärast kaanega sulgemist. Pärast tualetiprotseduuri lõpetamist toimige vastupidises järjekorras ja valage ämbri sisu WC-potti. Tugivahendina kasutamiseks lükake katteplaadita ja ämbrit potitool tagasi WC-poti kohale, nii et väljalõige jääks WC-poti kohale. Kasutage pidureid. Potitooli võib kasutada üksnes horisontaalsetel ja libisemiskindlatel pindadel. Igakordsel potitooli istumisel või sealt tõusmisel on vaja hooldaja abi. Enne asukoha muutmist lukustage pidurid, klappige jalatoed üles ja aidake patsiendil tooli istuda. Seejärel klappige jalaplaadid uuesti alla, et patsient saaks oma jalad nendele toetada. Toolist tõusmiseks toimige vastupidises järjekorras. **Tähelepanu!** Potitooli võib transpordivahendina kasutada üksnes siis, kui katteplaat on kohale pandud.

## Tarvikud – katteplaat/iste/WC-ämber

- ▶ Musta värvusega katteplaadi saab pealt ära võtta. Tagasipanekul veenduge, et see lukustuks valge istme külge.
- ▶ Valge istme eemaldamiseks tõmmake selle eesmist ümardatud serva ülespoole. Paigaldamisel kinnitatakse see esmalt tagaosast (seljatugi) ja seejärel surutakse alla.
- ▶ WC-ämbri saab lükata hoidikusse tagantpoolt (kaanega või ilma).

## Tehnilised andmed

Tootekood nr 14000 / ratastega potitool, 2 piduriga rullikrast			
Tootekood nr 14002 / ratastega potitool, 4 piduriga rullikrast			
Värvus:	hall/must	Iste:	ligikaudu 45 × 44 cm
Kogulaius:	ligikaudu 56 cm	Istme kõrgus:	ligikaudu 53 cm
Kogukõrgus:	ligikaudu 96 cm	Max kandevõime:	130 kg
Kogusügavus:	ligikaudu 92 cm	WC-poti vastuvõetav kõrgus:	ligikaudu 41 cm

## Puhastamine ja desinfitseerimine

Ärge kasutage puhastamiseks teravaid või abrasiivseid vahendeid ega pesuaineid. Kasutage üksnes pehmetoimelisi puhastusvahendeid (istmeplaadi ja ämbri jaoks võib kasutada ka plastipuhastusvahendeid) ja pehmeid lappe või käsni.

Jälgige, et torudesse ei satuks vett. Kõiki osi võib desinfitseerida tavaliste kloorivabade desinfitseerimisvahenditega, ämbrit ja istmeplaati tuleb desinfitseerida pärast igat kasutuskorda.

**Tähelepanu!** Järgige tootjate kasutusjuhiseid.

## ► Ratastega potitool

### Ohutusjuhised

- Ettevaatust! Pakend, toode ja väikesed osad võivad põhjustada lämbumis- või vigastusohtu, sest neid võib alla neelata. Ärge jätke lapsi koos toote ja pakendiga (kilekotid) järelevalveta.
- Potitooli tohivad kasutada üksnes piisavate vaimsete ja füüsiliste võimetega isikud, keda abistab hooldustöötaja (nt õendusspetsialist)!
- Patsiendi kehamass ei tohi ületada 130 kg!
- Potitooli võib kasutada üksnes horisontaalsel ja libisemiskindlal pinnal.
- Jala- ning käetugede üles- ja allaliigutamisel on oht sõrmede või käte muljumiseks.
- Kontrollige korrapäraselt keevisõmblusi ja kruviühendusi!
- Säärerihm peab patsiendi transportimise ajal olema kinnitatud.
- Istuge alati toolis seljaga vastu seljatuge ja ärge kummardage ettepoole. Ümberminekuht!
- Ärge kasutage potitooli saunas ega duširuumis!
- Potitool ei ole mänguasi! Hoolitsege oma laste eest!
- Eemaldage WC-ämber üksnes siis, kui toolil kedagi ei istu – muljumisoht!
- Veenduge, et istmepind oleks kindlalt istmeraamile kinnitatud!
- Potitooli võivad kasutada üksnes isikud, kes suudavad istudes hoida tasakaalu.
- Potitool või selle jalatoed ei sobi nendel seismiseks.
- Kui potitooli osad on paindunud või deformeerunud, ei tohi tooli kasutada.
- Kui seoses selle tootega on juhtunud tõsiseid olukordi, võtke ühendust tootja või pädeva asutusega.
- Kasutage üksnes originaalvaruosid!

### Garantii

Seadusest tulenevate garantiinõuete kohaselt. Garantii ei hõlma defekte, mis on tekkinud loomuliku kulumise, tahtliku tegevuse, hooletuse või ebaõige käsitlemise ja kasutamise tõttu, samuti puuduste tõttu, mis mõjutavad toote väärtust või kasutatavust vaid vähesel määral.

Me jätame endale õiguse teha muudatusi, mille eesmärgiks on tehnilised täiustused.



Sundo Homecare GmbH

Bahnhofstraße 13, DE-30916 Isernhagen, Internet: <https://www.sundo-homecare.de>



Valentine International Ltd., 8th Floor, No. 149, Sec 2, Ta Tung Road,  
221 Hsichih District, New Taipei City, Taiwan R.O.C.



KOMAS Medical Technology GmbH, Sternstraße 67, DE-40479  
Düsseldorf



**sundo**  
HOMECARE