

► Kasutusjuhend

Voodiohjad

Toote nr 46000

[HMOV-Nr 19.40.02.2021]

[HMOV-Nr 50.45.02.2021]




sundo
HOMECARE

Kokkupanek

Voodiohjad tarnitakse varem kokkumonteerituna. Te saate toote paigaldada ilma tööriistadeta, lihtsalt lükake nelikanttorud üksteise sisse (vt joonist). Seejärel keerake paigaldusposti fikseerimiseks kinni püstpostil olev kruvi. Kinnitage käepide kandeõla otsale, selleks viige rihtm läbi õõsi ja reguleerige kõrgus sobivaks. Lõpuks kontrollige rihtmast/käepidemest tõmbamisega õiget kõrgust ja kinnitustugevust.

- ① Kandeõlg/õõs
- ② Käepide istukile tõusmiseks
- ③ Koormuse rakendussuund
- ④ Ühendussüsteem
- ⑤ Noolemärgistusega montaažipost
- ⑥ Lukustuskruviga püstpost

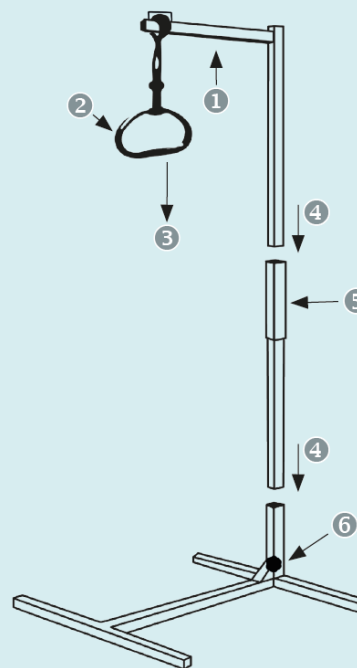

Kasutusotstarve Voodiohjad kujutavad endast meditsiiniseadet ja abivahendit sellistele inimestele, kes ei saa kõrvalise abita voodis ohutult istuli tõusta või sealt püsti tõusta. Selleks peab olema ülakehas ja käsivartes piisavalt jõudu.

Süsteeminõuded Voodiohje võib kasutada ainult vooditel, millel on avatud alusraam; need ei sobi kinnise peatsiotsaga vooditele.

Näidustused Voodihaiged patsiendid, alajäsemete piiratud liikumisvõime.

Vastunäidustused: seljavigastused, apopleksia, hemipleegia, selgroovigastused.

Kirjeldus Voodiohje kasutatakse iseseisvalt voodis istuli tõusmiseks, tuhara tõstmiseks, et kasutada siibrit, ning ratastooli või potitooli istumiseks. Toode tohib kokku puutuda ainult terve, vigastamata nahaga. Muid peale loetletud kasutusviiside ei peeta ettenähtud otstarbeks ja need ei ole lubatud. Loata muudatused, vale kasutamine ja ebaõige paigaldus vabastavad tootja vastutusest kõigi sellest tulenevate kahjude eest. Sundo GmbH ei vastuta tooli kasutamisest tingitud ükskõik millise kahjustuse eest, risk lasub üksnes kasutajal. Kõigist tootega seonduvatest tõsistest vahejuhtumitest tuleb teavitada tootjat ja pädevat asutust.

Enne igakordset kasutamist/hooldust Lugege juhised hoolikalt ja täielikult läbi ning hoidke need toote kasutusea lõpuni alles.

Enne esmakordset ja igat kasutuskorda kontrollige kõiki osi visuaalselt transpordikahjustuste suhtes. Liikuvaid osi tuleb sujuva toimimise tagamiseks regulaarselt kontrollida. Kontrollige püstposti vähemalt kord kuus, eelkõige pöörake tähelepanu keevisõmblustele ja käepidemele. Kontrollige regulaarselt rihma, defektsed osad tuleb kohe välja vahetada. Vahetamine on vajalik hiljemalt pärast viieaastast kasutamist.

Enne igakordset kasutamist veenduge, et rihtm ja käepide oleksid kindalt kinnitatud ja kahjustusteta!

Kasutamine

- ▶ Voodiohjad tuleb paigutada lahtiselt voodipeatsi taha. Kandeõlg peab paiknema voodiservaga paralleelselt.
- ▶ Hooldaja peab enne igakordset kasutamist veenduma, et rihtm oleks kinnitatud nõuetekohaselt.
- ▶ Käepide tuleb seadistada sobivale kõrgusele – see tuleks paigaldada istuvas asendis lõua või rinna kõrgusele.
- ▶ Voodiohje võib koormata üksnes vertikaalsuunas.
- ▶ Ärge liigutage küljelt küljele, kukkumisoht!
- ▶ Istumisel ratastooli või WC-potile peab patsienti abistama hooldaja.

Puhastamine ja desinfitseerimine Kõige parem on puhastada kõiki osi niiske lapiga ja kasutada pehmetoimelisi pesuaineid. Ärge kasutage puhastamisel teravaid või abrasiivseid esemeid ega abrasiivseid puhastusvahendeid. Plastosade puhastamiseks soovitame kasutada spetsiaalset plastipuhastusvahendit. Püstposti võib desinfitseerida mõne tavalise kloorivaba desinfitseerimisvahendiga. **Tähtis!** Desinfitseerimisvahendite kasutamisel tuleb järgida tootja kasutusjuhendit. **Käepide ja rihm tuleb vahetada iga kord, kui toodet uuesti kasutatakse või patsienti vahetatakse!. Teave taaskasutamisel:** enne taaskasutamist tuleb voodiohjad alati puhastada ja hooldada, järgides meditsiiniseadmete direktiivi (MDD) nõudeid. Haiglahügieeni ja nakkuste vältimise tagamiseks peab puhastamine toimuma Robert Kochi instituudi (RKI) juhiste kohaselt. **Hooldus** Kontrollige püstposti vähemalt kord kuus, eelkõige pöörake tähelepanu keevisõmblustele ja käepidemele. Kontrollige regulaarselt rihma, defektsed osad tuleb kohe välja vahetada.

Ohutusjuhised

- ▶ Ettevaatust! Pakendi (kilekott) ja toote tõttu on lämbumise ning vigastuste oht, see ei ole mänguasi! Ärge jätke lapsi koos tootega järelevalveta.
- ▶ Voodiohje tohivad kasutada üksnes piisavate vaimsete ja füüsiliste võimetega isikud, keda abistab hooldustöötaja!
- ▶ Toode tohib kokku puutuda ainult terve, vigastamata nahaga.
- ▶ Kontrollige enne voodiohjade kasutamist kindlasti rihma pingust ja käepidet.
- ▶ Ärge kunagi ületage maksimaalset koormust 120 kg.
- ▶ Ärge liigutage küljelt küljele, kukkumisoht!
- ▶ Kandeõlg peab paiknema voodiservaga paralleelselt, mitte sellega risti!
- ▶ Kokkupanek peab toimuma joonisel näidatu kohaselt.
- ▶ Voodiohje võib kasutada üksnes horisontaalsel aluspinnal.
- ▶ Kui osad on kõverdunud, pragunenud või deformeerunud, tuleb voodiohjade kasutamine kohe lõpetada!
- ▶ Voodiohjad ei ole mänguasi! Ärge jätke lapsi koos tootega järelevalveta.
- ▶ Transportimiseks tuleb vahend osadeks lahti võtta!
- ▶ Ärge riputage vahendile mingeid esemeid!

Garantii Seadusest tulenevate garantiinõuete kohaselt. Garantii ei hõlma defekte, mis on tekkinud loomuliku kulumise, tahtliku tegevuse, hooletuse või ebaõige käsitlemise ja kasutamise tõttu, samuti puuduste tõttu, mis mõjutavad toote väärtust või kasutatavust vaid vähesel määral. Me jätame endale õiguse teha muudatusi, mille eesmärgiks on tehnilised täiustused.

INVARU

Tehnilised andmed

Materjal	Toru: pinnatud teras, käepide: plast	Kõrguse reguleerimise rihm:	ligikaudu 34...50 cm (Kaugus konsooli ülaservast käepideme haardepinnani)
Värvus:	hall	Mass:	13 kg
Mõõdmed:	ligikaudu 83 × 76 cm	Kandevõime:	120 kg
Kogukõrgus:	ligikaudu 176 cm	Keskmine kasutusiga:	ligikaudu 5 aastat säilitamisel kuivas ja tolmuvas keskkonnas



Sundo Homecare GmbH, Bahnhofstraße 13, DE-30916 Isernhagen, Internet: <https://www.sundo-homecare.de>



Valentine International Ltd., 8th Floor, No. 149, Sec 2, Ta Tung Road,
221 Hsichih District, New Taipei City, Taiwan R.O.C.



KOMAS Medical Technology GmbH, Sternstraße 67, DE-40479 Düsseldorf



Best Care Consulting GmbH, Kehlhofrain 12a, CH -6043 Adligenswil, Switzerland



Toode ja pakend tuleb viia
jäätmekäitlusele kooskõlas kohalike
jäätmekäitluseeskirjadega.

