



## PAREMAD PÕETAMISTOIMINGUD\*



HOOLDEKODU – KODUHOOLDUS

CONTACT PLUS

Potikõrgendus

Paigaldus- ja kasutusjuhised



HERDEGEN SAS,  
46 bis avenue du Maine  
75015 PARIIS – PRANTSUSMAA  
[qualite@hacare.com](mailto:qualite@hacare.com)

© Autoriõigus 2025 par HERDEGEN SAS – KÕIK ÕIGUSED ON KAITSTUD

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
HERDEGENA SAS jätab toote pideva täiustamises huvides endale õiguse teha selles dokumendis muudatusi nendest ette teatamata.

Dokumendis sisalduv teave on konfidentsiaalne. Seda võib kolmanda poolega jagada üksnes HERDEGEN SASi eelneval kirjalikul nõusolekul. Seda dokumenti ei tohi täielikult ega osaliselt paljundada või edastada ühelgi moel või mis tahes viisil tehniliste või elektrooniliste vahenditega, kopeerimise, salvestamise ega mis tahes andmete väljavõtu või infosüsteemide abil.

Te saate selle dokumendi uue eksemplari ettevõttelt HERDEGEN SAS, kui pöördate meie kohaliku müügiesindaja või vahetult HERDEGEN SASi poole.

Esimene väljaanne: 2024

## TARNIJA



## EESSÕNA

Olete äsja ostnud HACARE'i toote ja meil on hea meel, et olete meie klient. Täname teid veel kord, et usaldate meie ettevõtet ja meie tooteid.

Teie usaldus kinnitab meile, et HACARE täidab endiselt teie konkreetseid nõudeid ja vajadusi. Sellepärast püüame teha pidevalt uuendusi ning pakume teile kvaliteetseid lahendusi ja tooteid, mis teevad patsiendi hooldamise mugavamaks ja kvaliteetsemaks ning hooldaja igapäevatöö lihtsamaks.

Tänu oma funktsionaalsetele ja esteetilistele omadustele on HACARE'i tooted saavutanud paljude spetsialistide ja asutuste usalduse ning neid peetakse nüüd kindlaks etaloniks. Meie tervishoiuvaldkonna elektrilisi tugesid iseloomustab lihtsus, töökindlus ja ohutus.

Te valisite HACARE'i ja meie eesmärk on katta teie vajadused.

Oma tugede nõuetekohane kasutamise eest vastutate siiski teie ise. Seetõttu kutsume teid üles tutvuma tehniliste näitajate ning kasutus- ja hooldusjuhistega. Selleks lugege läbi kasutusjuhend.

HACARE'i meeskond

	Tähiste selgitus
	Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit
	Järgige ohutusjuhiseid
	Tootja nimi ja aadress
	Patsiendi suurim kehakaal
	CE-vastavus
	Meditsiiniseade
	Mass

<u>LADUSTAMINE</u>	Kasutusjuhend peab asuma alati selleks ettenähtud kohas toote läheduses. Kasutusjuhend peab olema kaitstud kõikide tegurite ja ainete eest, mis võivad kahjustada selle loetavust.
<u>STANDARDID JA PATENDID</u>	Potikõrgendused Contact Plus ja Contact Plus Neo on deklareeritud meditsiiniseadmena määruse (EL) 2017/745 kohaselt.

							
Contact Plus Neo - 500200n	11 cm	37 cm	41 cm	38,5 x 35 cm	26 x 21 cm	185 kg	2 kg
Contact Plus Neo - 500250	14 cm	37 cm	41 cm	38,5 x 35 cm	26 x 21 cm	185 kg	2,5 kg
Contact Plus Neo - 500300n	11 cm	37 cm	41 cm	38,5 x 35 cm	26 x 21 cm	185 kg	2,8 kg
Contact Plus Neo - 500350	14 cm	37 cm	41 cm	38,5 x 35 cm	26 x 21 cm	185 kg	3 kg

Palun lugege need ohutusjuhised enne kasutamist hoolikalt läbi ja hoidke edaspidiseks kasutamiseks alles.

## 1. OHUTUSJUHISED, LUBAMATU KASUTAMINE, OHUD

- Pidage toote asjakohaseks sobitamiseks ja kasutamiseks alati nõu oma raviarsti või tarnijaga.
- Ärge kallutage end üle potikõrgenduse serva – kukkumisoht!
- Ärge istuge ega astuge kaanele.
- Ärge hoidke toodet õues ega jätke päikese kätte. (Ettevaatust! Ärge jätke toodet palava ilmaga autosse!)
- Ärge kasutage toodet õues, vaid üksnes siseruumis ja tavalisel WC-potil.
- Kasutage üksnes potikõrgendusena ja ettenähtud viisil: ärge põlvitage tootel ega astuge selle peale, ärge istuge kaanele.
- Pidage alati kinni tootesildil toodud kaalupiirangust.
- Toodet ei tohi mingil viisil muuta. Kasutage purunenud või defektsete osade asendamiseks ainult originaalvaruosi ja laske seda teha spetsialistil.
- Pärast toote kokkupanekut veenduge enne kasutamist, et see oleks kindlalt lukustatud ja kinnitatud.
- Kui te ei ole potikõrgendust pikemat aega kasutanud, laske seda enne taaskasutamist kontrollida spetsialistil.
- Enne kasutamist kontrollige kindlasti stabiilsust.



- Kõikidest seadmega seotud tõsistest vahejuhtumitest peab teatama tootjale ([qualite@hacare.com](mailto:qualite@hacare.com)) ja pädevale asutusele selles liikmesriigis, kus kasutaja ja/või patsient asub.



- Garantii ei kata kahjustusi, mis on põhjustatud meie toodete konstruktsiooni muutmisest, ebapiisavast hooldusest, puudulikust või ebaõigest käsitlemisest või ladustamisest või selliste varuosade kasutamisest, mis ei ole originaalvaruosad. Samamoodi ei kata garantii loomulikule kulumisele alluvaid osi.

## 2. KASUTUSOTSTARVE, NÄIDUSTUSED JA VASTUNÄIDUSTUSED

**Kasutusotstarve** Potikõrgenduse abil tõstetakse WC-poti kõrgus mugavale tasemele, mis kergendab istumist ja tõusmist. Potikõrgendused lihtsustavad tualettruumi iseseisvat kasutamist, säilitades liikumispuudega inimese väärikuse ja privaatsuse. Potikõrgendust võib kasutada nii kodus kui ka hooldekodus.

### Näidustus

- Puudulik kehatüve kontroll, alajäsemete nõrkus
- Tasakaaluhäired, puusaprotees
- Istumis- ja seismisraskused – puusade ja/või lülisamba jäikus

### Vastunäidustus

- Raske kognitiivne häire, raske tasakaaluvõime kaotus, istumisvõime kahjustumine
- Patsiendi kehakaal on toote kandevõimest suurem.
- Muud vastunäidustused: määrab raviarst patsiendi seisundi järgi.

## 3. PAIGALDAMINE

Vale kasutamine või reguleerimine võib toote üle koormata või põhjustada patsiendile lisapinget. Seadet tuleb reguleerida individuaalselt, et see vastaks teie vajadustele. Küsige spetsialistilt, kuidas seda toodet kasutada, ja veenduge, et oleksite selgitustest selgelt aru saanud. Kahtluse korral ärge kartke üle küsida. Ärge kasutage toodet, kui märkate mingit ohtu.

- 1- Tõstke prill-laud üles.
- 2- Suruge potikõrgendust allapoole WC-poti peale, kuni see paika kinnitub.
- 3- Kontrollige, kas potikõrgenduse „huuled“ katavad tualettpoti serva.
- 4- Enne kasutamist kontrollige stabiilsust.
- 5- Puhastamiseks võtke kõrgendus lihtsalt ära ja paigaldamiseks alustage uuesti 1. punktist.

**Rentimine.** Kui toodet on korrapäraselt ja nõuetekohaselt hooldatud, võib selle pärast põhjalikku puhastamist ning desinfitseerimist uuesti välja rentida. Enne uut väljarentimist tuleb hoolduse käigus teha järgmist.

- 1- Visuaalne hindamine: veenduge, et tootel ei oleks defekte ega kahjustusi.
- 2- Funktsioonide hindamine: veenduge, et toote toimimist ei oleks muudetud, ja vajaduse korral tehke see korda.
- 3- Puhastamine ja desinfitseerimine: seda toodet võib puhastada ja desinfitseerida tavapärase majapidamistoodetega, mis ei sisalda kloori.



**Ettevaatust!** See kasutusjuhend kuulub toote juurde ja tuleb igale uuele kasutajale kaasa anda.

## 4. PUHASTAMINE

Potikõrgendust tuleb iga päev puhastada mitteabrsiivse puhastusvahendiga. Seda võib puhastada kloorivaba toote (näiteks Surfanios, Anios Laboratories) või seebiveega. Ärge kasutage söövitavaid või abrasiivseid puhastusvahendeid ega survepesurit. Steriliseerimine on võimalik viie minuti vältel temperatuuril 90 °C (194 °F) ja 80% niiskuse juures.



**Ettevaatust! Ärge kasutage mingeid abrasiivseid vahendeid ega kõrgsurvepesurit, sest need võivad toodet kahjustada.**

## 5. KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

Toote jäätmekäitlus peab toimuma piirkondlike jäätmekäitluseeskirjade kohaselt.

## 6. TEHNILISED ANDMED

Vaadake tabelit leheküljel 6. Toode on biosobiv. Toote ja selle elementide garantiiaja pikkus on sätestatud äritingimustes





46 bis avenue du Maine  
75015 Paris cedex 15 – Prantsusmaa

[www.hacare.com](http://www.hacare.com)

---

PROPRIETE EXCLUSIVE d'HAcare -  
Diffusion et reproduction interdites  
- Visuels non contractuels - HAcare peut  
apporter à ses fabrications toutes  
modifications liées à l'évolution technique.

Edité le : 2025-01-28