

SC KALDTEED

Tooted SC-045, SC-060, SC-090, SC-120, SC-150 ja SC-180

Kasutusjuhend




Kokkuklapitav kaldtee
SC libisemisvastase pinnaga kaldtee alumiiniumist kohvris.
Transportimiseks kokkuklapitud kaldtee.



Kasutatav kaldtee SC-045
tarnitakse ratastoolile
kinnitatavas kotis.



Kokkuklapitav SC kaldtee
kasutusolekus

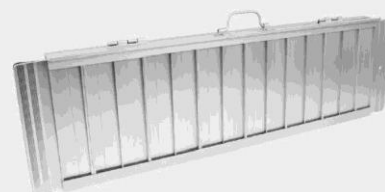

SC kaldteed, millel on
kandekäepide ja mis on
keskel hingedega ühendatud

CE

Sisukord

1.	Sissejuhatus.....	3
2.	Ohutusnõuded	3
3.	Kirjeldus	4
4.	Tehnilised andmed.....	4
5.	Hoodus ja korrashoid	6
6.	Tavalisemad probleemid ja lahendused	6
7.	Toote jäätmekäitlus	6
8.	Garantitingimused	6



1. Sissejuhatus

Täname, et ostsite kvaliteetse Mobilexi toote. Kasutusjuhend sisaldab toote kirjeldust ja tähtsat teavet meditsiiniseadme kasutamise kohta. Selle eesmärk on aidata teil toodet õigesti ja ohutult kasutada. Enne toote kasutamist on väga tähtis need juhised hoolikalt läbi lugeda. Pöörake erilist tähelepanu ohutussuunistele ja järgige neid alati. Mobilex püüab oma tooteid pidevalt parendada ja täiustada. Seetõttu jätame endale õiguse muuta toote spetsifikatsioone ja tehnilisi andmeid neist ette teatamata.

Toote ettenähtud kasutusala

Kasutamiseks ratastoolis või invarolleril olevate inimeste abistamiseks kõrgenduste ületamisel.

Näidustused

Kaldteed on mõeldud kasutamiseks liikumispuudega inimestel, kelle on probleeme kõndimise, seismise või istumisega ning kes on sunnitud kasutama liikumisabivahendeid, nt ratastoole, invarollereid, rulaatoreid jms. Kaldteed on ette nähtud arhitektuuriliste takistuste ületamiseks ja tagavad sujuva ühendus erineva kõrgusega kohtade vahel, kus ratastooli kasutaja peab liikuma. Sel viisil tagavad need ratastooli kasutaja juurdepääsu kohtadesse, mis on kasutaja tavaolukorras ligipääsmatud. Kaldtee on mõeldud kasutamiseks koos abistajaga või iseseisvalt. Kaldtee kasutamine muul kui eespool nimetatud eesmärgil on keelatud.

Vastunäidustused

Vastunäidustusi ei saa seostad konkreetse kliinilise pildiga. Sobiva kaldtee tüübi ja pikkuse valik tuleb alati teha spetsialisti – arsti või füsioterapeudi – abiga. Võtke arvesse 2. punktis toodud ohutusteavet.

Kasutusvaldkonnad

Toodet saab kasutada koduhoolduses, tervishoiu- ja pikaajalise hoolduse asutustes ning haiglates.

Meditsiinilised vahejuhtumid ja soovimatud tagajärjed

Tootega seotud soovimatute sündmuste korral võtke ühendust edasimüüja või tootjaga:

Mobilex A/S		
Grønlandsvej 5	Telefon	+45 8793 2220
DK-8660 Skanderborg	Telefaks	+45 8793 1777
Taani	E-post	info@mobilex.dk

2. Ohutusnõuded

- Tagage, et kõik abivahendit kasutavad isikud oleksid selle kasutusjuhendi läbi lugenud.
- Tootja ei vastuta kasutusjuhendi järgimata jätmisest tuleneva kahju ja/või vigastuse eest.
- Kasutage ainult laitmatus seisukorras olevat toodet.
- Puuduste või vigade avastamisel peate kohe pöörduma edasimüüja poole.
- Järgige kõiki tootja soovitusi ja hoiatusi.
- Võtke arvesse toote sildil olevat teavet.
- Kasutage toodet ainult siin kirjeldatud eesmärgil.
- Vältige abivahendi juures konstruktsiooniliste muudatuste tegemist, välja arvatud juhul, kui teil on tootja kirjalik nõusolek selliste muudatuste tegemiseks.
- Abivahendi reguleerimisel peab kasutaja jälgima, et sõrmed või muud kehaosad ei saaks seejuures muljuda.
- Abivahendit võib kasutada üksnes stabiilsel aluspinnal.
- Abivahendi kasutamisel ei tohi ületada tehnilistes andmetes toodud kandejõudu.
- Kaldteid saab kasutada takistuste ületamiseks, mille kõrgused on vastavalt:

SC-045	9 cm
SC-060	12 cm
SC-090	18 cm
SC-120	24 cm
SC-150	30 cm
SC-180	36 cm
- Olge kaldtee kokku- või lahtiklappimisel ettevaatlik. On oht, et sõrmed jäävad kaldtee osade vahele kinni või saadakse löikehaavu.

Tarnekomplekt

Iga pakend peab sisaldama järgmist: 1 kaldtee, 1 kasutusjuhend.

Esialgne kontrollimine

Veenduge, et kasti sisu vastaks eeltoodud loetelule. Kui avastate selles etapis, et mõni osa puudub või on kahjustatud, võtke kohe ühendust oma tarnijaga.


3. Kirjeldus

Toote kirjeldus

SC kaldteed kujutavad endast alumiiniumist valmistatud kokkuklapitavaid platvorme. Nendel on ribiline libisemisvastane pealispind.

Kaldtee osad

1. Ülemine tugi
2. Kandekäepide (jäab kaldtee alla)
3. Külgmise kaitse
4. Libisemisvastane ribiline pealispind
5. Alumine tugi

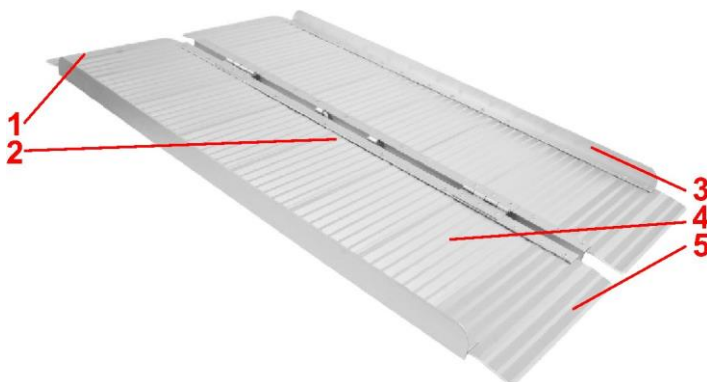

Tööpõhimõte

Kaldtee lahtiklappimine ja kohalepanek

Asetage kaldtee maha ja klappige see lahti nii, et kandekäepide jääks selle alumisele poolele.

Kokkuklappimiseks keerake lihtsalt üks pool teise peale nii, et saaksite kandekäepidemest kinni võtta.

Kaldtee kohalepanek

Pange ülemine tugiosa kõrgemal olevale pinnale ja alumine tugi maapinnale. Veenduge, et kaldtee oleks stabiilses asendis ja paikneks enne kasutamist stabiilsel pinnal.

Kokkupanek

Toode ei vaja kokkupanekuks juhised.


Tarvikud

Kaldtee **SC-045** jaoks on lisavarustusena olemas transpordikott.

4. Tehnilised andmed

SC kaldteed	SC-045	SC-060	SC-090	SC-120	SC-150	SC-180
Pikkus	46 cm	62 cm	92 cm	122 cm	152 cm	182 cm
Laius	77 cm					
Pealispinna laius	76 cm					
Külgmise kaitsme kõrgus	3,5 cm					
Suurim kalle / kõrguste erinevus	12° / 9 cm	12° / 12 cm	12° / 18 cm	12° / 24 cm	12° / 30 cm	12° / 36 cm
Mass	4,50 kg	6,50 kg	9,00 kg	12,00 kg	15,00 kg	18,00 kg
Maksimaalne kandevõime	300 kg					
Mõõtmed kokkupanduna (P x L x K)	46 x 40 x 8	62 x 40 x 8	92 x 40 x 8	122 x 40 x 8	152 x 40 x 8	182 x 40 x 8

Tüübisilt

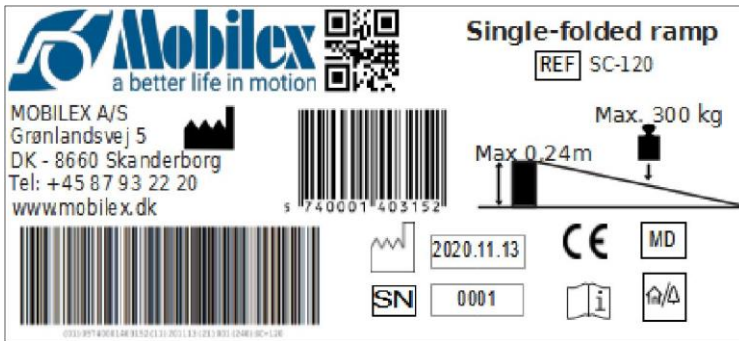

Tüübisildi näide

	QR-kood, link kodulehele		Tootmiskuupäev
	Tootja		Max kandevõime
	Lugege kasutusjuhendit		Partii nr / seerianr
	CE-märgisega toode		Artikli number
	Kasutamiseks sise- ja välitingimustes		Meditsiiniseade
			Suurim kalle / kõrguste erinevus

Sümbolite tähendus

5. Hooldus ja korrashoid

Harilikku määrdumist saab eemaldada tavapäraste puhastusvahendite ja käsna või pehme lapiga. Kontrollige konkreetset tooteteavet ja kasutage ainult kaubanduses müüdavaid vahendeid, mis sobivad puhastamiseks ning desinfitseerimiseks (ärge kasutage alkoholi sisaldavaid tooteid ega lahusteid või küürimisvahendeid).

Toode ei vaja põhimõtteliselt hooldust. Vaatamata tugevale konstruktsioonile ja vastupidavatele materjalidele toode siiski kulub. Seetõttu on soovitatav lasta toodet regulaarselt kontrollida professionaalses hooldusettevõttes. Soovitame lasta:

- ✓ toodet puhastada ja desinfitseerida;
- ✓ raami/toodet kontrollida, ega see ei ole paindunud, kahjustatud, kulunud või korrodeerunud;
- ✓ kontrollida osade kulumist ja vajaduse korral need välja vahetada.

Eeldatav kasutusiga: tavaliselt 10 aastat, kasutusea pikkus oleneb kasutuse intensiivsusest.

Ladustamine: soovitame toodet hoida kuivas kohas temperatuuril üle 0 °C tugeva päikesevalguse eest kaitstult.

Transportimine

Kaldtee saab kokkuklapitud olekus lukustada. Abivahendit tuleb transportida stabiilses asendis ja kinnitatud viisil, mis välistab transportimise ajal ootamatud ning ohtlikud nihkumised.

Korduskasutus

Toode sobib korduskasutamiseks. Enne kui uus kasutaja võtab toote kasutusele, tuleb abivahend tehniliselt üle vaadata ja desinfitseerida 5. punkti kohaselt.

6. Tavalisemad probleemid ja lahendused

<i>Probleemid</i>	<i>Võimalikud põhjused</i>	<i>Lahendused</i>
Kaldtee ei ole stabiilne	Kaldtee ei paikne tasasel aluspinnal	Kontrollige kaldtee asendit. Pange see siledale ja horisontaalsele aluspinnale
Kaldtee ei ole stabiilne	Kaldtee on paigaldatud, alumine külg ülespoole	Kontrollige, kas kaldtee on nõutavas asendis
Kaldteed ei ole võimalik lahti klappida	Lukustusrihm on kinni jäänud	Vabastage lukustusrihm

7. Toote jäätmekäitlus

Toodet ei tohi hävitada koos olmejäätmetega, vaid see tuleb viia kohalikku ringlussevõtukeskusesse.

8. Garantiitingimused

Mobilex A/S annab 2-aastase garantii kahjustuste puhul, mis on põhjustatud tootmisvigadest või materjali defektidest. Garantii ei kehti, kui toodet on kasutatud mittesihipäraselt või remonditud volitamata viisil. Tavapäraselt kuluvad osad ei kuulu garantii alla, välja arvatud juhul, kui kulumise põhjuseks on tootmisviga. Kui toodet on muudetud meie kirjaliku heakskiiduta, kaotavad toote CE-märgis ja garantii kehtivuse. Selle garantiiga hõlmatud tootekahjustuste korral teavitage sellest oma edasimüüjat või otse ettevõtet Mobilex A/S. Garantii ei kata transpordikuluseid ega hõlma kompensatsiooni isikukahjude või toote kasutusvõimaluse puudumise eest remondi ajal. Garantii ei kata kahjusid, mis tulenevad kasutusjuhendi nõuete eiramisest.

Mobilex A/S, Grønlandsvej 5, DK-8660 Skanderborg, TAANI, **SRN: DK-MF-000021885**

Vastavusdeklaratsioon

Käesoleva kinnitame oma ainuvastutusel seadusliku tootjana, et allpool tooteloendis nimetatud tooted vastavad tervishoiu- ja ohutusnõuetele ning on kooskõlas EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU meditsiiniseadmete määruse (EL) 2017/745 (meditsiiniseadmete kohta) sätetega.

Toode on klassifitseeritud I klassi meditsiiniseadmena. Klassifikatsioon põhineb määruse (EL) 2017/745 VII lisa reegli 1 nõuetel.

Tootele on kinnitatud määruse (EL) 2017/745 V lisa nõuetele vastav CE-märgis.

Kavandatud kasutusotstarve

Kasutamiseks ratastoolis või invarolleril olevate inimeste abistamiseks kõrgenduste (nt astmete) ületamisel.

TOODETE LOETELU

KOKKUKLAPITAVAD KALDTEED

VIIDE / toote nr	SC-045	SC-060	SC-090	SC-120	SC-150	SC-180
UDI-DI	5740001403121	5740001403138	5740001403145	5740001403152	5740001403169	5740001403176
PÕHILINE UDI-DI	57400014SC-RAMPSDY					

Kohaldatavad ühtlustatud standardid:

EN 12182:2012, PN-EN ISO 14971:2012, EN 1041:2009

Kui tekib ettenägematu intsident või kahtlus toote rikke, tõrke või defekti kohta, tuleb võtta ühendust edasimüüja või Mobilex A/S-iga.

Thomas Nygaard Christensen
Tegevdirektor
Mobilex A/S
Skanderborg, 29.07.2022



Allkiri