

**POTI- JA DUŠIRATASTOOL**  
**„KAKADU“**  
Art nr 302015, 302018, 302019, 302020

## Kasutusjuhend



Pulberpinnatud valge raami ja 24-tolliste ratastega kiirvabastusmehhanismiga mudel

Standard-variant mudel  
4 lukustatavate  
5-tolliste  
ratastega



Äravõetavad ja reguleeritavad jalatoed ja jalaplaadid



Pehme polüuretaanist iste ja ämbrikate



**CE**

## 1. Sissejuhatus

Täname, et ostsite kvaliteetse Mobilexi toote. Kasutusjuhendis on toote kirjeldus ja vajalik teave meditsiiniseadme kasutamise kohta. Selle eesmärk on aidata teil toodet õigesti ja ohutult kasutada. Enne toote kasutamist on väga tähtis need juhised hoolikalt läbi lugeda. Pöörake erilist tähelepanu ohutussuunistele ja järgige neid alati. Mobilex püüab oma tooteid pidevalt parendada ja täiustada. Seetõttu jätame endale õiguse muuta toote spetsifikatsioone ja tehnilisi andmeid neist ette teatamata.

### Abivahendi ettenähtud kasutusala

Kasutamine on näidustatud inimestele, kellel on piiratud seismisvõime ja alajäsemete vähenenud või puuduvad funktsionaalsed võimed. Poti-duširatastool on meditsiiniline abivahend, mis on eranditult mõeldud istumiseks inimestele, kes vajavad sellist abi peamiselt iseseisva pesemise, dušivõtmise ja roojamise ajal (vannituba/tualettruum peab olema selleks kohandatud). Samuti on olemas ka võimalus patsientide transportimiseks vannituppa või tualettruumi. Abivahend tagab põhimõtteliselt vajaliku funktsionaalsuse ja kergendab märgatavalt nii füüsiliste puuetega isikute kui ka nende abiliste elu. Abivahendit tohib kasutada ainult siseruumides. Mis tahes muul viisil kasutamine on keelatud.

### Näidustused

Viietolliste ratastega poti-dušitooli „Kakadu“ ja selle 24-tolliste plastratastega variandi kasutamine on näidustatud liikumispuuetega inimestele, kellel on raskusi kõndimise, seismise või istumisega stabiilse toeta, mille põhjuseks on alajäsemete struktuurid ja/või funktsionaalsed kahjustused (nt amputatsioon, õnnetustest põhjustatud kahjustused, skeleti-lihassüsteemi või närvi-skeleti-lihassüsteemi kahjustustest põhjustatud liikumishäired). Need abivahendid on mõeldud inimestele, kes ei saa oma puude tõttu teha igapäevaseid hügieenitoiminguid standardsetes dušinurkades või vannitubades ega saa kasutada tavalisi tualettruume isegi pärast nende ümberehitamist.

Peale selle kehtib nelja 5-tollise rattaga standardvariandi puhul: kui kasutaja ei suuda ratastooli ise edasi liigutada (nt käte haaramisfunktsiooni piiratud tugevus või õlavarre/käe puudulik koordinatsioon).

Valikuliste 24-tolliste ratastega variandi puhul: kui õlavarre/käte tugevus ja haaramisfunktsioon on veel piisaval määral säilinud.

### Vastunäidustused

Poti-dušitooli „KAKADU“ ei tohi kasutada isikud, kes ei suuda iseseisvalt säilitada stabiilset istumisasendit.

Poti-dušitooli „KAKADU“ ja selle valikuliste 24-tolliste ratastega variandi puhul:

kognitiivsete häiretega isikuid tuleb abivahendi kogu kasutamise ajal jooksul jälgida ning soovitatav on enne selle kasutamist hinnata konkreetse kasutaja terviseseisundit. Kindla haiguslooga sobiva ortopeedilise abivahendi valik tuleb alati teha eriarsti või füsioterapeudi abiga. Veel tuleb arvestada 2. punktis toodud ohutusteavet.

### Kasutusala

Toodet saab kasutada koduhoolduses, tervishoiu- ja pikaajalise hoolduse asutustes ning haiglates.

### Meditsiinilised vahejuhtumid ja soovimatud tagajärjed

Abivahendiga seotud soovimatute sündmuste korral võtke ühendust edasimüüja või tootjaga:

Mobilex A/S		
Grønlandsvej 5	Telefon	+45 8793 2220
DK-8660 Skanderborg	Faks	+45 8793 1777
Taani	E-post	<a href="mailto:info@mobilex.dk">info@mobilex.dk</a>

## 2. Ohutusnõuded

- Tagage, et kõik abivahendit kasutavad isikud oleksid selle kasutusjuhendi läbi lugenud.
- Tootja ei vastuta kasutusjuhendi järgimata jätmisest tuleneva kahju ja/või vigastuse eest.
- Kasutage ainult laitmatu seisukorras olevat toodet.
- Puuduste või vigade avastamisel lõpetage kohe abivahendi kasutamine ja pöörduge edasimüüja poole.
- Järgige kõiki tootja soovitusi ja hoiatusi.
- Võtke arvesse toote sildil olevat teavet.
- Kasutage toodet ainult siin kirjeldatud eesmärgil.
- Vältige abivahendi ehituse muutmist, välja arvatud juhul, kui tootja on selliseid muutusi kirjalikult lubanud.
- Olge ettevaatlik abivahendi mis tahes osade kokkupanekul või reguleerimisel.
- Abivahendit ei tohi koormata suurema massiga, kui on märgitud tehniliste andmetes.
- Kõik rattad PEAVAD kasutamise ajal olema PIDEVAS kokkupuutes põrandaga. See tagab, et abivahend on korralikult tasakaalustatud ja vähendab õnnetusjuhtumite riski.
- Abivahendit võib kasutada üksnes stabiilsel aluspinnal.
- Seadme kasutamisel statsionaarses asendis PEAVAD pidurid olema rakendatud.
- Ärge seiske jalaplaatidel ega istuge istme serval nii, et jalad toetuksid jalaplaatidele.
- Abivahendit võib kasutada üksnes horisontaalse põrandaga siseruumides, kus puuduvad takistused.
- Säilitage abivahendi kasutamisel alati stabiilne istumisasend. Kasutajat ei tohi jätta hetkekski tähelepanuta. Võtke istmekate ära ainult siis, kui ratastooli kasutatakse tualettruumis.
- Kui istmekate paikneb istmes oleva augu kohal, siis on absoluutselt vajalik panna istme alla ka KAANEGA ämber.

## Tarnekomplekt

Abivahend tarnitakse pappkastis. Pakendis on:

- ✓ 1 põhiraam koos istmega;
- ✓ 1 äravõetav seljatoe raam koos käetugedega;
- ✓ 2 äravõetavat jalatuge;
- ✓ 4 äravõetavat rattakoostu, mis koosnevad rattast, pidurist ja vertikaalsest montaažitorust;
- ✓ 4 polti ja 4 mutrit rattakoostu kinnitamiseks;
- ✓ 1 kaanega hügieeniämber;
- ✓ 1 montaažitööriistade komplekt;
- ✓ 1 kasutusjuhend;
- ✓ 24-tollised plastrattad (valikuline komplekt): 24-tollised plastrattad, komplekt kiirvabastusmehhanismist ja pidurist.

## Esiagne kontrollimine

Kontrollige ülaltoodud nimekirja alusel kasti sisu. Kui avastate selles etapis, et mõni osa puudub või on kahjustatud, võtke kohe ühendust oma tarnijaga.

## 3. Kirjeldus

### Toote kirjeldus

Poti-dušitool „KAKADU“ on varustatud kõigi standardsete detailidega, mis on iseloomulikud tavapärastele poti-dušitoolidele: vahetatav hügieeniämber, seisupidurid, äravõetavad jalatoed, ülesklapitavad käetoed jms. Toode on valmistatud korrosioonikindlatest ja desinfitseeritavatest materjalidest. Raam on valmistatud pulberpinnatud alumiiniumtorudest.

### Abivahend koosneb järgmistest osadest

1. Pehme PU-materjalist seljatugi
2. Ülesklapitav käetugi
3. Seljatoeraam montaažinupp
4. Äravõetav hügieeniämber
5. Pööratav ratas koos piduripedaaliga
6. Eemaldatav istmekate
7. Pehme PU-materjalist iste
8. Jalatugi
9. Jalatoe vabastushoob
10. Jalatoe pikkuse reguleerimispol
11. Ülestõstetav jalaplaat

### Montaaži kirjeldus

- Pange põhiraam põrandale kummuli. Te näete raami vertikaalsete torude otstes nelja ava.
- Lükake rattakoostud torudesse ja kinnitage need soovitud asendis poltidega nii, nagu seda on kirjeldatud osas **Funktsiooni kirjeldus**. Kontrollige, kas need on korralikult paigas, ja proovige neid ära tõmmata. Kui neid saab pöörata, siis kontrollige, kas polt paikneb läbi toru ja rattakoostu, ning keerake polt uuesti kinni.
- Tõstke raam ratastele ja lukustage rattapidurid. Edasise montaaži ohutuse tagamiseks vajutage need jalaga alla.
- Lükake seljatoe torud põhiraami tagaosas olevatesse aukudesse. Keerake ratastooli mõlemal küljel olevad nupud kinni ja veenduge, kas seljatugi oleks stabiilses asendis.
- Pange hügieeniämbrile kaas peale ja lükake ämber juhikudel ratastooli tagaosast istme alla. Kui ämber on kohal, siis pange PU-materjalist iste raamile, vajutage istmeklambrid raamile kinni ja pange PU-materjalist istmele peale äravõetav istmekate. Iste ja istmekate on asendatavad.
- Lükake jalatoe ülemine ots põhiraami eesosas olevasse auku ja pöörake jalatuge raami esiosa poole kuni lukustumiseni. Klappige jalaplaat alla ja korrake toimingut teise jalatoega.

### 24-tollised rattad (tarvikud)

- Võtke ära kaks standardset tagaratast. Selleks toimige vastupidi eelkirjeldatud montaažijuhendile.
- Kõrguse jaoks on olemas kolm seadistust, mis koosnevad kahest kõrvuti olevast august. Sobitage kahe avaga rattakoost soovitud kõrgusele vastavasse asendisse ja veenduge, et laagri korpus jääks raami tagaosa poole (joonis 1). Kinnitage koost torule. Selleks lükake polt läbi koostu ja toru, pange kohale seib ning keerake mutriga kinni. Korrake neid toiminguid ka ratastooli teisel küljel.
- Vajutage 24-tollise ratta keskel olevat kiirvabastusnuppu ja hoidke seda all. Lükake ratta telg koosteplaadi korpusesse ja vabastage nupp (joonis 2). Kontrollige alati, kas rattad on korralikult paigas, ja proovige neid ära tõmmata. Pärast rataste paigaldamist pange kiirvabastusnuppudele peale kuplid (joonis 3).
- Ratta äravõtmiseks eemaldage kuppel, vajutage kiirvabastusnuppu ja tõmmake ratas korpusest välja.
- Pärast 24-tolliste rataste paigaldamist võib osutada vajalikuks reguleerida väikeste esirataste kõrgust osas „Funktsiooni kirjeldus“ toodu järgi. Iste peab alati olema paralleelne põrandaga.
- 24-tolliste rataste jaoks on vajalik paigaldada standardsed seisupidurid, sest need rattad on piduriteta. Pidurikoost koosneb paigaldusklaambrist, pidurimehhanismist ja kahest kinnituspoldist.
- Libistage piduri liugprofiil paigaldusklaambrist väiksesse väljalõikesse. Pange paigaldusklaamber raami horisontaalsele külgtorule. Nihutage liugprofiil asendisse, kus hõõrdtihvt on peaaegu vastu rehvi (joonis 4). Keerake kinnituspoldid kinni, nii et pidur oleks kinnitatud stabiilses asendis.
- Korrake sama montaažitimingut teise ratta puhul.





Joonis 1.  
Raamile kinnitatud rattakoost



Joonis 2.  
Kiirvabastusmehhanismiga  
24-tolline ratas



Joonis 3.  
Kiirvabastusnupu kuppel



Joonis 4.  
Piduri paigaldamine raamile

## Funktsiooni kirjeldus

### Rataste kõrguse reguleerimine

Rataste kõrguse reguleerimiseks võtke välja kõrguse reguleerimise polt, nihutage rattakoostu sisemine toru kohakuti ühe raamis oleva auguga ja lükake polt sealt läbi. Kõrguse jaoks on olemas kolm erinevat seadistust sammuga 2,5 cm, seejuures vastab ülemine kõige madalamale seadistusele.

**HOIATUS!** Kõik neli ratas peavad olema seadistatud samale kõrgusele.

### Rattapidurite ja 24-tolliste rataste pidurite kasutamine

Rattapiduri lukustamiseks vajutage rattakoostu pedaal alla kuni lukustumiseni ja korrake seda toimingut teise ratta juures. Rattapidurite pedaalil lukustusest vabastamiseks tõstke pedaal jalatsinina üles ja korrake seda teise ratta juures.

24-tolliste rataste pidurite rakendamiseks lükake pidurihooba tooli esiosa poole. Pidurite vabastamiseks tõmmake hooba tooli suunas tagasi.

**HOIATUS!** Alati tuleb pidurid rakendada siis, kui kasutaja istub toolil, tõuseb toolilt, tool jäetakse koos kasutajaga järelevalveta või tool pannakse hoiule – eriti kaldpindadel.

**HOIATUS!** Eeltoodud hoiatused kehtivad 24-tolliste rataste pidurite korral! 24-tolliste rataste mõlemad pidurid (tarvikud) peavad olema rakendatud juhul, kui tooli kasutatakse paigalolekus. Neid ei tohi kasutada pidurdamiseks liikumise ajal.

### Istme kõrguse reguleerimine

Istme kõrguse oleneb rataste reguleerimiskõrgusest. Istme kõrguse reguleerimiseks muutke rataste kõrgust.

### Käetugede kasutamine

Kaetugesid saab kergesti üles tõsta ja uuesti alla lükata. See võimaldab kasutajal kergemini ratastooli istuda ja sealt tõusta. Ülestõstetud käetoed lihtsustavad duši võtmise ajal ka hügieenitoiminguid.

**HOIATUS!** Ärge kunagi jätke ülestõstetud käepidemetega tooli järelevalveta siis, kui selles istub keegi.

### Jalatoe funktsioon

- Jalatoe pikkuse reguleerimiseks keerake lahti jalatoe reguleerimispolt. Nihutage jalatugi soovitud pikkusele vastavasse asendisse ja keerake polt kinni. Korrake sama toimingut teise jalatoega.
- Jalatoe eemaldamiseks tõmmake jalatoe vabastushooba. Jalatuge saab ära võtta, kui seda pöörata ja tõmmata ülespoole. Korrake sama toimingut teise jalatoega.
- Jalaplaate saab klappida ülespoole.
- See võimaldab kasutajal kergemini ratastooli istuda ja sealt tõusta, samuti on nii ka lihtsam duši all hügieenitoiminguid teha.

**HOIATUS!** Mitte kunagi ei tohi kasutada äravõetud jalatugedega tooli siis, kui selles istub kasutaja. Ratastooliga sõidu ajal peavad kasutaja jalad olema alati jalaplaatidel.

**HOIATUS!** Jalatugede pikkus peab olema kohandatud kasutaja kasvuga.

**MÄRKUS** Jalatugede pikkus on nõuetekohaselt reguleeritud siis, kui kasutaja istub ratastoolis, reied on istmel ja mõlemad jalad on jalaplaatidel.

### Hügieeniämbri kasutamine

Poti-dušitool on mõeldud kasutamiseks inimestele, kellel on probleeme standardsete tualettruumide kasutamisega.

Poti-dušitooli ämbri kasutamiseks võtke istmekate ära ja tõstke ämber toolist välja. Võtke kaas ämbrilt ära ja pange ämber tooli tagasi. Pärast kasutamist võtke ämber uuesti toolist välja ja asetage kaas ämbrile tagasi. Puhastage ämber enne järgmist kasutamist. Pange ämber tooli tagasi ja pange istmekate uuesti istmele peale. Kui soovite kaanega ämbrit välja vahetada, saate selle osta varuosana (artikkel nr 302101)

### Abivahendi kasutamine standardses tualetis

Tualetis abivahendi kasutamiseks võtke ämber ära, seejärel lükake tool tagurpidi WC-poti kohale ja võtke istmekate ära.

### Turvavöö ja turvapiire (tarvikud)

Turvavöö kinnitamiseks pidage meeles, et selle mõlemas otsas on aasad. Võtke seljatugi ära ja pange aasad ümber seljatoe torude otste. Tõmmake aasad pingule ja veenduge, et vöö lukk jääks ettepoole ja vöö ei oleks keerdus. Pange seljatugi põhiraamile tagasi.

Turvapiire paigaldatakse käetugede ette. Selleks võetakse käetugedelt ära otsakuplid ja keeratakse välja kruvid. Pange turvapiirde montaažitord käetugedesse ja kinnitage seal varem eemaldatud kruvidega. Turvapiirde eemaldamiseks vajutage selle kinnitussõlme nuppe ja tõmmake piire välja, tagasipanek toimub vastupidises järjekorras.

## Tarvikud

Abivahendile saab paigaldada järgmisi tarvikuid (ei kuulu standardvarustusse).

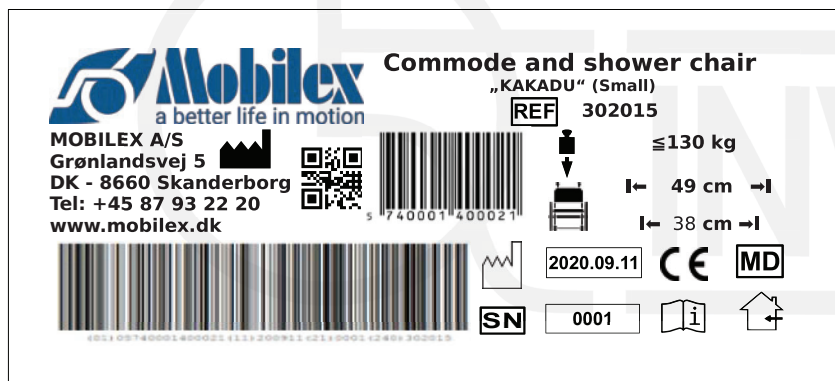
- ✓ Turvavöö
- ✓ 24-tollised tagarattad
- ✓ Amputatsioonikõndi tugi
- ✓ Turvapiire
- ✓ Überminekuvastane vahend
- ✓ Kinnine iste
- ✓ Ümmarguse auguga iste
- ✓ Takjakinnisega seljatugi
- ✓ Ühine jalaplaat
- ✓ Küljetugi
- ✓ Vahtmaterjalist padi
- ✓ Porikaitsmed

## 4. Tehnilised andmed






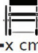

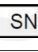

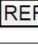
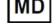
Poti-duširatastool „KAKADU“	Väike Art 302015	Standardvariant Art 302018	Suur Art 302019	XL Art 302020	Rataste vahekaugus 24 tolli
Istme laius	38 cm	45 cm	50 cm	55 cm	–
Istme sügavus	38 cm	43 cm	43 cm	43 cm	–
Istme kõrgus (reguleeritav)	50–55 cm	50–55 cm	50–55 cm	50–55 cm	–
Istme väljalõige	17 × 33 cm	21,3 × 40,5	21,3 × 40,5	21,3 × 40,5	–
Ületatava takistuse kõrgus*	42–47 cm	42–47 cm	42–47 cm	40–45 cm	–
Ületatava takistuse laius*	32 cm	40 cm	45 cm	50 cm	–
Istme/seljatoe kaldenurk	90°/ 12°				–
Käetugede vahekaugus	39,5 cm	46,5 cm	51,5 cm	56,6 cm	–
Seljatoe kõrgus	46 cm				–
Kogulaius	49 cm	56 cm	61 cm	66 cm	+9,5 cm
Kogusügavus	85 cm	93 cm	93 cm	93 cm	+19 cm
Kogukõrgus (reguleeritav)	96–101 cm	96–101 cm	96–101 cm	96–101 cm	–
Kasutaja suurim mass	130 kg	150 kg	150 kg	200 kg	–
Tühimass	11,00 kg	12,90 kg	13,50 kg	14,10 kg	+4,20 kg

\* +5 cm koos uue tarvikuga 30212M

## Tüübisilt



Andmesildi näide

	QR-kood, link kodulehele		Tootmiskuupäev
	Tootja		Kandevõime
	Lugege kasutusjuhendit		Max laius
	Kasutada ainult siseruumides		Seerianr
	CE-tähisega toode		Art-nr
	Meditsiiniseade		

Sümbolite tähendused

## 5. Hooldus ja korrashoid

Hariikkumäärumist saab kõrvaldada tavapärase puhastusvahendite ja käsna või pehme lapiga. Kontrollige konkreetset tooteteavet ja kasutage puhastamiseks ainult kaubanduses müüdavaid sobivaid puhastusvahendeid. Kogu toodet võib desinfitseerida mõne müügiloleva desinfitseerimisvahendiga. Järgige desinfitseerimisel alati tootja antud ohutus- ja kasutusjuhiseid.

Rattaid võib puhastada kuuma vee ja pehmetoimelise puhastusvahendiga. Pärast puhastamist tuleb rattalaagreid õlitada regulaarselt või siis, kui rattad hakkavad kriuksuma.

Vaatamata tugevale konstruktsioonile ja vastupidavate materjalide kasutamisele toode siiski kulub. Seetõttu on soovitatav lasta toodet regulaarselt kontrollida professionaalses hooldusettevõttes. Soovitatavad hooldustoimingud:

- ✓ toote puhastamine ja desinfitseerimine,
- ✓ raami kontrollimine paindumise, kahjustuse, kulumise või korrosiooni suhtes,
- ✓ vajaduse korral kuluvate osade kontroll ja vahetamine,
- ✓ kõikide osade ühenduste tugevdamine.

## Ämbri puhastamine

Ämber tuleb pärast kasutamist tühjendada ja desinfitseerida. Ärge kasutage selleks vett, mille temperatuur on üle 80 °C.

Aurpuhasti/autoklaavi kasutamisel: võtke ämbrit ära sang ja puhastage ämber, seejärel pange see maha. Ärge kasutage ämbri puhastamiseks aurpuhasti/autoklaavi üle 10 minuti. Deformeerumise vältimiseks ärge pange ämbrit puhastamise ajaks viltu.

**HOIATUS!** Kui toode puutub kokku väga kareda veega, võib tekkida katlakivi, mis võib koguneda rattalaagritesse ja teistesse liikuvatesse osadesse. Sel juhul võib toodet puhastada katlakivi eemaldusvahendiga ja seejärel määrada.

**HOIATUS!** Klooriühendite suure sisaldusega keskkonnas võib ilmnedä väga tugev korrosioon ja see tühistab garantii.

**HOIATUS!** Kui raam on paindunud või purunenud, ei ole võimalik toodet taastada, vaid see tuleb asendada.

**Soovitav kasutusiga** Tavaliselt 10 aastat. See sõltub kasutuse intensiivsusest.

**Hoiulepanek** Soovitame hoida kuivas kohas temperatuuril üle 0 °C.

### Transportimine

Soovitav on abivahend transportimiseks osadeks lahti võtta. Abivahendit tuleb transportida stabiilses asendis ja kinnitatuna viisil, mis välistab transportimise ajal ootamatu ning ohtliku liikumise.

Kui toodet tuleb transportida osaliselt lahtivõetuna, on soovitatav eemaldada jalatoed ja tõsta toodet istme külgtorudest.

### Korduskasutus

Toode sobib korduskasutamiseks. Enne kui uus kasutaja võtab toote kasutusele, tuleb abivahend tehniliselt üle vaadata ja desinfitseerida 5. punkti kohaselt.

## 6. Tavalisemad probleemid ja lahendused

Probleemid	Võimalikud põhjused	Lahendused
Tool ei ole stabiilne ja pole võimalik tagada horisontaalset asendit	Rattad on reguleeritud erinevale kõrgusele	Reguleerige kõik rattad samale kõrgusele
Rattad ei pöörle sujuvalt ja kergesti	Ratta ja kahvli vahel on kogunenud mustus	Puhastage ratta ja kahvli vahe kõigist kõrvalistest objektidest ning elementidest

## 7. Toote jäätmeäitlus

Toodet ei tohi saata jäätmeäitlusesse koos olmejäätmetega, vaid see tuleb viia kohalikku utiliseerimiskeskusesse.

## 8. Garantiitingimused

Mobilex A/S annab 2-aastase garantii kahjustuste puhul, mis on põhjustatud tootmisvigadest või materjali defektidest. Garantii ei kehti, kui toodet on kasutatud mittesihipäraselt või remonditud volitamata viisil. Tavapäraselt kuluvad osad ei kuulu garantii alla, välja arvatud juhul, kui kulumise põhjuseks on tootmisviga. Kui toodet on muudetud meie kirjaliku heakskiiduta, kaotavad toote CE-märgis ja garantii kehtivuse. Selle garantiiga hõlmatud tootekahjustuste korral teavitage sellest oma edasimüüjat või otse ettevõtet Mobilex A/S. Garantii ei kata transpordikuluseid ega hõlma kompensatsiooni isikukahjude või toote kasutusvõimaluse puudumise eest remondi ajal. Garantii ei kata kahjusid, mis tulenevad kasutusjuhendi nõuete eiramisest.

## 9. Vastavusdeklaratsioon

Seade on vastavuses ELi määrusega MDR 2017/745 meditsiiniseadmete kohta, on läbinud vastavushindamise ja kannab CE-märgist. Toote kohta välja antud vastavusdeklaratsioon on kättesaadav aadressil:

[mobilex.dk/medias/2021-05/ce\\_kakadu\\_302015\\_302018\\_20\\_7233.pdf](http://mobilex.dk/medias/2021-05/ce_kakadu_302015_302018_20_7233.pdf)

või paremal oleva QR-koodiga.

