

## Teie RELAX ratastoolipadja kasutusjuhend

RELAX pakub ratastoolikasutajatele ja piiratud liikuvusega inimestele, kellel on suur lamatiste tekkimise oht, täielikku pinget leevendavate patjade sarja. Sari on loodud nii, et see jagab keharaskuse ümber ja pakub seeläbi nii suurepärast surve leevendust kui ka kehahoiaku toetust. RELAX pakub mugavamaks muudetud toote paigaldamist, suurepärast pingeleevendust ning taskukohast optimaalset mugavust, parandades ühtlasi ka kasutaja elukvaliteeti.

- ◆ Soovitame kasutada iga RELAX patja koos kaasasoleva kattega.
- ◆ Kontrollige, et padja tagumine külg oleks märgitud osaga vastu tooli seljatuge ning padja pealne külg asuks märgitud osaga ülespoole, nagu on näidatud ka etiketil.
- ◆ Vältige lisapehmenemise või katete kasutamist, sest need võivad padja mõju vähendada.
- ◆ Sisemist patja tuleb regulaarselt kontrollida – kui see on kahjustunud, ei ole seda soovitatav kasutada.
- ◆ Ka rikutud katet ei ole soovitatav kasutada.
- ◆ Katte padjale pealetõmbamisel kontrollige, et padja ja katte pealne külg oleksid kohakuti.
- ◆ On väga oluline, et kasutaja asendit muudetakse regulaarselt.
- ◆ Maksimaalse tööea tagamiseks on soovitatav patja hoida selle karbis.
- ◆ Kui Teie RELAX padi on kokku puutunud äärmuslike temperatuuridega ( $-20^{\circ}\text{C}$  või  $+40^{\circ}\text{C}$ ), laske sellel enne kasutamist toatemperatuur taastada.
- ◆ Patja ja katet tuleb puhastada enne teistele kasutajatele andmist, et vältida nakkuste levikut.
- ◆ RELAX ratastoolipadjad omavad garantiid tootmisvigade suhtes 2 aasta vältel alates tootmiskuupäevast.

### Hooldusjuhend

- ◆ **Väline kate:** Masinpesu  $60^{\circ}\text{C}$  juures. Kuivatage tasasel pinnal. Mitte tsentrifuugida.
- ◆ **Sisemine kate:** Sisemist katet saab puhastada niiske riidelapi abil õrna desinfitseerijaga ning seda tuleks puhastada regulaarselt.

### Kõrvaldamise juhised

- ◆ Kasutuselt kõrvaldamine peab olema kooskõlas kõikide riiklike ja piirkondlike seaduste ja regulatsioonidega. Kõik Teie RELAX padja pakkematerjalid on ümbertöödeldavad.
- ◆ Kui Teie RELAX ratastoolipadjaga peaks siiski mistahes probleeme tekkima, võtke palun ühendust enda kohaliku edasimüüjaga. Enne toote tagastamist tuleb kate pesta ning sisemine padi desinfitseerida enne, kui see pannakse suletavasse kilekotti.
- ◆ Kui Teil on mingeid küsimusi või kommentaare seoses RELAX tootesarjaga, võtke palun ühendust enda kohaliku edasimüüjaga.



## RELAX Gelcell padja täispumpamise juhis

- 1) Pumbake Gelcell padi täis kaasasoleva pumbaga nii, et see tundub katsumisel kõva. Kui padi on kõva, siis **ärge enam pumbake, sest liigne pumpamine kahjustab patja. (Vaadake jooniselehte 3.)**
- 2) Kontrollige, et padi oleks asetatud ventiiliga tooli seljatoe poole.
- 3) Enne kasutaja padjale aitamist pigistage ventiili, et õhku välja lasta, ning jätkake seda tegevust kasutajat padjale aidates seni, kuni õhku enam ei välju – kui õhurõhk padja sees ja väljaspool on võrdne.
- 4) Kasutaja istub nüüd padjal sirges asendis, mis tagab selle, et selg on sirge ning nurk puusade ja põlvede vahel on nii ligilähedane 90 kraadile kui võimalik.
- 5) Pigistage ventiili uuesti ning laske õhku välja umbes 2 sekundi jooksul või seni, kuni padi kasutaja jaoks kõige mugavam tundub. Õhku välja lastes muudab padi enda kuju vastavalt kasutaja kehakujule.
- 6) Asetage enda käsi kasutaja keha kõige kondisema osa alla. Kaugus kasutaja kondise kehaosa ning padja põhja vahel ei tohiks olla väiksem kui 1,5 cm.
- 7) Gelcell on nüüd õiges asendis.
- 8) **Seda, kas padi on piisavalt õhuga täidetud, tuleb regulaarselt kontrollida, kasutades ülalkirjeldatud 1,5 cm testi.**

### Gelcell G2/Gelair Contour

Järgige eelnevalt väljatoodud punkte 1 kuni 8 padja mõlemal küljel, **välja arvatud punkt 5**, saavutamaks RELAX Gelcell G2/Gelair Contour ratastoolipadja õige rõhu taseme.

#### OLULISED MÄRKUSED

- ◆ Kontrollige alati, et padi oleks korralikult õhuga täis pumbatud ning et see kasutajat toetaks – nii, et ta ei puuduta kunagi padja põhja.
- ◆ Kui **Gelcell** padja kasutajaid on mitu, järgige iga kord kasutajat vahetades eelnevalt kirjeldatud punkte.
- ◆ **Gelcell padjaga koos tuleks alati kasutada ka katet.**
- ◆ Palun hoidke käesolevat kasutusjuhendit kindlas kohas, et Te seda ka hiljem lugeda saaksite.