

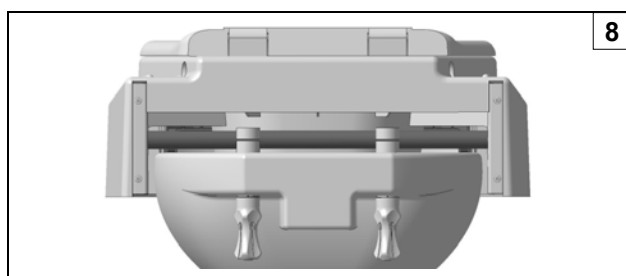
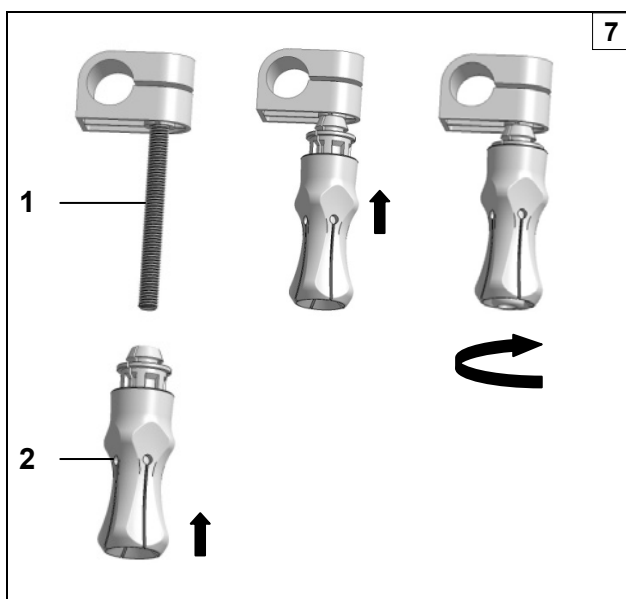
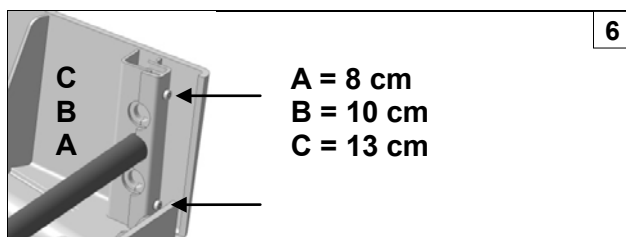
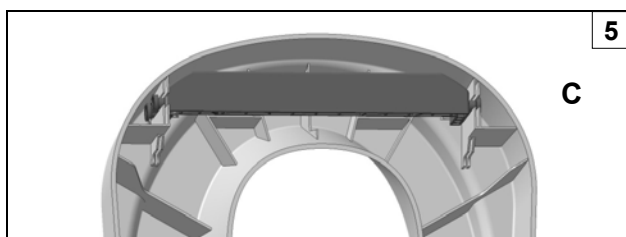
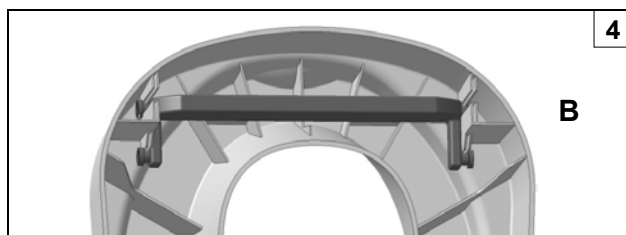


ET
Potikõrgendus
Kasutusjuhend

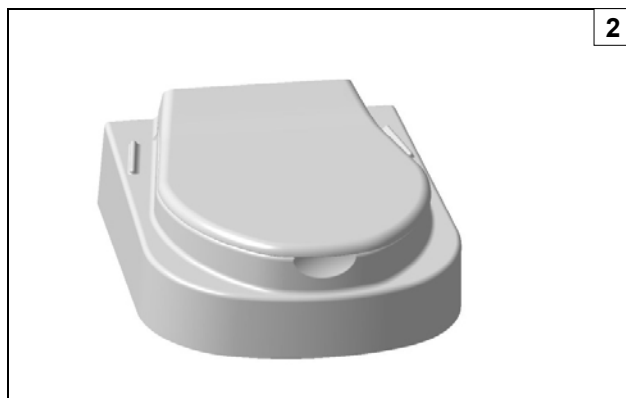

eureha GmbH
Zeppelinstrasse 10 D-88353 Kisslegg

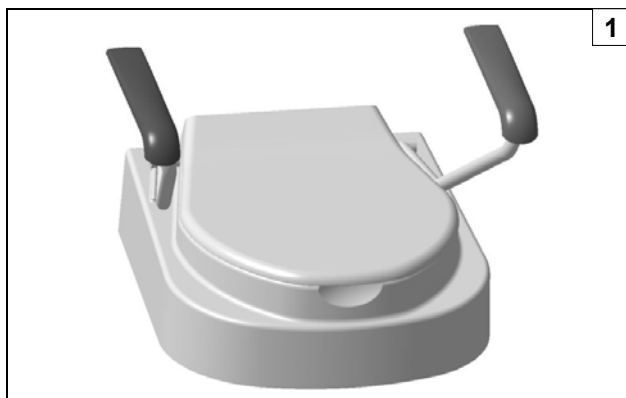

 eureha GmbH
Zeppelinstrasse 10 D-88353 Kisslegg

MODELL: 700110

 relaxonstar

LOT 214203 2617



130 kg



2017-34

Made in Germany

ET**1 Üldised juhised****1.1 Sissejuhatus**

Selles kasutusjuhendis on esitatud teave kõrgendatud tualetiistme ohutu ja õige kasutamise kohta. Enne kõrgendatud tualetiistme kasutamist lugege kasutusjuhend tähelepanelikult läbi ja järgige juhiseid. Hoidke kõiki dokumente turvalises kohas.

1.2 Ettenähtud kasutamine

Potikõrgendus on ette nähtud ainult tualetiistme kõrgendamiseks, mistõttu tuleb see paigaldada tualetipotile. Igasugune muu kasutamine on keelatud.

1.3 Kasutuselt kõrvaldamine

Vanad seadmed ja pakendid tuleb kehtivate riiklike eeskirjade kohaselt kasutuselt kõrvaldada ja ringlusse võtta.

1.4 CE-märgis

Toode vastab meditsiiniseadmete direktiivile 93/42/EMÜ.

1.5 Korduskasutamine

Toode sobib korduskasutamiseks. Korduskasutamise kestus oleneb toote seisukorrast. Enne korduskasutamist järgige tootja korras- ja hügieenjuhiseid ning kontrollige ka toote tehnilist ja funktsionaalset ohutust.

1.6 Tööiga

Toote kavandatud tööiga on vähemalt 5 aastat, kui seda kasutatakse ettenähtud otstarbel ning järgitakse kõiki puhastus- ja ohutusjuhiseid. Tööiga saab pikendada toote ettevaatliku käsitsemise, hooldamise ja kasutamisega.

2 Ohutusjuhised

Ärge koormake potikõrgendust üle (max koormus: 130 kg). Seinale paigaldatud tualetipoti korral ärge ületage tualetipoti lubatud koormust. Veenduge, et potikõrgendus ja tuharad on enne tualeti kasutamist kuivad.

Käetugedega mudeli korral jaotage raskus käetugedele ühtlaselt. Ärge toetage käetugedele kogu keharaskust.

Ärge kasutage potikõrgendust, kui istme tugi on kahjustatud.

Veenduge, et eesmine kõrguse seadevarras on haakunud ja tagumine kõrguse seadevarras on kruvidega kinnitatud.

Veenduge, et potikõrgendus on kruvidega tualetipotile kinnitatud.

Potikõrgendust ei tohi hoida temperatuuril üle +85 °C.

Kontrollige toodet regulaarselt kahjustuste ja ohutu paigalduse suhtes.

3 Kirjeldus

Potikõrgendus on saadaval järgmiste versioonidena:

- käetugedega (joonis 1);
- ilma käetugedeta (joonis 2).

3.1 Tehnilised andmed

Vaadake peatükki „Tehnilised andmed” kasutusjuhendi lõpus.

3.2 Istme kõrguse reguleerimine

1. Olenevalt istme soovitud kõrgusest paigaldage eesmine kõrguse seadevarras asendisse A, B või C (vt joonis 3, 4, 5).
2. Vabastage tagumise kõrguse seadevarda 4 kruvi (vt joonis 6).
3. Sisestage tagumine kõrguse seadevarras ühtlaselt (vt joonis 6).
4. Keerake 4 kruvi käega kinni (vt joonis 6).

3.3 Kõrgendatud tualetiistme kinnitamine

1. Viige kiirlukkude vardad (1, joonis 7) õigesse asendisse, nii et vardad saab juhtida läbi tualetipoti avade.
2. Asetage potikõrgendus tualetipotile. Selle käigus juhtige vardad läbi avade.
3. Suruge kiirlukkude alumine ots (2, joonis 7) kokku ja lükake need varrastele, kuni need puutuvad tualetipotiga kokku.
4. Vabastage kiirluku alumine ots, lükake kiirlukku ülespoole ja seejärel pingutage seda käega (joonis 7).
5. Käetugedega mudeli korral lükake käetoed hoidetoruks. Veenduge, et vedrukinnitid haakuksid.

3.4 Kõrgendatud tualetiistme eemaldamine

1. Vabastage kiirlukk ja seejärel suruge ülemine ots kokku ja tõmmake kiirlukku allapoole.
2. Tõmmake kiirlukk vardalt ära ja eemaldage potikõrgendus.

3.5 Tualetiistme ja kaane eemaldamine

1. Pöörake tualetiiste ja kaas 45° nurga all ülespoole ning tõmmake ühtlaselt ülespoole ja ära.

3.6 Käetugede eemaldamine


1. Pöörake käetoed 90° nurga all ülespoole. Käetoe lukk avaneb automaatselt.
2. Tõmmake käetugi hoidetorult ära.

4 Hooldamine ja puhastamine

Toodet võib puhastada ja desinfitseerida tavapäraste vahenditega. Ärge kasutage lahusteid sisaldavaid puhastusvahendeid. Kasutage desinfitseerimisvahendeid vajaduse järgi ja ka siis, kui istet kasutab rohkem kui üks isik. Järgige desinfitseerimisvahendi tootja juhiseid. Nimetatud puhastus- ja ohutusjuhiste järgimisel on toode hooldusvaba. Pärast puhastamist kuivatage potikõrgendus puhta lapiga.

Laske vajalikud parandustööd teha volitatud töökojas.

Tehnilised andmed

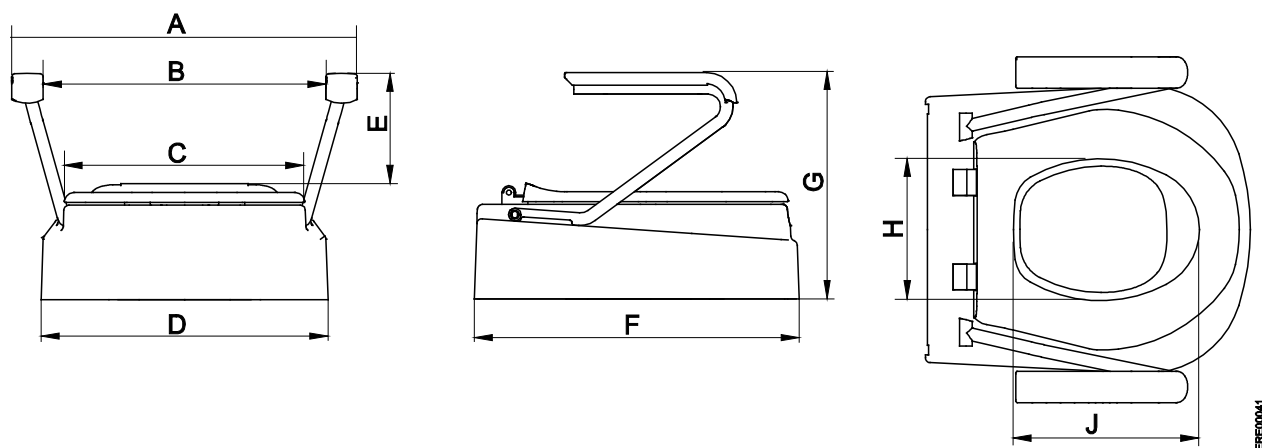

Mõõtmed	
A	580 mm
B	480 mm
C	390 mm
D	455 mm
E	185 mm
F	510 mm
G	350 mm
H	225 mm
J	295 mm

Toote mass käetugedega ja ilma	5,4 kg / 3,6 kg
Max koormus	130 kg
Värvitoon	Valge