

Urolis

TAGASIVOOLU TAKISTAVA SÜSTEEMIGA (lekkekindel) URIINIPUDEL 43240


Kasutajale tagatud mugavus ja hügieen.

kummitihendiga
väljalaskekork


Mõõteskaala;
maht 1,5 l

lõhna levikut takistav
turvakaas


ergonoomiline käepide

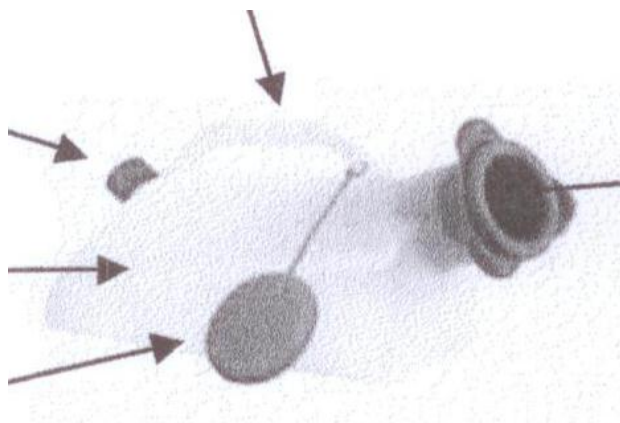

Uus sulgemis- ja
avamissüsteem
kergesti lahtivõetav;
tagasivoolu takistav süsteem

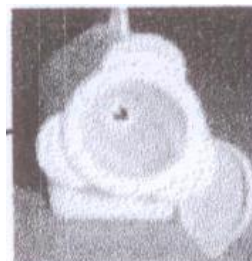

tagasivoolu takistav süsteem

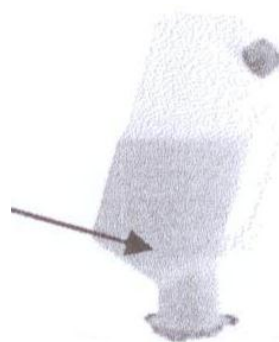

KÄSITSEMININE

- Lahtikeeratav kork uriini praktiliseks ja kiireks väljavalamiseks.
- Tänu ringsüsteemile lihtsalt lahtikeeratav, tagasivoolu takistav süsteem.
- Lekkekindluse tagamiseks on kaant lihtne avada ja sulgeda, takistab lõhna levikut.
- Meeldiva ergonoomilise kujuga.
- Steriliseeritav temperatuuril 130 °C.
- Korduvkasutatav.
- Lekkekindel.


KOOSTIS: polüetüleen

PUHASTAMINE

Võtke kaas pealt ära.



Pöörake ringsüsteem ringi ja
eemaldage tagasivoolu takistav
süsteem.

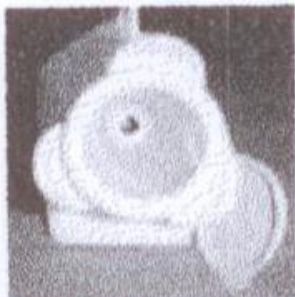

Keerake väljalaskekork lahti.



Urolist võib **130 °C juures autoklaavis** steriliseerida või **vee** ja pesta **kauplustes müüdava puhastusvahendiga**.