



710 mm (27 3/4")







<60 kg (132 lb)



Kudu kasutusjuhend

EN 12183
ISO 7176-19

2021-01-rev 20

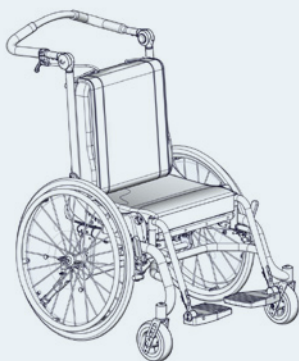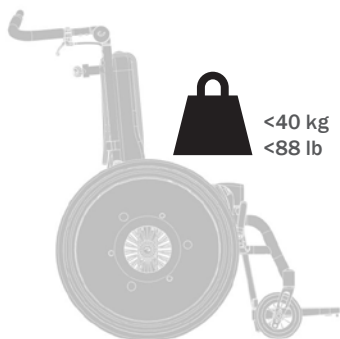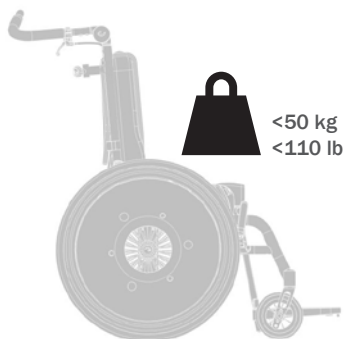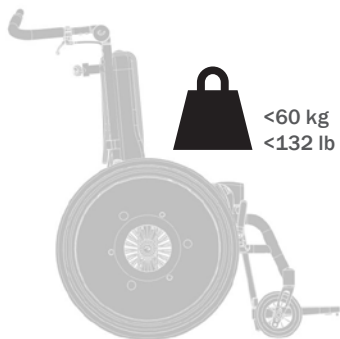**KUDU 1****KUDU 2****KUDU 3+4**



1.



2.




3.




05



4.

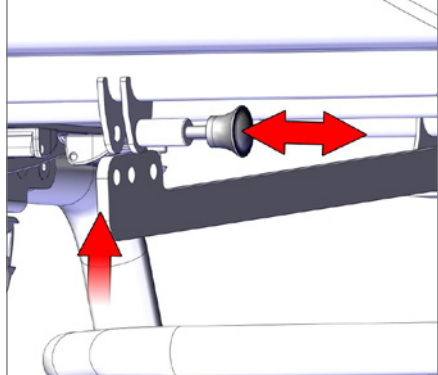

5.

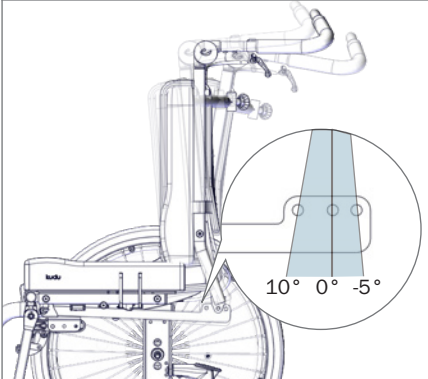

6.





1.




2.




3.

 05

4.

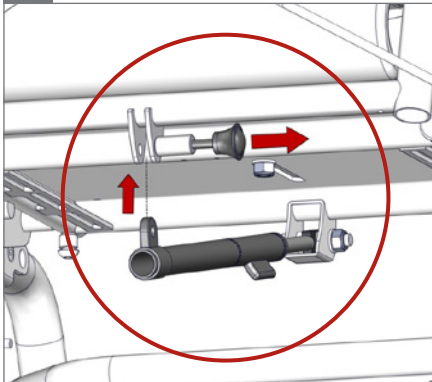

5.

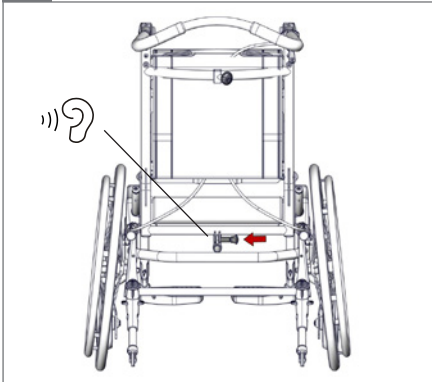

6.






1.




2.

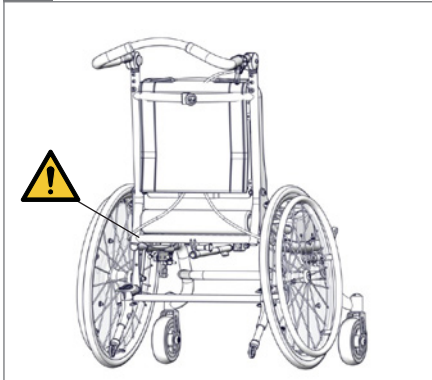 05

3.




4.

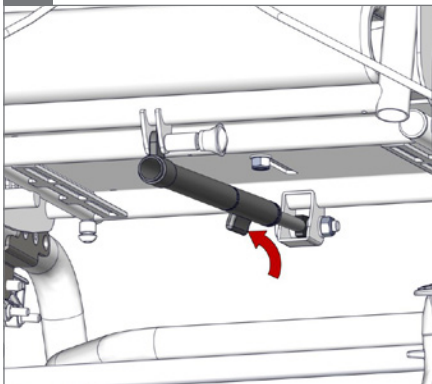

5.




6.

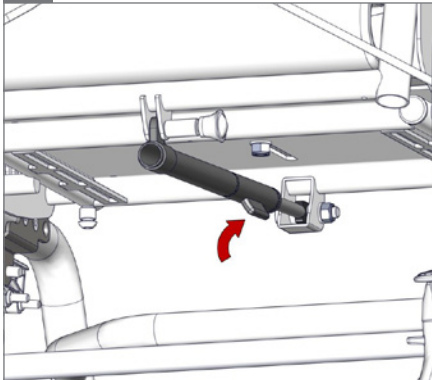





1.

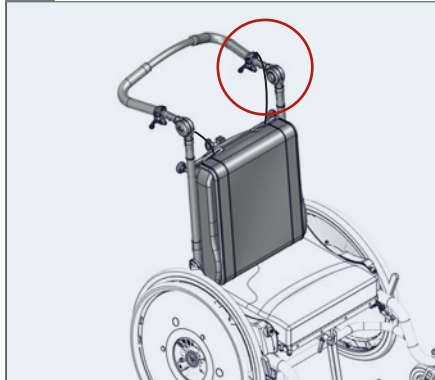


2.

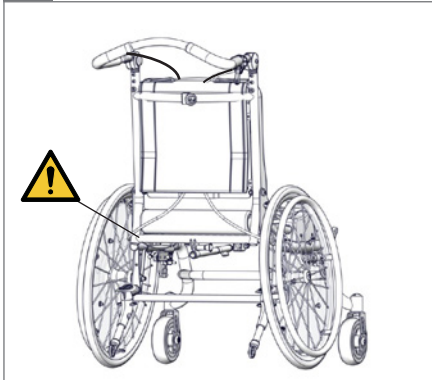 05


3.

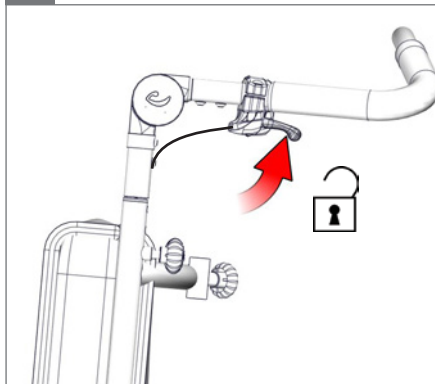

4.

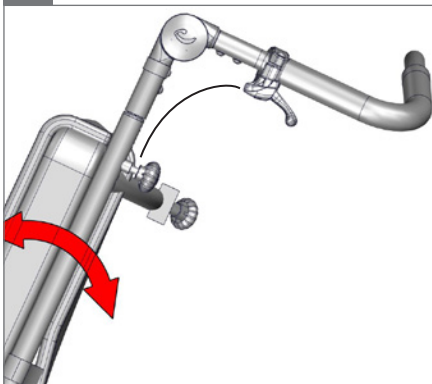

5.

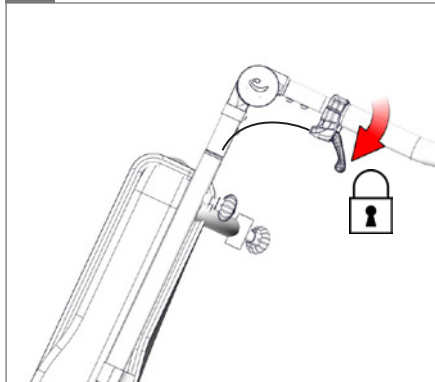



1.




2.



3.




4.

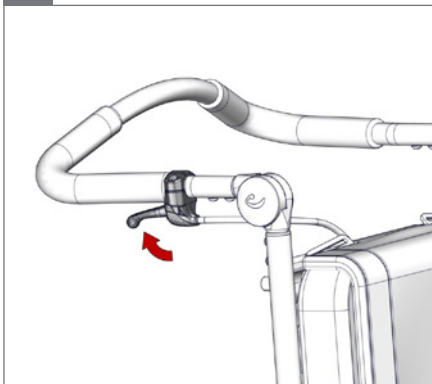

5.


 05

6.

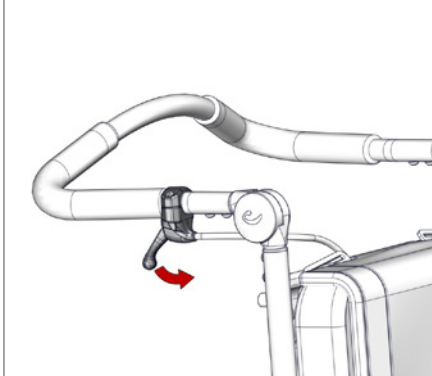




1.

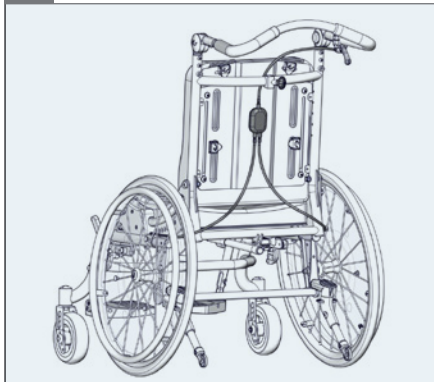


2.

 05


3.

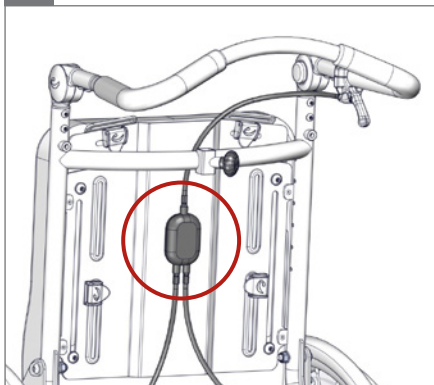


4.

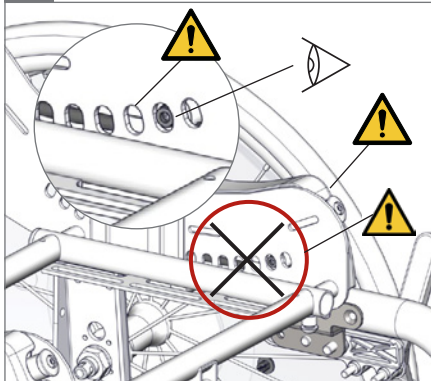  01, 05

5.

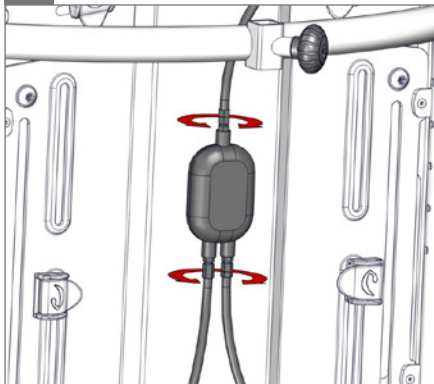


6.

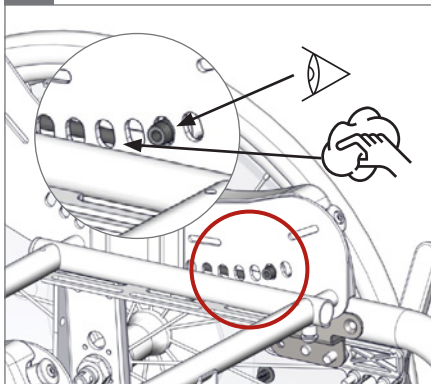




1.

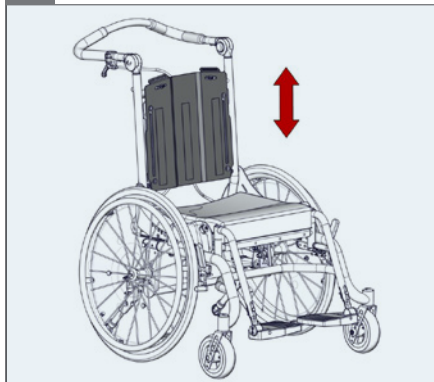


2.

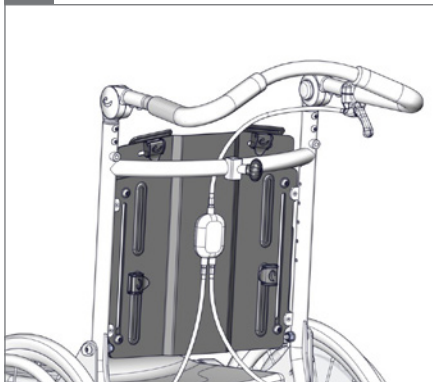


3.

○ 5 mm

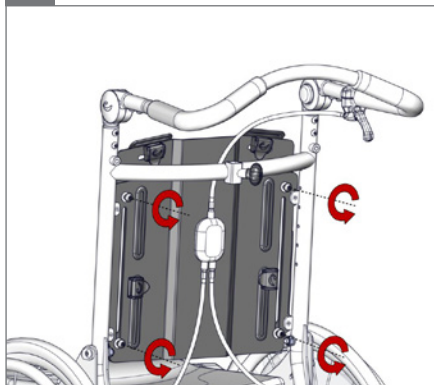


4.

⚠ 01

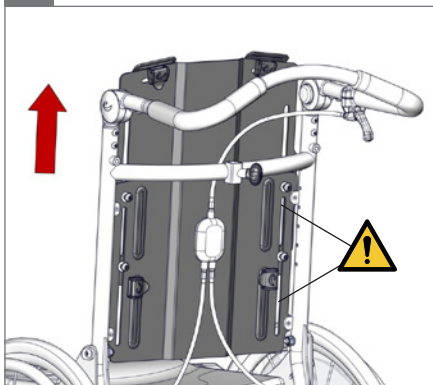

5.

○ 5 mm

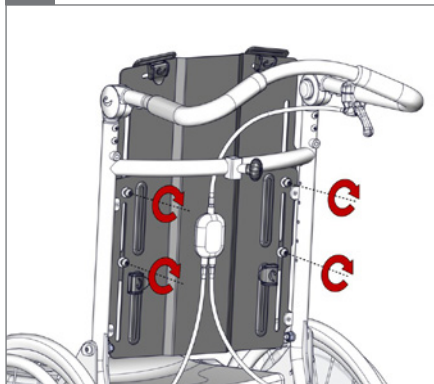

6.






1.




2.

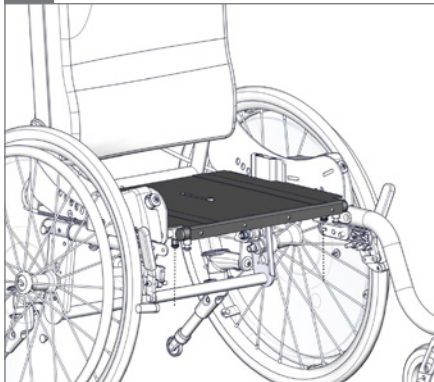


3.

○ 5 mm

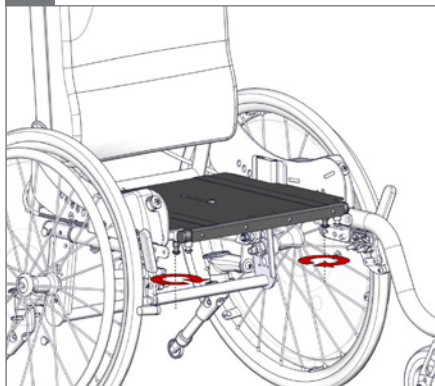


4.

⚠ 05

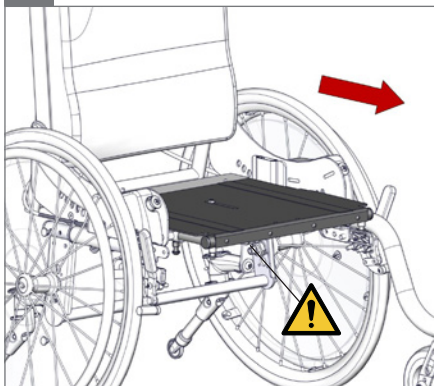

5.

○ 5 mm - 2,5 Nm

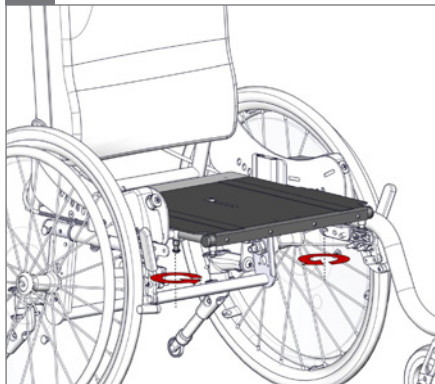

6.





1.



2.



3.



05



4.



5.



6.





1.



2.



3.



4.



5.



6.







1.




2.

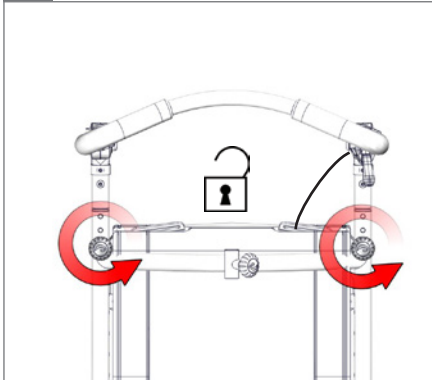

3.

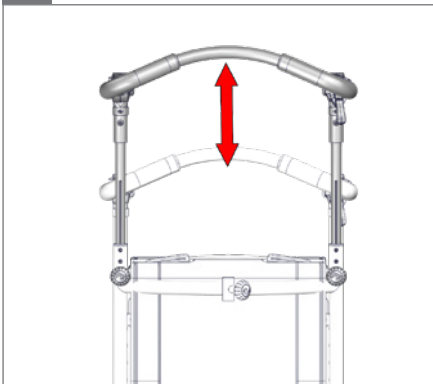


4.

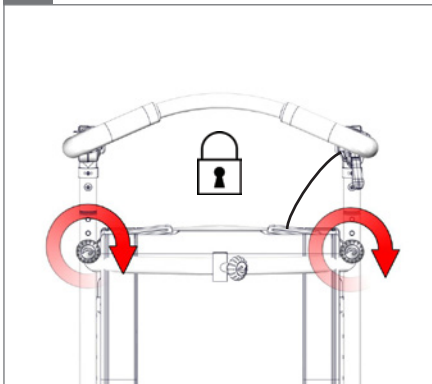





1.

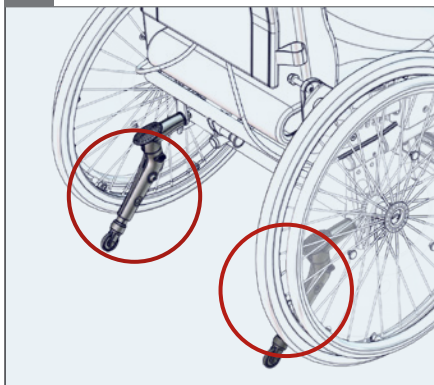

2.

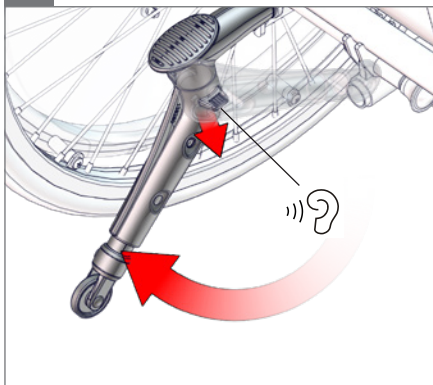


3.

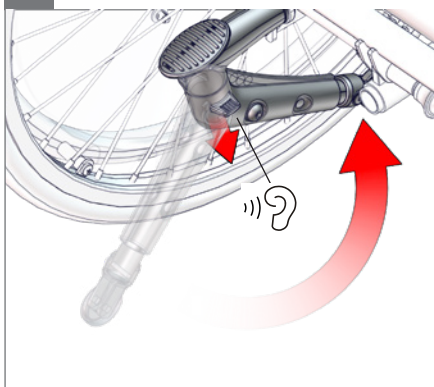


4.

⬡ 5 mm

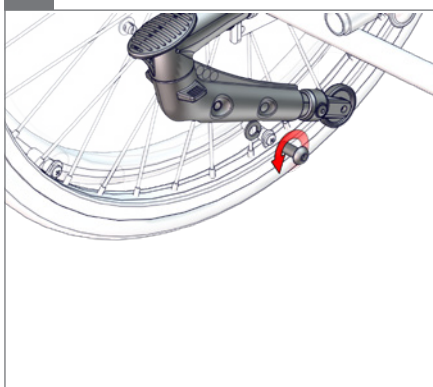


5.

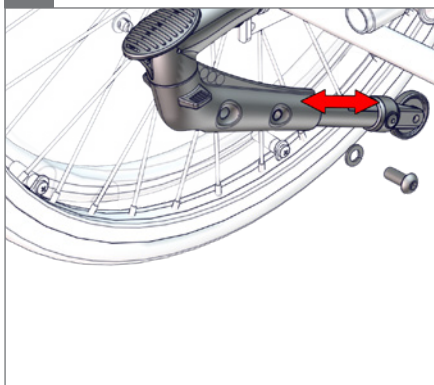

6.

⬡ 5 mm

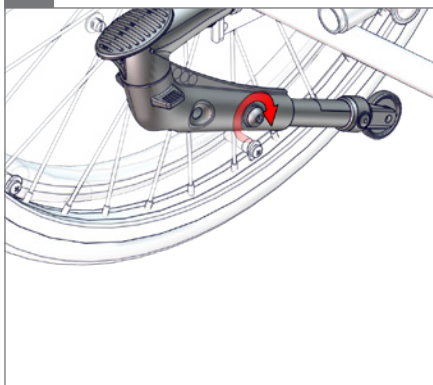





1.




2.

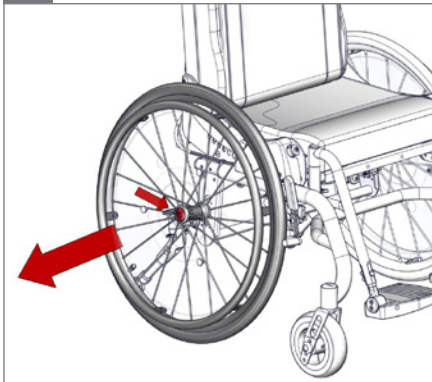


3.

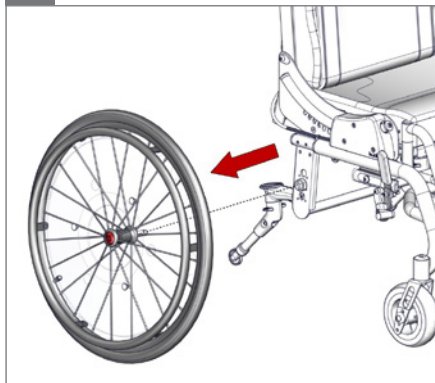


4.

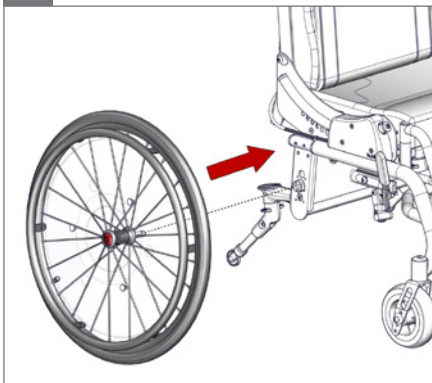

5.

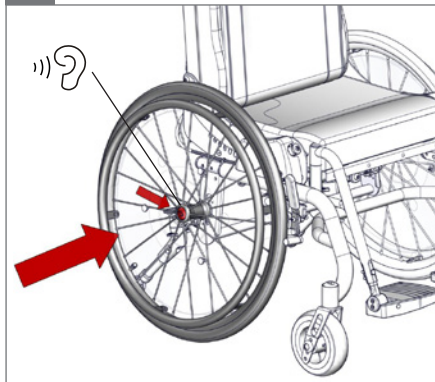


6.

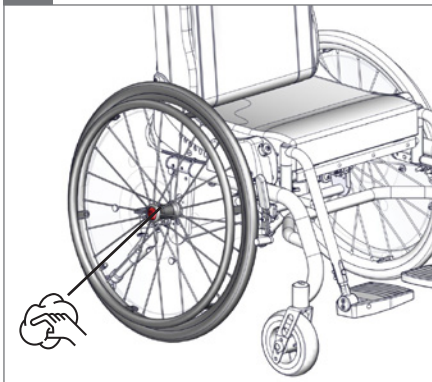




1.

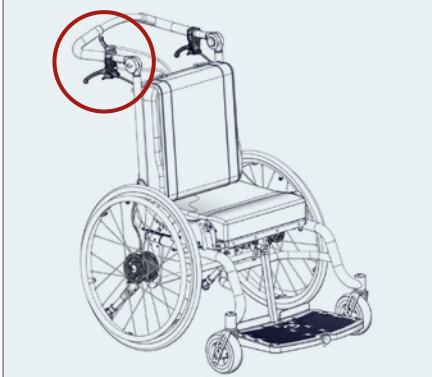


2.




3.

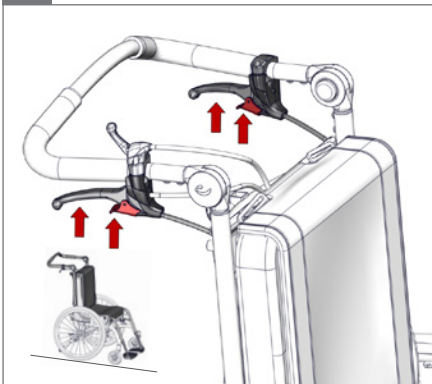


4. Trummelpidur

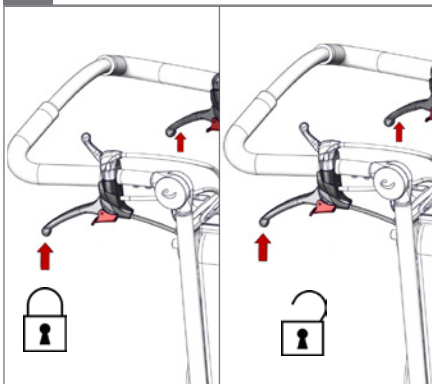

5. Trummelpiduri kiiruse vähendamine

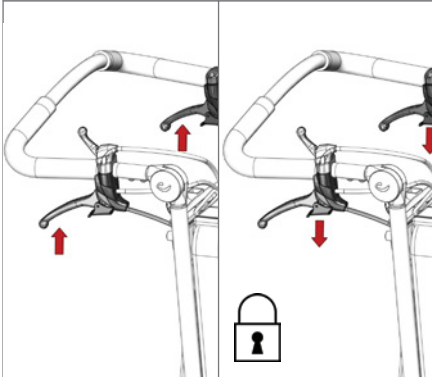


6.

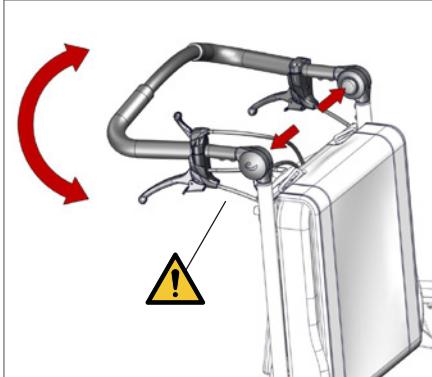




7.

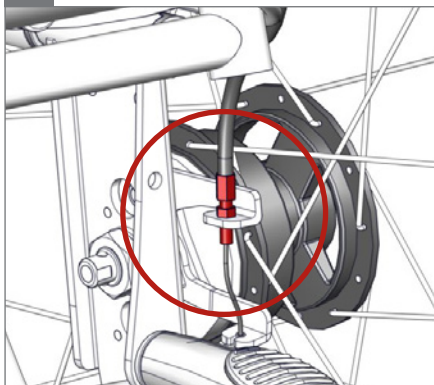


8.


8 mm

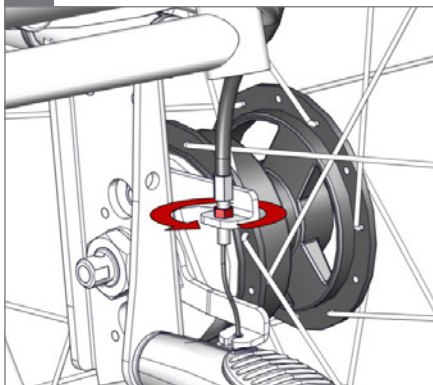

9.

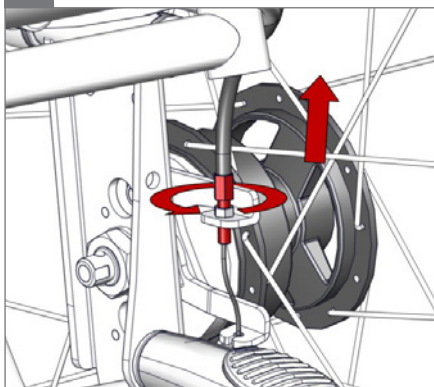


10.

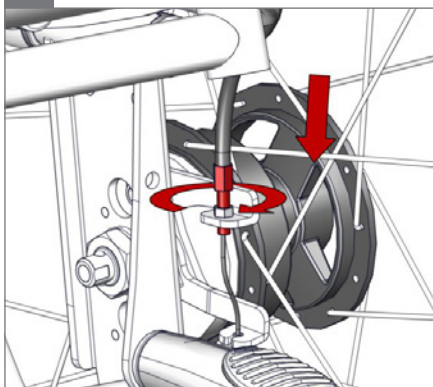


11.

8 mm

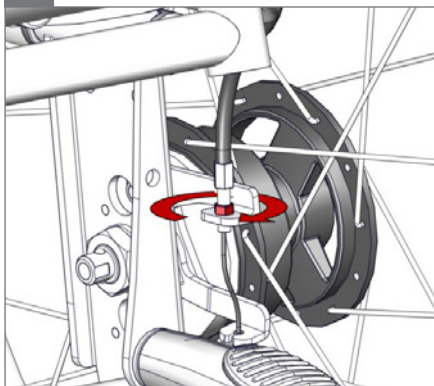

12.

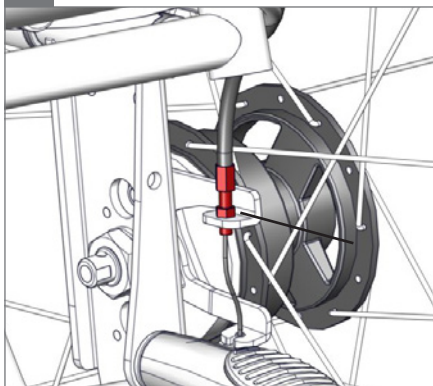




1.




2.

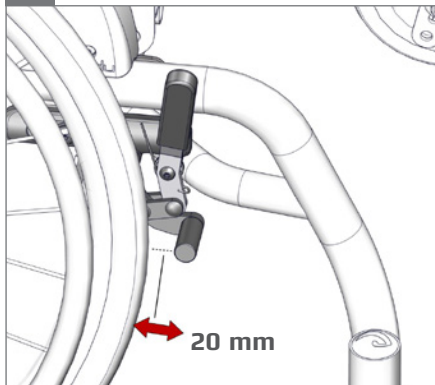


3.



4.

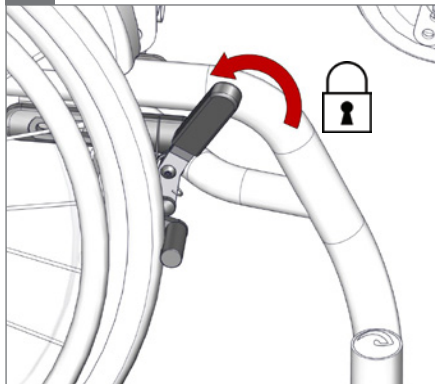

5.

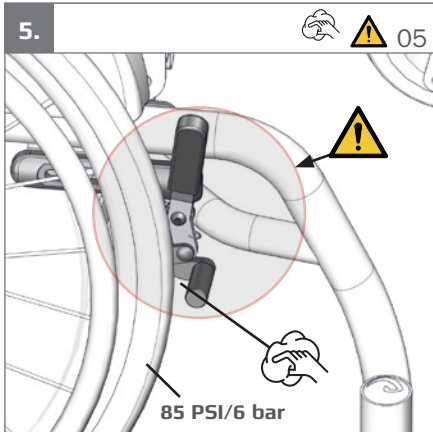





1.



2.

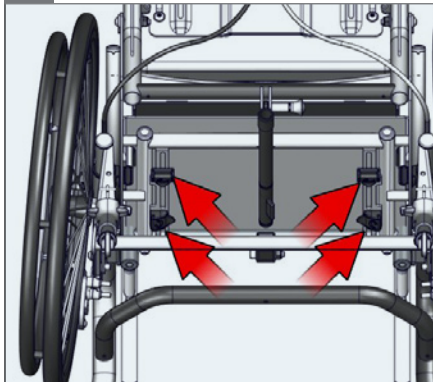


3.

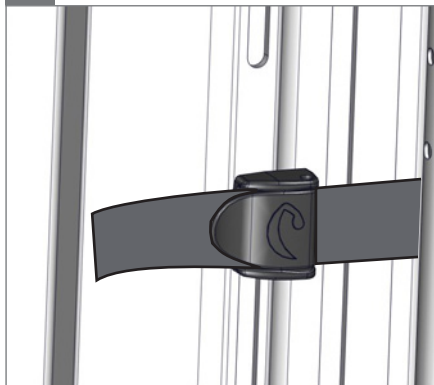

4.

⊙ 3 mm

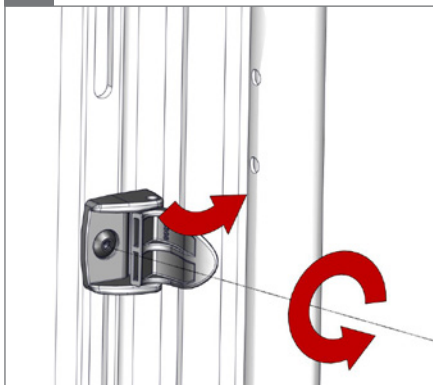

5.

⚠ 01



6.

⊙ 3 mm - 2,5 Nm







1.




2.

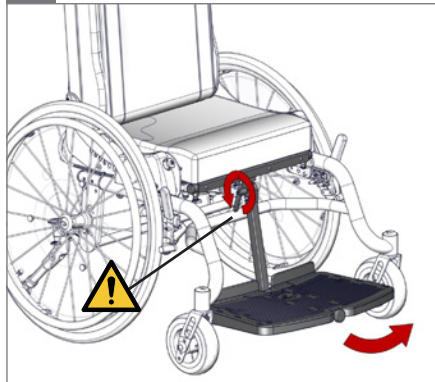 05


3.

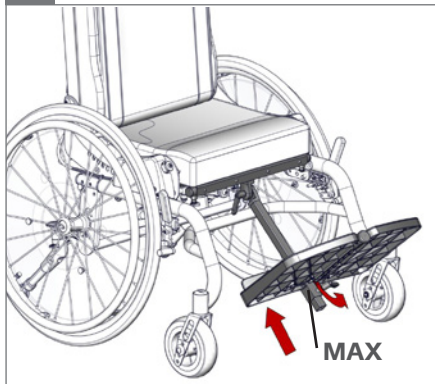


4.

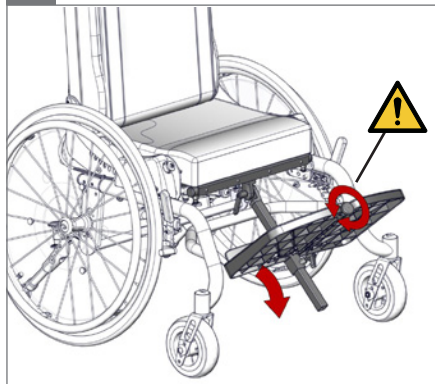 05

5.

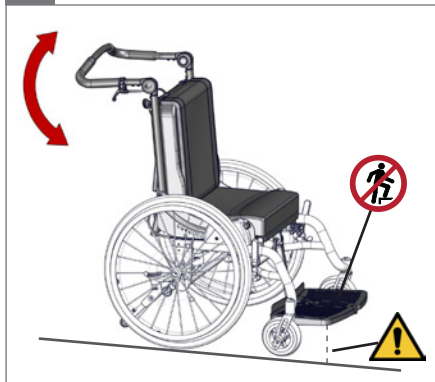 05


6.

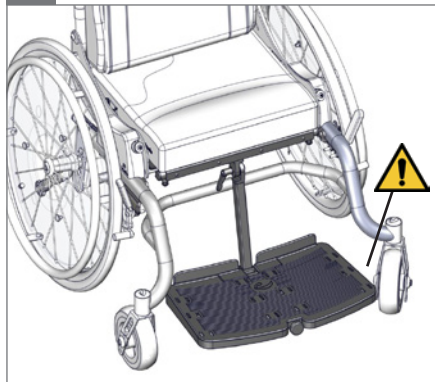 05


1.




2.

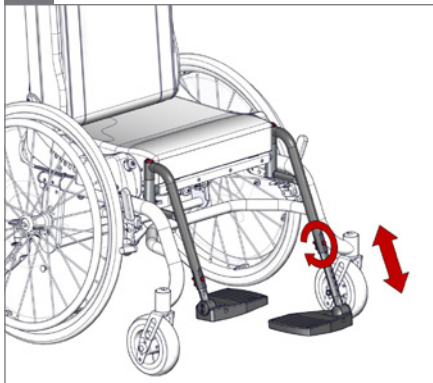


3.

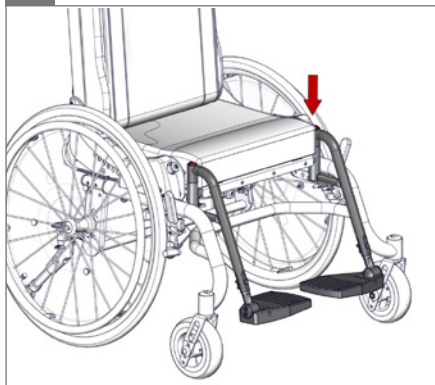


4.

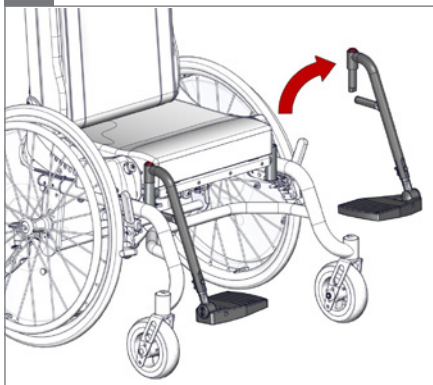

5.

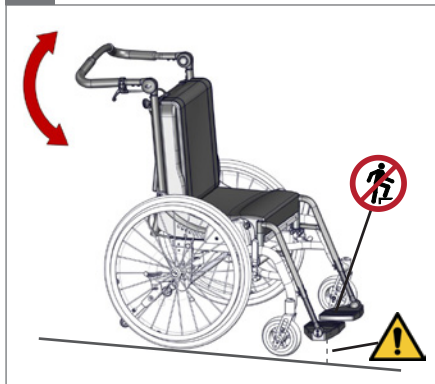

6.

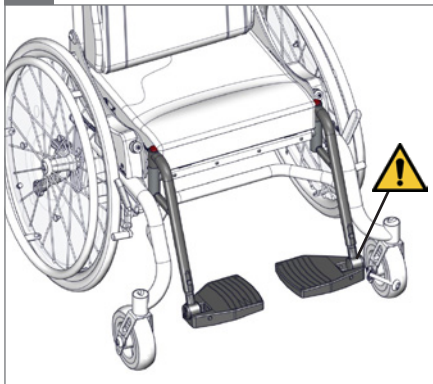



1.



2.




3.



4.



5.

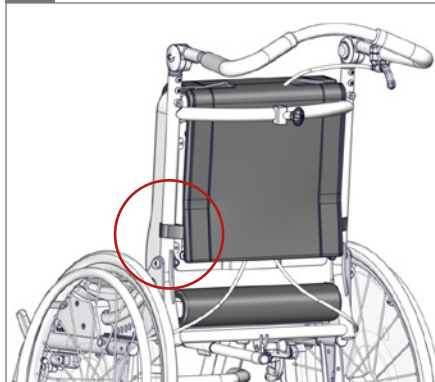

6.



1.



2.



3.



4.






1.




2.

○ 5 mm

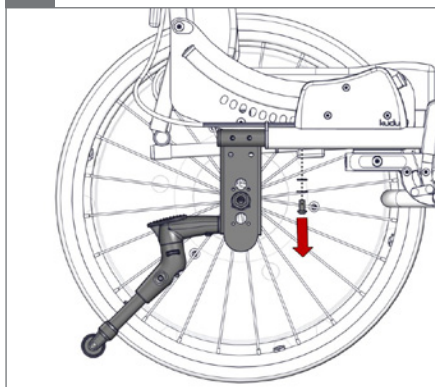


3.

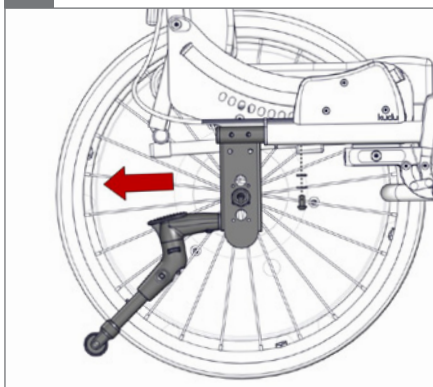


4.

○ 5 mm - 2,5 Nm

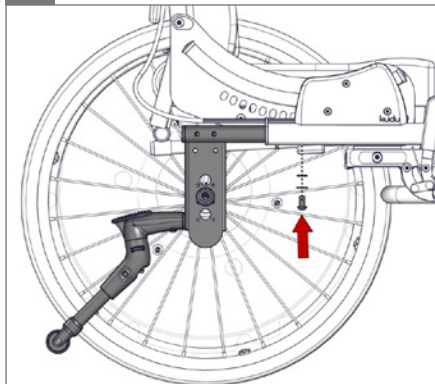

5.

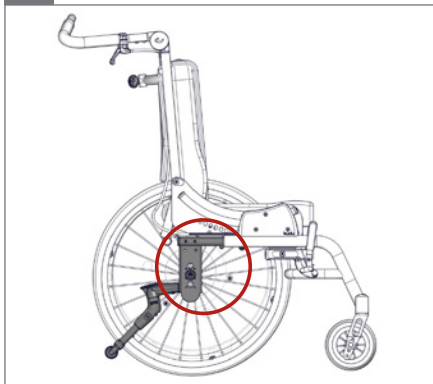




6.




7.

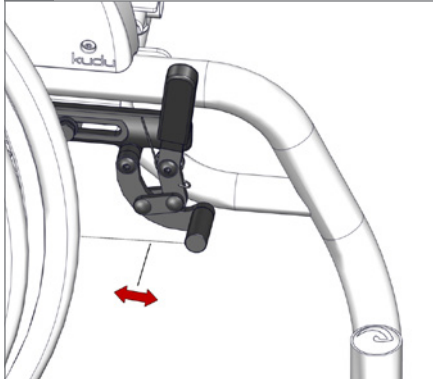


8.

🔑 13 mm

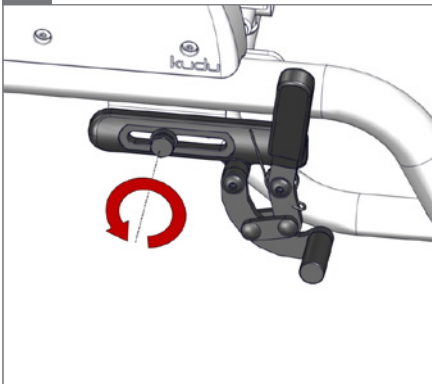


9.


🔑 13 mm - 2,5 Nm

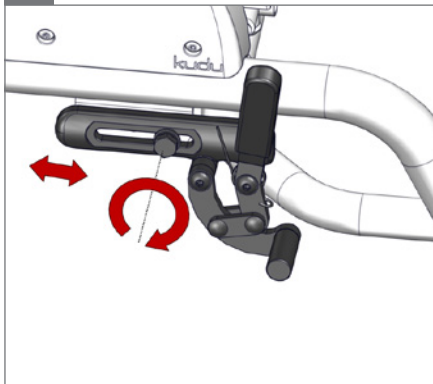

10.

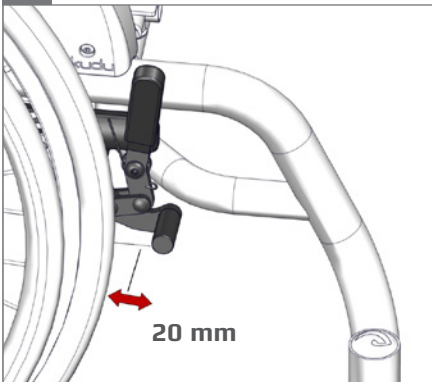


11.

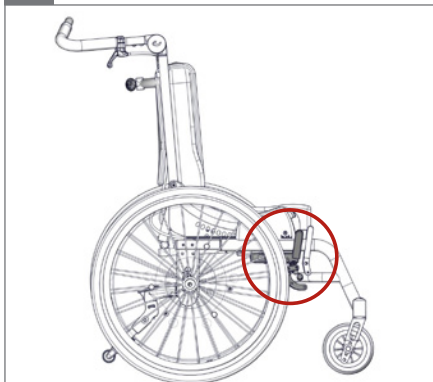



	20"	22"	24"	
1	-	-	a 480	
2	-	a 480	c 505	6"
3	a 480	c 505	-	
2	-	-	b 505	7"
3	-	b 505	c 530	

	20"	22"	24"	6"	7"
Min psi	85	85	85	-	-
Max psi	145	145	145	-	36
Lükkamispöia läbimõõt	445 mm (17½")	480 mm (19")	530 mm (21")	-	-

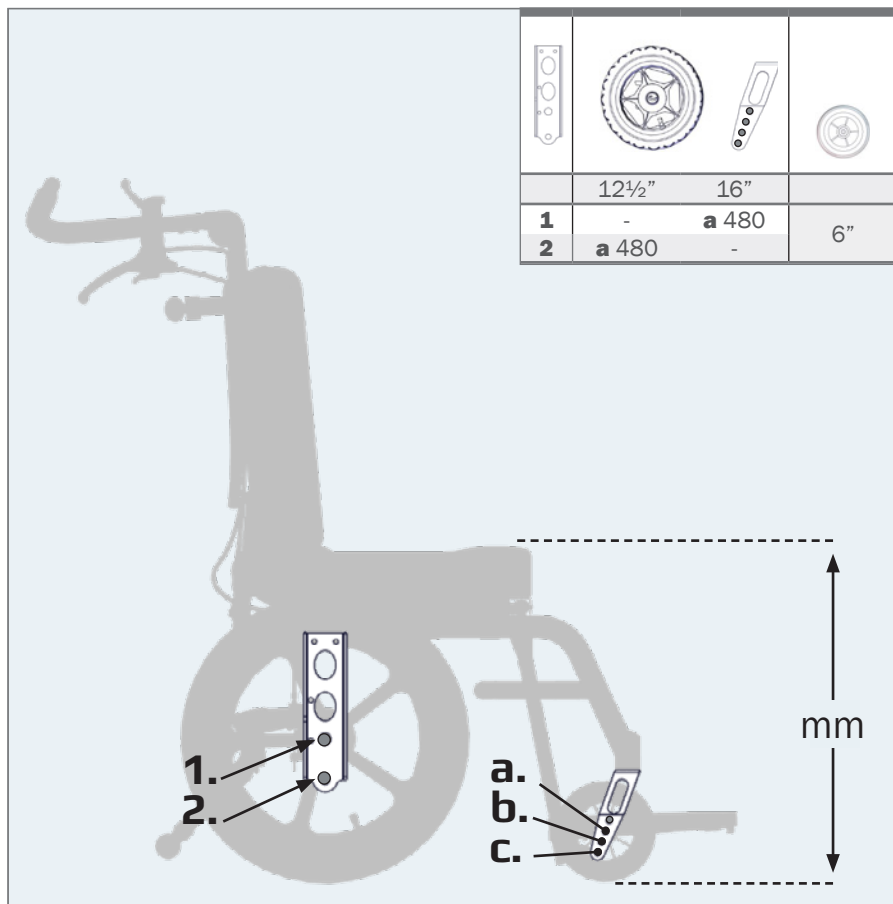


	12½"	16"	6"
Min psi	-	35	-
Max psi	26	65	-



1.




2.

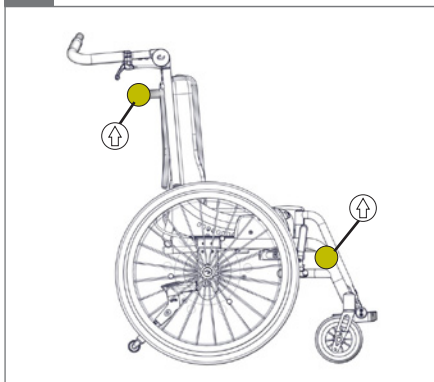

3.




4.

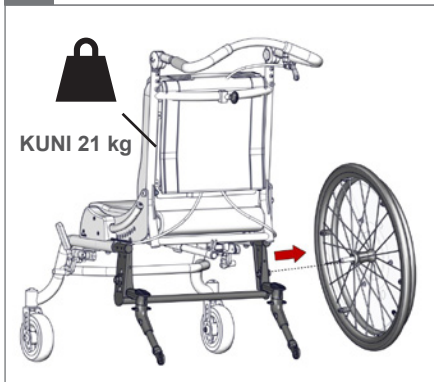

5.



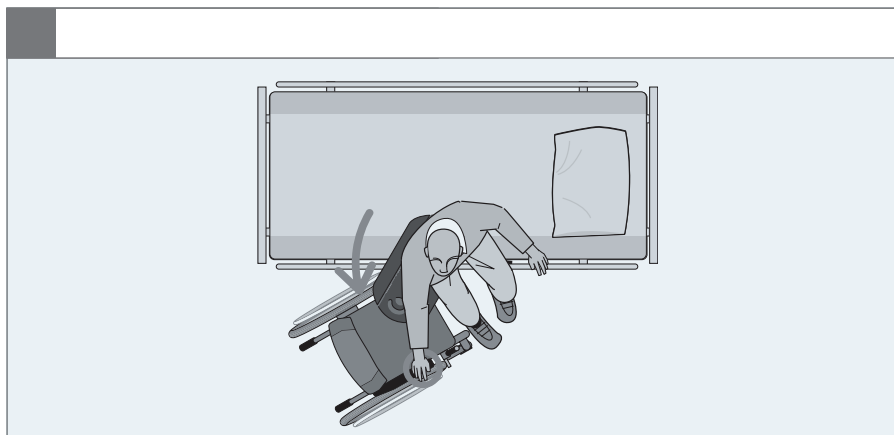




A

R82
by Etac
R82 A/S Parallelvej 3
DK-8751 Gedved
etac.com
Made in XXXXXXXX YYYY-MM-DD

B

Product: xxxx - Size x
Art. no.: xxxxxxxx Max user mass: xxx kg
XXXXXXX Max user mass: xxx kg
DMR ver.: XXXX Mass device: xxx kg
Max rated load: xxx kg

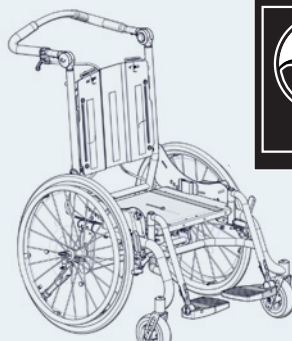



Kasutamiseks siseruumides ja väliskeskkonnas



Tutvuge juhistega. Juhiste viimane versioon on alati olemas ettevõtte etac veebisaidil ja neid saab printida suuremas suurus.



Õige tõstmispunkt



Hoiatus: see sümbol on kasutusjuhendis toodud alltoodud juhiste viitava numbriga. See juhib tähelepanu olukordadele, kus toode või kasutaja või hooldaja võib olla ohus.

01 = kinnijäämisohu

02 = ümberminekuohu

03 = transportimine mootorsõidukites

05 = muljumisohu



Keeld! Ärge seiske jalatoel



Keeld! Valed tõstmispunktid, eelkõige treppidel



Pesemine, pehmetoimeline protsess, maksimaalselt 60 °C



Pesemine, pehmetoimeline protsess, maksimaalselt 40 °C



Masinas pesemine



Käsitsi puhastamine: optimaalse toimimise tagamiseks hoidke puhtana



Ülevaatus




Kuulake klõpsatust

mm (inch)	 1	 2	 3	 4
 Istme kasulik laius	260 (10¼")	300 (11¾")	340 (13½")	380 (15")
 Istme kasulik sügavus	220-320 (8¾-12½")	270-370 (10¾-14½")	310-410 (12¼-16¼")	350-450 (13¾-17¾")
 Seljatoe kõrgus	370-460 (14½-18")	400-520 (15¾-20½")	430-580 (17-22¾")	430-630 (17-24¾")
 Jalatoe ja istme vahekaugus, tsentraalne jalatugi	160-310 (6¼-12¼")	160-380 (6¼-15")	260-450 (10¼-17¾")	260-450 (10-17½")
 Jalatoe ja istme vahekaugus, osadest koosnev jalatugi	-	250-350 (9¾-13¾")	300-480 (11¾-19")	300-480 (11¾-19")
 Istmepinna kõrgus eesservas	480 (19")	480 (19")	480 (19")	480 (19")
 Kogulaius	605 (23¾")	645 (25½")	685 (27")	725 (28½")
 Esirataste laius	550 (21¾")	590 (23¼")	630 (24¾")	670 (26¼")
 Kogulaius 12" ratastega	505 (20")	545 (21½")	585 (23")	625 (24½")
 Kogulaius 16" ratastega	505 (20")	545 (21½")	585 (23")	625 (24½")
 Kogulaius 20/22/24" ratastega ilma rataste külgakaldeta	500 (19¾")	540 (21¼")	580 (22¾")	620 (24½")
 Kogulaius 20/22/24" ratastega rataste külgakaldega	605 (23¾")	645 (25½")	685 (27")	725 (28½")
 Kogupikkus	690 (27¼")	690 (27¼")	740 (29¼")	740 (29¼")
 Kogukõrgus kuni lükkamiskaepidemeni	940 (37")	940 (37")	940 (37")	940 (37")
 Kogukõrgus kuni seljatoeni	940 (37")	1000 (39½")	1060 (41¾")	1110 (43¾")
 Seljatoe kaldenurk	-5-30°	-5-30°	-5-30°	-5-30°
 Istmetasandi kaldenurk	-3° -45°	-3-45°	-3° -45°	-3-45°

mm (inch)	 1	 2	 3	 4
 Seadme mass	19 kg (42 lb)	21 kg (46 lb)	23 kg (51 lb)	25 kg (55 lb)
 Kasutaja maksimaalne mass	40 kg (88 lb)	50 kg (110 lb)	60 kg (132 lb)	60 kg (132 lb)
 Kasutaja maksimaalne mass (transportimisel)	40 kg (88 lb)	50 kg (110 lb)	57 kg (125,5 lb)	57 kg (125,5 lb)
 Maksimaalne nimikoormus	61 kg (134.4 lb)	71 kg (156.5 lb)	85 kg (187.3 lb)	87 kg (191.8 lb)
 Pikkus kokkuklapituna	825 (32½")	825 (32½")	875 (34½")	875 (34½")
 Kõrgus kokkuklapituna	625 (24½")	625 (24½")	625 (24½")	625 (24½")
 Raskeima osa mass	13 kg (28,7 lb)	15 kg (33 lb)	17 kg (37,5 lb)	19 kg (41,9 lb)
 Jala kaldenurk istmepinna suhtes, tsentraalne jalatugi	55–180°	55–180°	55–180°	55–180°
 Jala kaldenurk istmepinna suhtes, osadest koosnev jalatugi	105°	105°	105°	105°
 Käetoetuste vahed	138–198 (5½–7¾")	138–198 (5½–7¾")	138–198 (5½–7¾")	138–198 (5½–7¾")
 Käetoetuskonstruktsiooni eesmine asukoht	590 (23")	590 (23")	640 (25")	640 (25")
 Telje asukoht horisontaali suhtes	146–196 (5¾–7¾")	146–196 (5¾–7¾")	146–196 (5¾–7¾")	146–196 (5¾–7¾")
 Minimaalne pööreraadius	823 (32½")	823 (32½")	823 (32½")	823 (32½")
Täisnurkse koridori vajalik laius	1000 (39½")	1000 (39½")	1100 (43¼")	1100 (43¼")
 Stabiilsus külgsuunas	10°	10°	10°	10°
 Staatiline stabiilsus allamäge	10°	10°	10°	10°
 Staatiline stabiilsus allamäge	10°	10°	10°	10°




9996097001

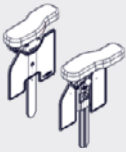

9996097002




9996097003

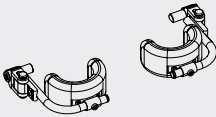

9996097004




9996097005

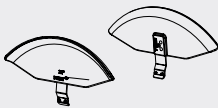


9996097007



9996097006

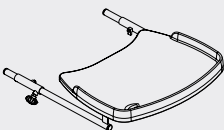


9996097008

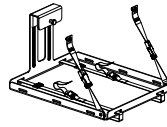


9996097709



9996097010

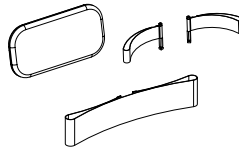

9996097011

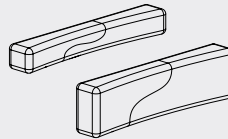

9996097012



9996097013



9996097015



9996097740



9996097137




9996097187

N/A



9996097748

N/A

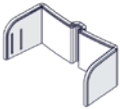


9996097338

N/A



9996097339

N/A

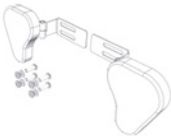

9996097741

N/A



9996097016

N/A



9996097608

N/A

N/A

N/A

ET

Täname teid, et valisite uue toote R82-lt – erivajadustega laste ja täiskasvanute tehniliste abivahendite ning seadmete ülemaailmselt tootjalt. Toote pakutavate võimaluste maksimaalseks ärakasutamiseks tuleb enne kasutamist lugeda käesolevat kasutusjuhendit ja hoida see alles edaspidiseks kasutamiseks.

Kasutusotstarve

Seade on ratastool lastele ja puuetega täiskasvanutele.

Näidustused

Seadet võivad kasutada puuetega lapsed ja täiskasvanud, kellel puudub võime istuda või liikuda ilma abivahendita. Seega on seadme sihtühma tunnuseks funktsionaalne võime, mitte konkreetne tervises seisund või vanus.

Kasutaja on isik, kes istub seadmes. Hooldaja on isik, kes juhib seadet. Ärge jätke kunagi selles seadmes olevat kasutajat järelevalveta. Tagage pidev hooldajapoolne järelevalve.

Seadme kasutamine katkeb mitu korda päevas, kui kasutaja lamab, seisab või istub mõnes muus abivahendis või tavatootes.

Seade sobib selliste laste ja täiskasvanute transportimiseks, kelle kehamaas on vahemikus 22 kg kuni transporditava kasutaja ettenähtud maksimaalse väärtuseni.

Vastunäidustused

Vastunäidustusi ei ole teada.

Ettevaatusabinõud

Eriislt tähelepanu tuleb pöörata toote konfiguratsioonile ja lisatarvikutele kasutajate jaoks, kellel on järgmised puuded või vajadused.

- Sensorsead funktsioonid ja valutundlikkus, kontrollige täiendavalt seadme ja selle tarvikute toetusest tuleneva surve suurus.
- Liigutusefunktsioon (nt tahtmatud liigutused), kaaluge dünaamilise seljatoega seadme kasutamist.
- Suutlikkus säilitada istesendit, kasutage tarvikutega (nt küljetoed, vestid, riimad või käetoed ja lauake) toodet.
- Suutlikkus hoida pea asendit, kaaluge tarvikute kasutamist või sellise toote kasutamist, mis toetab pea asendit.

Kasutuskohad

Toode on mõeldud kasutamiseks siseruumides ja väliskeskkonnas.

Kaasasolevad tööriistad

4 ja 5 mm sissekuuskantvõti
13 mm mutrivõti



Vastavusdeklaratsioon

Toode vastab meditsiiniseadmete kohta käiva määruse (2017/745) nõuetele. Veel vastab seade järgmistele nõuetele:

- EN 12183
- CE-märgis tuleb eemaldada juhul, kui:
 - toodet ajakohastatakse;
 - toodet kasutatakse mittesihhipäraselt ja vastuolus vastavusdeklaratsioonis märgitule;
 - kasutatakse R82 originaalvaruosadest erinevaid osi ja abidetaili.

Seadme kombineerimisel teiste toodetega ei tohi tulemus muuta toodete kasutusotstarvet ega muuta tooteid selliselt, et võib mõjutada vastavust kehtivatele nõuetele. Toodete kombinatsiooni eest vastutav isik/ettevõtte peab tagama vastavuse kohaldatavatele nõuetele.

Kohaldatavate nõuete näited.

- Kasutaja kehamaasi / istme ja aluskonstruktiooni massi kooskõla, luba mõlema toote transportimiseks sõidukites (ISO 16840-4 istme ja ISO 1716-19 aluskonstruktiooni korral).
- Materjalide ohutus (biosobivus, süttivus), mehaaniline ohutus (stabiilsus, muljumisoht, detailide ühenduskohad), elekriohtus.



Utiliseerimine

Kui toode jõuab oma kasutusea lõppu, tuleb see demonteerida materjalitüüpide kaupa, et osad saaks ringlusse võtta või jäätmekäitlusele saata. Vajaduse korral pöörduge iga materjali täpse kirjelduse saamiseks kohaliku edasimüüja poole. Teabe saamiseks keskkonnasäästliku ringlussevõtu võimaluste kohta pöörduge kohalike ametiasutuste poole.

Tarvikud ja varuosad

R82 tooteid võidakse tarnida koos mitmesuguste tarvikutega, sealhulgas vestide ja riimadega, mis vastavad konkreetse kasutaja vajadustele. Varusi saab tellida. Leidke konkreetsed tarvikud meie veebisaidilt või pöörduge lisateabe saamiseks kohaliku edasimüüja poole.

R82 garantii

R82 pakub kaheaastast garantiid valmistamise ja materjalidega seotud defektide korral ning viieaastast garantiid keevsiliidete defektidest põhjustatud metallraami purunemise korral. Kui klient ei järgi tootja ja/või juhendis esitatud korrashoiu ja/või igapäevase hoolduse juhiseid ning välpasid, kaotab garantii kehtivuse. Lisateavet leiab etaci kodulehelt allalaaditavate materjalide osast.

Tavakasutuse korral, kõigi korrashoiu- ja hooldustööde tegemisel ning tõendataval dokumenteerimisel tootja juhiste kohaselt on toote kasutusiga 8 aastat. Toote võib kasutusele võtta ja anda teisele isikule. Garantii kehtib selles riigis, kus toode osteti ja juhul, kui toode saab seerianumbri järgi tuvastada. Garantii ei kata juhuslikke kahjustusi, sealhulgas vales kasutusest või hooletusest tekkinud kahjustusi. Garantii ei laiene kuluvarade materjalidele, näiteks rehvidele ja polstrile, mis alluvad tavapärasele kulumisele ning vajavad regulaarset vahetamist.

Garantii kaotab kehtivuse, kui kasutatakse muid osi/tarvikuid peale originaalosa/de-tarvikute või kui toode ei ole hooldatud, remonditud või muudetud tarnija määratud ja/või kasutusjuhendis toodud juhiste ning välpade kohaselt. R82 jätab endale õiguse enne garantiinõude täitmisega nõustumist nõude alla kuuluv toode ja asjakohased dokumendid üle vaadata ning otsustada, kas see asendatakse uuega või parandatakse. Garantiinõude alla kuuluva toote tagastamine ostupunkti on kliendi kohustus.

Müügieelne teave
www.etac.com

Ohutus

Tootel olevaid silte, sümboleid ja juhiseid ei tohi kunagi kinni katta ega eemaldada ning need peavad toote kogu kasutusea jooksul olema oma kohal ja kergesti loetavad. Vahetage loetamatus või kahjustatud sildid, sümبولid ja juhised kohe välja või parandage need. Juhiste saamiseks pöörduge kohaliku edasimüüja poole. Seadmega seotud õnnetusjuhtumist tuleb õigel ajal teavitada kohaliku edasimüüjat ja riiklikku pädevat asutust. Kohalik edasimüüja edastab teabe tootjale.

Hooldaja

- Enne kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles. Toote vale kasutamine võib põhjustada kasutajale raskeid vigastusi.
- Toote või tarvikute seadistusi ja reguleerimisi teevad ainult kasutusjuhendiga tutvunud isikud, kes on tootenõustajalt saanud vajalikud juhised.
- Toode sisaldab väikseid osi, mis võivad ettenähtud kohast eemaldamisel põhjustada lämbumisohtu.
- Kasutage alati õigeid töstmismeetodeid ja selleks ette nähtud abivahendeid.
- Ärge jätke kunagi selles tootes olevat kasutajat järelevalveta. Tagage pidev hooldajapoolne järelevalve.
- Enne reguleerimist tutvuge asjakohase MAX-märgile vastava väärtusega.
- Remondiks/väljavahetamiseks võib kasutada ainult R82 uusi originaalvarusid ja -tarvikuid ning need tööd tuleb teha tarnija määratud juhiste ja väljade kohaselt.
- Kui teil on R82 toote kasutamise turvalisuse osas kahtlusi või kui mõni toote osa saab kahjustada, lõpetage kohe toote kasutamine ja võtke esimesel võimalusel ühendust kohaliku edasimüüjaga.
- Reguleerimisel jälgige, et liikuvad osad ei pigistaks kehaosi ega haaraks neid kaasa.
- Jälgige, et kehaosad ei jääks tugevate/tarvikute paigaldamiseks vajalikesse avadesse kinni.
- Teavet transportimise kohta leiate tootega kaasas olevast dokumendist „Transportimine mootorsõidukites“.
- Teavet sõiduomaduste kohta leiate tootega kaasas olevast dokumendist „Sõiduomadused“.

Keskond

- Enne kasutaja asetamist tootesse kontrollige selle pinnatemperatuuri. See on eelkõige tähtis vähetundliku nahaga kasutajate puhul, sest nad ei tunne kuumust. Kui pinnatemperatuur on üle 41 °C, laske tootel enne kasutamist jahtuda.
- Kasutage toodet tasasel takistusteta pinnal. Pidage meeles, et libedatel teedel väheneb toote manööverdusvõime.
- Kallakutel kasutamisel arvestage stabiilsusparameetritega.

Kasutaja

- Kui kasutaja kehamass on toote kandevõimele lähedal ja/või kasutajal esineb kontrollimatuid liigutusi, näiteks värisemist, kaalu suurema kandevõimega või R82 mõne muu toote kasutamist.

Toode

- Enne kasutamist reguleerige toote osade ja tarvikute asendeid ning veenduge, et kõik nupud, poldid ja rihmapandlad oleksid korralikult kinnitatud. Hoidke kõiki tööriistu lastele kättesaamatus kohas.
- Osad, mida saab tööriistu kasutamata eemaldada: rattad, jalatoed ja padjad. Eemaldamine mõjutab toodet ebasoodsalt.
- Enne kasutaja tootesse asetamist rakendage pidurit.
- Toote kasutamisel kallakutel kasutage ümberminekuvastast abivahendit.
- Kasutage ümberminekuvastast abivahendit enne istme ja seljatoe kaldenurga muutmist.
- Lõpetage ümberminekuvastase abivahendi kasutamine, kui ületate üle 100 mm kõrgusi äärekive.
- Enne kasutaja asetamist tootesse veenduge selle stabiilses asendis.
- Soovitame kasutajat enne istme ja seljatoe kaldenurga muutmist sellest teavitada.
- Enne kasutamist veenduge, et kõik rattad oleksid töökorras ja korralikult kinnitatud.
- Rehvil on trükitud nõuetekohase rõhu väärtus ja see on kirjas ka rehvi tehnilistes andmetes.
- Rehvi läbitorkamise korral võib toodet kasutada alles pärast vigastuse parandamist.
- Mootorsõidukisse sisenemist ja selles manööverdumist võib märkimisväärselt mõjutada ratastooli suurus ja pöörderaadius; väiksemate ratastoolide ja/või väiksema pöörderaadiusega ratastoolidega on üldiselt lihtsam sõidukisse pääseda ja manööverdada, kui olla näoga sõidusuunas asendis. Standardi ISO 7176-19 lisa D kohaselt hinnatakse toodet sõidukis fikseeriva vaagna- ja õlarihmade kasutamise võimaluse alusel. Seadme üldhinnang on „hea“.
- Kasutajata seade sobib transportimiseks maismaal ja lennukites.
- Lisakoormuste kinnitamine võib stabiilsust halvendada. Lisakoormuste kandmiseks ette nähtud punktide asukohad on näidatud vastavas paigaldusjuhendis, millele on viidatud tarvikute osas.
- Vältige gaasvedru kokkupuudet surve või kõrge temperatuuriga. ÄRGE torgake seda läbi.
- Enne kasutamist kontrollige toode ja kõik selle tarvikud üle ning vahetage kulunud osad välja.
- Seda toodet on katsetatud süttimiskindluse suhtes standardite EN 1021-2 ja ISO 7176-16 kohaselt ning toode on mittesüttiv.
- Toode võib oma tulekindluse klassi kaotada juhul, kui kasutatakse järgmisi R82 originaalosadest erinevaid osi: padjad.

Hooldusteave

Meditsiiniseadme hooldamise eest vastutab täielikult seadme omanik. Seadme juhiste järgi hooldamata jätmine võib tühistada seadme garantii. Peale selle võib see ohtu seada ka seadme kasutajate ja/või nende hooldajate tervise seisundile ning vähendada nende turvalisust. Ärge tehke hooldust ja tehnilist teenindust siis, kui kasutaja istub tootes. Kui vajate abi seadme seadistamisel, kasutamisel või hooldamisel, siis pöörduge vajaduse korral abi saamiseks kohaliku edasimüüja poole.

1. päev

- Lugege kasutusjuhend enne kasutamist hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.
- Hoidke kaasasolevat tööriistu tootes või selle juures.

Iga päev

- Puhastage toodet kuiva lapiga.
- Kontrollige visuaalselt. Remontige või asendage kõik kahjustatud või kulunud osad.
- Veenduge, et kõik kinnitusvahendid oleksid oma kohal ja nõuetekohaselt paigaldatud.
- Kontrollige kõiki tarvikuid ja pandlaid kulunud osade suhtes.
- Enne reguleerimist tutvuge asjakohase MAX-märgile vastava väärtusega.

Kord nädalas

- Veenduge, et kõik rattad liiguksid vabalt ja kõiki rattalukke/pidureid saaks kergesti rakendada.
- Enne kasutamist pühkige tootelt sooja vee ja pehmetoimelise pesuaine/seebiga immutatud lapiga maha igasugused jäägid ning mustus, seejärel kuivatage toode.
- Rehvirõhk

Kord kuus

- Soovimatute rikete vältimiseks tuleb kontrollida toote kõiki mutreid ja polte ning neid pingutada.
- Õlitage pöörlevaid/pööratavaid osi. Soovitame kasutada professionaalseks kasutamiseks mõeldud määrdeaineid.

Kord aastas

- Kontrollige, kas raamis on mõrasid või kulumismärke, ja tehke iga-aastane hooldus. Ärge kunagi kasutage toodet, kui see paistab olevat ebakvaliteetne või rikkis.

Pesemine

Padjakatteid võib pesta pesumasinas temperatuuril 60 °C pehmetoimelise pesuainega. Vahtmaterjalist sisu võib pesta pesumasinas temperatuuril 40 °C pehmetoimelise pesuainega. Vahtmaterjalist sisu ei tohi pesemise ajal ega pärast seda painutada, pigistada või väanata, sest see võib kaasa tuua deformeerumise.

Masinas pesemine

Toodet võib pesta temperatuuril 60 °C pehmetoimelise pesuainega 15–20 minutit meditsiiniseadmete jaoks ette nähtud pesumasinas. Kasutage toote kuivatamiseks masina kuivatusfunktsiooni. Tarvikud puhastage eraldi.

Desinfitseerimine

Tarvikute ja patjadeta toodet saab desinfitseerida isopropüülalkoholi (IPA) 70% lahusega. Soovitatav on enne desinfitseerimist pühkida tootelt sooja vee ja klooriühendeid mittesisaldava pehmetoimelise pesuaine/seebiga immutatud lapiga maha igasugused jäägid ning mustus ja lasta tootel kuivada.

Välbad

Toode tuleb iga 12 kuu tagant (rohke kasutamise korral iga 6 kuu tagant) põhjalikult üle vaadata, samuti siis, kui see antakse üle teisele kasutajale ja pärast pikaajalist seismist (üle 4 kuu). Ülevaatust peab tegema tehniliste teadmiste isik, kes on saanud toote kasutamise alase väljaõppe.

Hoolduse kontroll-loend

Kontrollige ja reguleerige järgmisi funktsioone olenevalt nende kasutusotstarbest. Remontige või asendage kõik kahjustatud või kulunud osad. Palun teha järgmised kontrollitoimingud.

- Istme kaldenurga reguleerimine. Istme tasand on reguleeritav ja säilib pärast reguleerimist soovitud asendi.
- Istme kallutussüsteem on reguleeritud nii, et seda saaks vabalt kasutada liigsete liigutusteta.
- Ärge õlitage kallutussüsteemi.
- Veenduge, et rattad liiguksid vabalt ja kõiki rattalukke/pidureid saaks kergesti rakendada. Vajaduse korral reguleerige.
- Veenduge, et kiirvabastusrattaid saaks ära võtta / asendada.
- Veenduge, et ümberminekuvastaseid abivahendeid saaks fikseerida nii kasutus- kui ka väljalülitatud asendis.
- Rehvirõhk
- Kodarakatted on pragudeta ja kinnitatud ratta külge igal kattel olevate klambritega.
- Enne hoiulepanekut: vabastage alati rattalukud/pidurid.
- Veenduge, et tootel oleksid kõik poldid/mutrid kinni keeratud.
- Õlitage pöörlevaid/pööratavaid osi.
- Kontrollige, kas tootel on mõrasid või kulunud osi.
- Veenduge, et kõik märgistused oleksid loetavad.

Toote ohutus

Tulenevalt ratastooli variandist ja seadistustest võib see olla soovitatavatest mõõtmetest suurem. Vastavus soovitatava üldlaiuse ja -pikkuse väärtusele tagab evakuatsiooniteede takistamatu kasutamise. (Vaadake tabelit 1)

Tabel 1

Soovitatavad mõõtmised	Kasutusvalmis olekus (mm)
Maksimaalne kogupikkus	1200
Maksimaalne kogulaius	700
Maksimaalne kogukõrgus	1200
Maksimaalne pöördeläbimõõt	1000
Maksimaalne pöördelaius	1300
Minimaalne kliirens	30

Tooteohutus

Tulenevalt ratastooli variandist ja seadistustest ei pruugi see vastata rongiga transporditava ratastooli mõõtmetele. Et kontrollida, kas konkreetne toode vastab piirnormidele, võib teha mõõtmisi. (Vaadake tabelit 2)

Tabel 2

Rongiga transporditavad ratastoolid – piirangud	
Maksimaalne kogupikkus	1200 mm + 50 mm labajala jaoks
Maksimaalne kogulaius	700 mm + 50 mm kummalgi poolel käte jaoks
Maksimaalne kogukõrgus	1375 mm (sh 95. protsentiil meessoost kasutaja jaoks)
Maksimaalne pöördeläbimõõt	1500 mm
Rataste minimaalne suurus	Tagada 75 mm vahe horisontaalsuunas ja 50 mm vertikaalsuunas
Maksimaalne mass	200 kg käsiratastoolile koos kasutajaga (koos pagasiga)
Ületatava takistuse maksimaalne kõrgus	50 mm
Minimaalne kliirens	60 mm jalatoe all ülespoole liikumisel 10° kaldega tõusul
Maksimaalne kalle, mille korral jääb ratastooli asend stabiilseks	6° dünaamiline stabiilsus kõigis suundades 9° staatiline stabiilsus kõigis suundades, sealhulgas rakendatud pidurite korral



R82 A/S

Parallelvej 3
8751 Gedved
Taani
Tel +45 7968 5888
Faks +45 7566 5192
etac.com
facebook.com/R82global/

EDASIMÜÜJA:

M1015

Tootjal on õigus muuta juhendis sisalduvat teavet seoses
trükkivigadega ja toodete tootmise lõpetamisega.
Uusima väljaande leiame meie veebisaidilt etac.com

Kõik disainilahendused ja patendid on R82 registreeritud disainilahendused ja patendid.

© 2013 R82 A/S Kõik õigused kaitstud. R82 logo ja ikoonid on R82 A/S-i registreeritud kaubamärgid.