

RULAATOR PUMA AIR

Art 312501+02

Kasutusjuhend



Kerge kokkuklapitav raam
Komplektis ostukott ja karkude hoidik
Reguleeritava kõrgusega
lukkamiskäepidemed

Komplektis
jalutuskepi
hoidik



Seljatuge saab
külgede
vahetamiseks
painutada



Õhkrehvidega



 **Mobilex A/S**
Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg,
Taani,
www.mobilex.dk

Mobilex Sp. z o.o.
ul. Duńska 3/5, 91-204 Łódź
tel 042 214 2911
www.mobilex.pl

1. Sissejuhatus

Täname, et ostsite kvaliteetse Mobilexi toote. Kasutusjuhendis on toote kirjeldus ja tähtis teave meditsiiniseadme kasutamise kohta. Selle eesmärk on aidata teil toodet õigesti ja ohutult kasutada. Enne toote kasutamist on väga tähtis need juhised hoolikalt läbi lugeda. Pöörake erilist tähelepanu ohutussuunistele ja järgige neid alati. Mobilex püüab oma tooteid pidevalt parendada ja täiustada. Seetõttu jätame endale õiguse muuta toote spetsifikatsioone ja tehnilisi andmeid neist ette teatamata.

Rulaatori ettenähtud kasutusala

See toode on meditsiiniseade, mis on mõeldud seismis- või kõndimisraskustega inimeste liikumisvõime parandamiseks. Rulaator võimaldab neil inimestel tagasi saada võime teha igapäevatoiminguid. Rulaator sobib inimestele, kes vajavad erinevate haiguste tõttu stabiilset kõndimisabi. Rulaatorit kasutatakse üksnes abivahendina seismisel ja kõndimisel. Mis tahes muul viisil kasutamine on keelatud.

Näidustused

Rulaator on meditsiiniseade, mis on mõeldud funktsionaalsete piirangutega inimeste abistamiseks. Kasutamistäidustused on liikumispiiranguid ja puudeid põhjustavad haigused, mis takistavad iseseisvalt istumist, seismist ning kõndimist. Seega on ülaltoodud toimingute tegemisel vaja stabiilset lisatuge. Näidustused ei ole seotud ühe kindla kliinilise pildiga ja sõltuvad kasutaja tervises seisundi individuaalsetest hindamistest, mida teeb erialaarst või füsioterapeut. Peamised kasutajad on vanurid, halvatud ja reumaatiliste haigustega patsiendid ning need inimesed, kelle nimmelülid, põlve- või puusaliigesed on piiratud liikumisvõimega. Toote kasutamine siin kirjeldatust erinevatel eesmärkidel on keelatud.

Vastunäidustused

Rulaatorid ei ole mõeldud neile inimestele, kes ei suuda püstiasendis korralikult tasakaalu hoida. Rulaatorit ei tohi kasutada siis, kui kasutajal on tajuhäired. Vastunäidustused ei ole seotud ühe kindla kliinilise pildiga ja sõltuvad võimaliku kasutaja tervises seisundi hindamistulemustest. Kindla haiguspildiga sobiva ortopeedilise abivahendi valik tuleb alati teha eriarsti või füsioterapeudi abiga. Veel tuleb arvestada 2. punktis toodud ohutusteavet.

Kasutusala

Toodet saab kasutada koduhoolduses, tervishoiu- ja pikaajalise hoolduse asutustes ning haiglates.

Meditsiinilised vahejuhtumid ja soovimatud tagajärjed

Rulaatoriga seotud soovimatute sündmuste korral võtke ühendust edasimüüja või tootjaga:

Mobilex A/S		
Grønlandsvej 5	Telefon	+45 8793 2220
DK-8660 Skanderborg	Faks	+45 8793 1777
Taani	E-post	info@mobilex.dk

2. Ohutusnõuded

- Tagage, et kõik rulaatorit kasutavad isikud oleksid selle kasutusjuhendi läbi lugenud.
- Tootja ei vastuta kasutusjuhendi järgimata jätmisest tuleneva kahju ja/või vigastuse eest.
- Kasutage ainult laitmatu seisukorras olevat toodet.
- Puuduste või vigade avastamisel lõpetage kohe rulaatori kasutamine ja pöörduge edasimüüja poole.
- Järgige kõiki tootja soovitusi ja hoiatusi.
- Võtke arvesse toote sildil olevat teavet.
- Kasutage toodet ainult siin kirjeldatud eesmärgil.
- Ärge ronige rulaatorile.
- Vältige rulaatori juures konstruktsiooniliste muudatuste tegemist, välja arvatud juhul, kui teil on tootja kirjalik nõusolek selliste muudatuste tegemiseks.
- Rulaatorit ei tohi koormata suurema kaaluga, kui on märgitud tehniliste andmetes.
- Kõik rattad PEAVAD kasutamise ajal olema PIDEVAS kokkupuutes maapinnaga. See tagab, et rulaator on korralikult tasakaalus ja vähendab õnnetusjuhtumite riski.
- Olge ettevaatlik rulaatori mis tahes osade kokkupanekul või reguleerimisel.
- Kontrollige alati enne kasutamist, kas pidurid toimivad nõuetekohaselt.
- Kasutage rulaatorit ainult siis, kui see on täielikult lahti klapitud ja lukustusseade on aktiveeritud.
- Istet võib kasutada üksnes siis, kui seisupidurid on rakendatud.
- Mõlemad pidurid peavad alati olema korraga rakendatud või lukustatud.
- Rulaatori liikumise ajal ei tohi istmel olla inimest või mingit eset.
- Kui rulaatorit ei kasutata, peavad seisupidurid olema alati rakendatud.
- Enne kasutamist veenduge, et kott ei ripuks lõdvalt istmetorude küljes ega puutuks kokku ratastega.
- Kontrollige regulaarselt rehvirõhku, see peab alati olema 2,3...2,5 baari (33...36 psi).

Tarnekomplekt

Rulaator tarnitakse pappkastis. Pakendis on:

- ✓ 1 kokkuklapitud rulaator, lisaks 1 paigaldatud iste, 1 seljavöö, 1 karguhoidik, 1 kruusihoidik ja 1 kott
- ✓ 1 kasutusjuhend

Esialgne kontrollimine

Kontrollige ülaltoodud nimekirja alusel kasti sisu. Kui avastate selles etapis, et mõni osa puudub või on kahjustatud, võtke kohe ühendust oma tarnijaga.

3. Kirjeldus

Toote kirjeldus

Rulaatoril on pulbervärvitud raam ja neli õhkrehvidega ratast. Kerge raam teeb selle kokkuklappimise lihtsaks ning võimaldab hõlpsat ladustamist ja transportimist. Rulaator liigub kergesti ja on piisavalt stabiilne. Lükkamiskäepidemete kõrgust saab reguleerida. Rulaator tarnitakse koos paigaldatud istme, seljavöö ja ostukotiga.

Rulaator koosneb järgmistest osadest:

1. lükkamiskäepide
2. pidurihoob
3. hoob lükkamiskäepideme kõrguse reguleerimiseks
4. istmetoru
5. karguhoidik
6. pidur
7. õhkrehviga tagaratas
8. seljatugi
9. rihm kokkuklappimiseks
10. kokkuklappimise lukustusklamber
11. äravõetav kott
12. pööratav õhkrehviga esiratas
13. kruusihoidik (ei ole fotol kujutatud)



Kokkupaneku kirjeldus

Rulaatori kokkupanekuks ei ole vaja mingeid juhiseid.

Funktsiooni kirjeldus

Raami kokkuklappimine/lahtiklappimine

Raami lahtiklappimiseks avage kokkuklappimise lukustusklamber ja suruge istmetorusid allapoole seni, kuni raam avaneb ning kostub klõps. See tähendab, et rulaator on lukustatud lahtiklapitud asendis. Raami kokkuklappimiseks tõmmake kokkuklappimiseks mõeldud rihma ülespoole ja lõpetage raami kokkuklappimine. Selleks lükake istmetorusid teineteise poole ja lukustage need lukustusklambriga.

HOIATUS! Istmetorud peavad rulaatori lahtiklappimisel haarduma mõlemalt poolt tugevasti oma kohale. Kõik osad peavad enne rulaatori kasutamist olema kindlalt lukustunud. Nende hoiatuste eiramine võib kaasa tuua vigastuse.

Lükkamiskäepideme kõrguse reguleerimine

Lükkamiskäepideme kõrguse reguleerimiseks tõstke reguleerimishoob üles ja nihutage käepide soovitud kõrgusele. Laske hoob alla ja korrake toimingut teise käepidemega.

MÄRKUS. Mõlemad käepidemed peavad alati olema samal kõrgusel. Lükkamiskäepideme nõuetekohane kõrgus peab alati olema kasutaja randmete kõrgusel, kui ta seisab piki keha väljasirutatud kätega.

Koti kinnitamine/äravõtmine

Koti kinnitamiseks rulaatori külge tõmmake koti rihmad pingule ümber istmetorude otste. Selleks kasutage plastist reguleeridetaili (pilt paremal) ja tehke rihmad võimalikult lühikeseks. Koti rihmad jäävad nüüd kahe plastosa alla. Seda on kõige lihtsam teha siis, kui rulaator on veidi kokku klappitud. Rulaatori saab nüüd täielikult kokku klappida. Koti eemaldamiseks klappige rulaator osaliselt kokku ja võtke kott ära.



Pidurid

Pidureid saab järk-järgult rakendada, kui tõmmata pidurihooba ülespoole üha suurema jõuga. Pidurid on täielikult rakendunud siis, kui pidurihoob puudutab käepidemeid ja rulaator on täielikult peatunud. Pidurdamise lõpetamiseks laske pidurihoovad lahti. Rulaatoril on ka seisupidur. Seisupiduri rakendamiseks lükake pidurihoovad alla. Seisupiduri vabastamiseks tõmmake pidurihoovad taas neutraalasendisse

HOIATUS! Rakendage alati seisupidur, kui te rulaatorit ei kasuta! Kui rulaator ei paikne horisontaalsel aluspinnal, peate alati rakendama seisupiduri!

HOIATUS! Kui jätate rulaatori seisma, peavad seisupidurid olema alati lukustatud asendis! Ärge kunagi kasutage istet, kui pidurid ei ole lukustatud! Istudes ärge kunagi nõjatuge tahapoole. Soovitatav on istuda ainult istme esiosas. Ärge istuge koti peal.


Tarvikud

Rulaatori jaoks puuduvad tarvikud.

4. Tehnilised andmed

Rulaator Puma Air	Art 312501+02
Lükkamiskäepidemete kõrgus (reguleeritav)	82...99 cm
Kasutaja soovitatav pikkus	160...200 cm
Istme kõrgus	59 cm
Kogulaius lahti-/kokkuklapituna	65 cm / 26 cm
Lükkamiskäepidemete vahekaugus	47,6 cm
Pikkus	76,4 cm
Mass	9,45/11,95 kg
Kasutaja max kehamass / koti kandevõime	150 kg / 5 kg
Pidurid	Kaks lukustatavat pidurit koos seisupiduri funktsiooniga
Rataste mõõtmed (esi- ja tagarattad)	295 mm (12") × 45 mm

Andmesilt

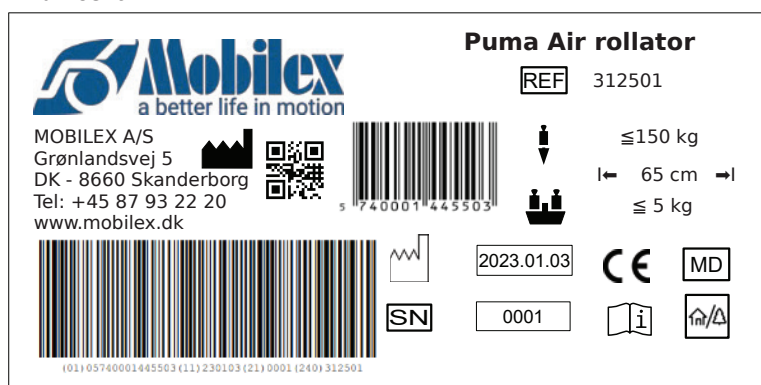

Andmesildi näide

	QR-kood, link kodulehele		Tootmiskuupäev
	Tootja		Max kandevõime
	Lugege kasutusjuhendit		Max laius
	Kasutamiseks sise- ja välitingimustes		Seerianr
	CE-märgisega toode		Art-nr
	Koti max kandevõime		Meditsiiniseade

Sümbolite tähendused

5. Hooldus ja korrashoid

Hariiliku määrdumist saab kõrvaldada tavapärase puhastusvahendite ja käsna või pehme lapiga. Kontrollige konkreetset tooteteavet ja kasutage puhastamiseks ainult kaubanduses müüdavaid sobivaid puhastusvahendeid. Kasutage desinfitseerimiseks ainult kohapeal müüdavaid meditsiiniseadmete kasutamiseks sertifitseeritud desinfitseerimisvahendeid.

Rattaid võib puhastada kuuma vee ja pehmetoimelise puhastusvahendiga. Pärast puhastamist tuleb rattalaagreid õlitada regulaarselt või siis, kui rattad hakkavad kriuksuma.

Vaatamata tugevale konstruktsioonile ja vastupidavate materjalide kasutamisele toode siiski kulub. Seetõttu on soovitatav lasta toodet regulaarselt kontrollida professionaalses hooldusettevõttes. Soovitatavad hooldustoimingud:

- ✓ rulaatori puhastamine ja desinfitseerimine
- ✓ raami kontrollimine paindumise, kahjustuste, kulumise või korrosiooni suhtes
- ✓ kuluvate osade kontrollimine ja vajaduse korral asendamine
- ✓ kõikide kruviühenduste järelpingutamine

Soovitatav kasutusiga: tavaliselt 10 aastat, sõltub kasutuse intensiivsusest.

Ladustamine: soovitame hoida kuivas kohas temperatuuril üle 0 °C.

Transportimine

Soovitatav on rulaator transportimiseks kokku klappida. Rulaatorit tuleb transportida stabiilses asendis ja kinnitatuna viisil, mis välistab transportimise ajal ootamatu ning ohtliku liikumise.

Korduskasutus

Toode sobib korduskasutamiseks. Enne kui uus kasutaja võtab toote kasutusele, tuleb rulaator tehniliselt üle vaadata ja desinfitseerida 5. punkti kohaselt.

6. Tavalisemad probleemid ja lahendused

Probleemid	Võimalikud põhjused	Lahendused
Rulaatorit on raske juhtida või lükata	Ratta ja kahvli vahel on mustus	Kõrvaldage ratta ja kahvli vahel olev mustus
Pidurid ei toimi korralikult või toimivad üksnes ühel poolel.	Piduriklotsid on kulunud või ei ole pidurid õigesti reguleeritud	Reguleerige pidurid Vajaduse korral asendage piduriklotsid (-> hoolduskeskus)
Rulaatori lahtiklappimisel ei sobitu iste raamiga	Lukustusseade on vales asendis või defektne.	Kontrollige, kas lukustusseade on õiges asendis Vajaduse korral asendage (-> hoolduskeskus)
Rulaator ei liigu sirgjooneliselt	Rehvirõhk ei ole piisav	Kontrollige rehvirõhku

7. Toote jäätmekäitlus

Toodet ei tohi saata jäätmekäitlusesse koos olmejäätmetega, vaid see tuleb viia kohalikku utiliseerimiskeskusesse.

8. Garantiitingimused

Mobilex A/S annab 2-aastase garantii kahjustuste puhul, mis on põhjustatud tootmisvigadest või materjali defektidest. Garantii ei kehti toote mitteotstarbelise remondi või kasutamise puhul. Tavapäraselt kuluvad osad ei kuulu garantii alla, välja arvatud juhul, kui kulumise põhjuseks on tootmisviga. Kui toodet on muudetud meie kirjaliku heakskiiduta, kaotavad toote CE-märgis ja garantii kehtivuse. Selle garantiiga hõlmatud tootekahjustuste korral teavitage sellest oma edasimüüjat või otse ettevõtet Mobilex A/S. Garantii ei kata transpordikulusid ega hõlma hüvitist isikuvigastuste või toote mittekasutamise eest remondi ajal. Garantii ei kata kahjusid, mis tulenevad kasutusjuhendi nõuete eiramisest.

9. Vastavusdeklaratsioon

Rulaator on läbinud vastavushindamise ELi määruse MDR 2017/745 alusel meditsiiniseadmete kohta ja sel on CE-märgistus. Toote kohta välja antud vastavusdeklaratsioon on kättesaadav aadressil:

mobilex.dk/medias/2023-03/puma_air_ce_11881.pdf

või paremal oleva QR-koodi kaudu.

