

## Potitool Swereco

Toote kood: 144202

### Ohutus

- Toodet tohib kasutada ainult vastavalt sellele ette nähtud funktsioonile.
- Potitooli kaant ei tohi kasutada seljatoena.
- Vältimaks õnnetusi, tuleb tool enne kasutamist asetada kindlale tasasele pinnale, nii et see toetuks kõigile neljale jalale.
- Tooli ei tohi liigutada koos sellel istuva kasutajaga.
- Tool ei ole mõeldud kasutamiseks ilma pikendatavate jalgade või kinnitusklambriteta!
- Enne kasutamist tuleb kontrollida, et tooli kummiotsikud oleks terved. Katkiste otsikute korral on oht koos potitooliga libiseda. Purunenud ja kulunud otsikud tuleb vahetada uute vastu.
- Enne kasutamist kontrollige, et jalgade kinnitusklambriid oleks korralikult paigaldatud.



### Kasutamine

Toode on mõeldud kasutamiseks tualetipoti kõrgendamiseks (sel juhul kasutatakse koos kõriga), lihtsustades nii viisi tualetis käimist. Toodet võib kasutada ka eraldi koos ämbriga.

Kõrguse reguleerimine: eemaldage jala kinnitusklamber, tõmmake jalg pikemaks või lükake seda sissepoole, paigaldage klamber tagasi nii et käib klõpsatus. Toimige nii kõigi jalgadega.

Põranda ebatasasuste korral on võimalik reguleerida punase/valge kummiotsikuga jala pikkust seda otsikut keerates.

Kui te tahate seada tooli kergelt ettepoole kaldu, siis ei tohi esimeste ja tagumiste jalgade kõrguste vahe olla suurem kui kaks reguleerimisauku.

Toodet tuleks regulaarselt puhastada (vähemalt kord kuus) seebi ja veega, pH 5-9.

### Andmed

Üldlaius: 53 cm

Laius käetugede vahelt: 48 cm

Kõrgus reguleeritav: 44-63 cm

Käetoe kõrgus istmest: 23 cm

Iste: 42x36 cm

Ämbrihoidiku laius laiemast kohast: 23 cm

Ämbrihoidiku pikkus: 27 cm

Kaal: 5,4 kg

Materjal: teras, PE (iste), TPE (kummiotsikud)

Maksimum kasutaja kaal: 160kg