

**Kokkupanemis- ja kasutusjuhend**  
**Kokkupandav ratasteta tugiraam, tõstetav ja isesammuv**  
Art. nr 33000 000 ja 33000 010



### **Kasutusotstarve**

Ratasteta tugiraam on mõeldud abivahendina kõndimisel piiratud liikumisvõimega inimestele.

### **Tingimused**

Tugiraami tohib kasutada ainult kõval tasasel pinnal. Ärge kasutage tugiraami väljas.

### **Näidustus**

Piiratud liikumisvõimega inimestele.

### **Enne esimest kasutamiskorda**

Enne tugiraami kasutamist/ülesseadmist kontrollige, et tugiraam oleks terve ja kahjustamata.

### **Tugiraam ülesseatuna**



### **Lahtipakkimine**

- Pöörake mõlemad küljeosad käepidemetest kinni hoides väljapoole.
- Lukustus peab kuuldavalt fikseeruma.
- Kontrollige, et lukustus oleks kindel - küljeosad ei tohi liikuda.


### **Kokkupakkimine**

- Vajutage lukustusnupp alla.
- Samal ajal tõmmake parem küljeosa ja seejärel vasak küljeosa sissepoole.



Kokku- ja lahtipakkimisel esineb käte vigastamise oht.

## Kõrguse reguleerimine

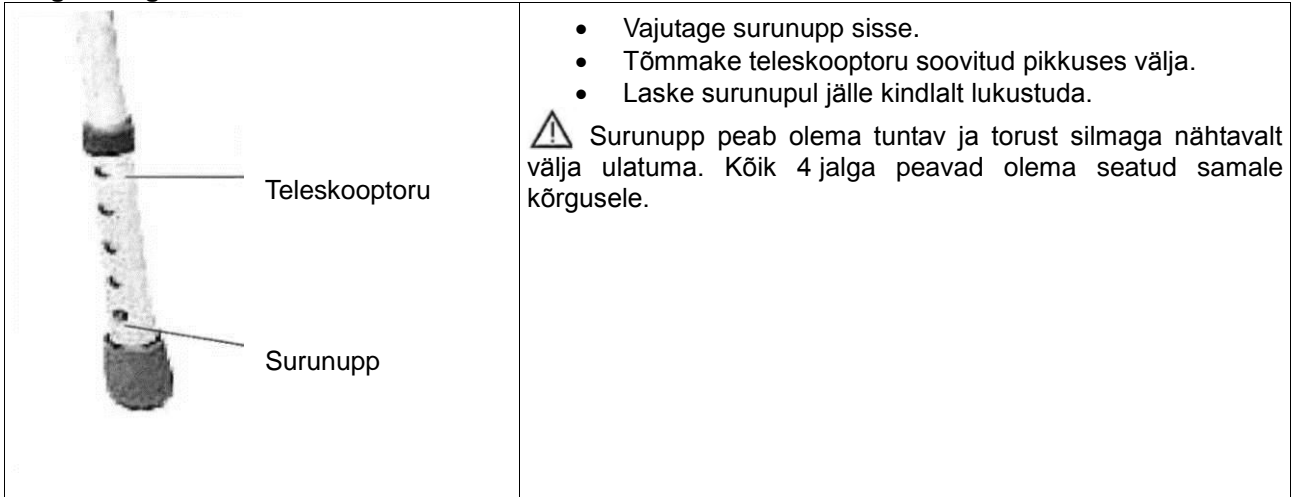

- Vajutage surunupp sisse.
- Tõmmake teleskoopтору soovitud pikkuses välja.
- Laske surunupul jälle kindlalt lukustuda.

⚠ Surunupp peab olema tuntav ja torust silmaga nähtavalt välja ulatuma. Kõik 4 jalga peavad olema seatud samale kõrgusele.

## Kasutamine

Enne kasutamist kontrollige kõrguse reguleerimiseks kasutatavaid surunuppe – need peavad torudest silmaga nähtavalt välja ulatuma.

Hoidke tugiraami käepidemetest kinni ja liigutage seda kogu aeg väikeste sammude võrra edasi. Tugiraam peab sealjuures toetuma alati kindlalt kõigile neljale jalale. Astuge seejärel väike samm tugiraami sisse, hoides samal ajal kindlalt käepidemetest kinni. Tugiraami edasi liigutades võtke tingimata sisse kindel asend. Tugiraami tohib kasutada ainult kõval tasasel pinnal.

## Puhastamine / desinfitseerimine:

Ärge kasutage puhastamiseks teravaid või abrasiivseid esemeid.

Tugiraami võib puhastada pehme, mitteabrasiivse puhastusvahendiga.

## ⚠ Ohutusteave

- Kasutaja maksimaalkaal ei tohi ületada 100 kg!
- Kokku- ja lahtipakkimisel esineb käte vigastamise oht!
- Enne kasutamist kontrollige, et surunupud oleksid õiges asendis! Kui tugiraami osad on paindunud või deformeerunud, ei tohi raami enam kasutada!
- Kontrollige, et kõik 4 jalga oleksid seatud samale kõrgusele!
- Kõrguse reguleerimisel peab jälgima, et surunupud ulatuksid torudest silmaga nähtavalt välja ja oleksid tuntavad!
- Iga kuu peab kontrollima, et kinnituskruvid oleksid kindlalt kinni!
- Kontrollige iga kuu, et kummist detailid oleksid kahjustamata!
- Ärge istuge ülemisele pulgale!
- Ärge riputage tugiraamile kotte või muud sarnast!
- Niiskel või märjal pinnal tekib libisemisoht. Kohandage oma kõnniviisi sellele ohule vastavalt.
- Ärge kasutage tugiraami abina tõusmisel!
- Ärge kasutage tugiraami väljas!

## Hooldus

Tugiraam ei nõua erihooldust.

Kord kuus tuleb kontrollida, et kinnituskruvid oleksid kindlalt kinni ja kummist detailid ei oleks kulunud ega kahjustatud.

**Tähelepanu: Kasutage ainult kummist detaile, millel on terasest tugevdused!**

## Tehnilised andmed

Art. nr 33000 000, tõstetav		Art. nr 33000 010, isesammuv	
Esiosa laius:	55,5 cm	Esiosa laius:	55,5 cm
Tagaosa laius:	57,5 cm	Tagaosa laius:	57,5 cm
Laius käepidemete vahel:	44 cm	Laius käepidemete vahel:	44 cm
Möödud kokkupandult:	79x55,5x11 cm	Möödud kokkupandult:	79x55,5x11 cm
Kõrgus, 6-kordne	79 – 91 cm	Kõrgus, 6-kordne	79 – 91 cm
Lubatud koormus:	max. 100 kg	Lubatud koormus:	max. 100 kg
Värv:	hõbedane	Värv:	hõbedane

Kasutusiga: 10 aastat

**Tarnitakse:** 1 ratasteta tugiraam, kokkupandav  
1 kasutusjuhend

## Garantii

Vastavalt seadustes kehtestatud garantiitingimustele. Garantii ei kehti vale kasutusviisi tõttu tekkinud kahjustustele, normaalsele kulumisele ja kasutamisele ning puudustele, mis mõjutavad vahendi väärtust või kasutuskõlblikkust vaid vähesel määral.

Tehnilised muudatused ja lisad ning valed hooldustööd viivad garantii ja üldise tootevastutuse lõppemiseni.

## Informatsiooniks

Muudatusi tugiraami juures või selle remonti võib teostada ainult kvalifitseeritud personal originaalvaruosasid kasutades.

Meil on õigus teha muudatusi, mis aitavad toodet tehniliselt parandada.